


FINESIA[®]

Surgical Guide System

的
心

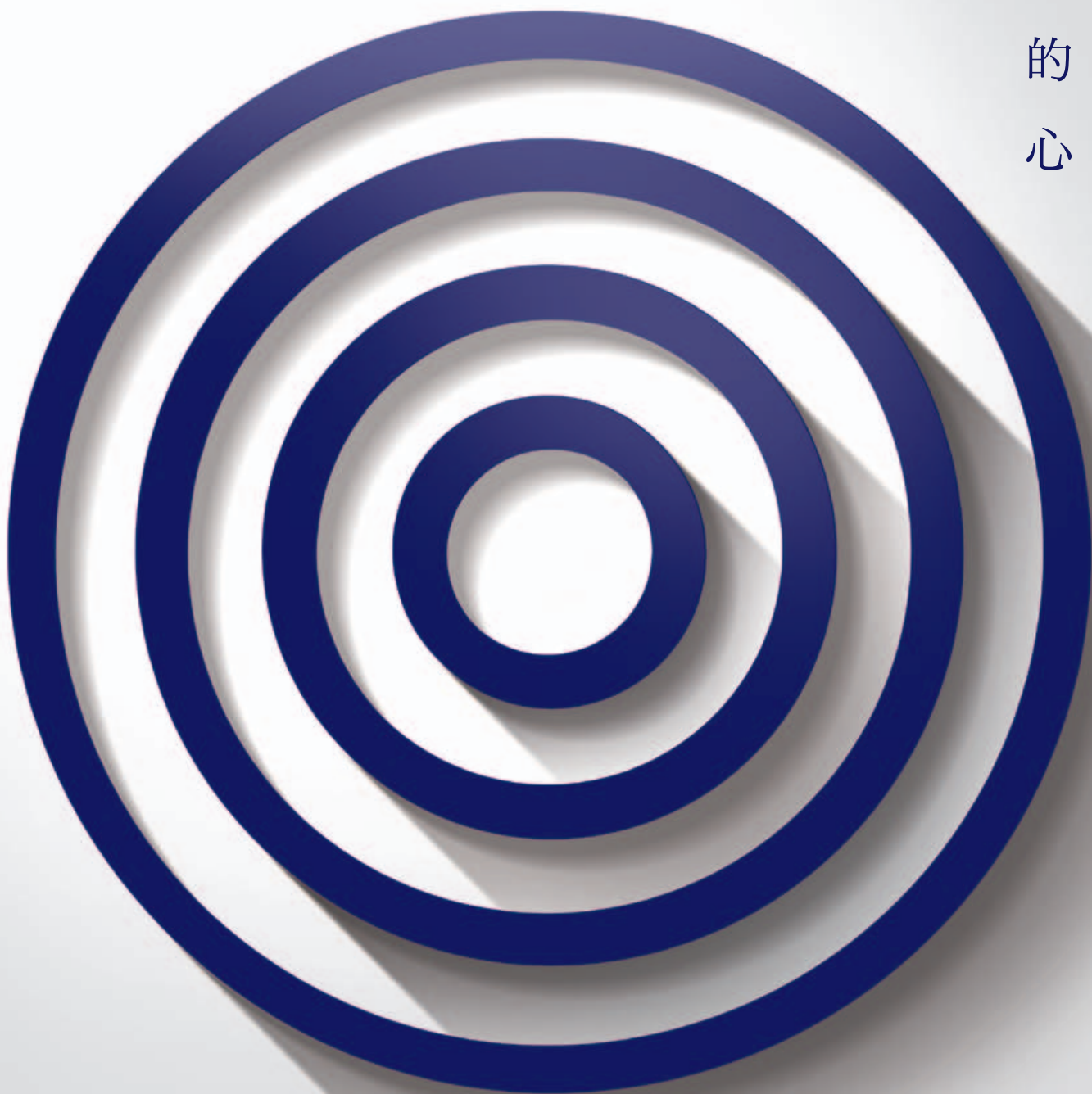



て き し ん 的 心

それは弓道における的の中心のこと。

弓道には“せいしゃ ひっちゅう正射必中”という言葉があります。

これは正しい射法で射られた矢は、必ずあた中するという意味です。

患者さまのためを考え診査診断を行い、目標とする位置

『的心』にインプラント体を埋入する。

我々は、『的心』へ、より正確なインプラント治療の

一助になりたいとの思いを込めています。

Contents

ご使用の前に	3~4
--------------	-----

術式フロー

STEP 1 CT撮影	5
STEP 2 3D治療計画	5
STEP 3 FINESIA専用サージカルガイドステント製作	5
STEP 4 術式	6~9
STEP 5 埋入	10~11

メンテナンス	12
--------------	----

術式チャート(サージカルガイドステント高さ9mm)	13
---------------------------------	----

インプラント径φ3.0mm Tapered type	14
インプラント径φ3.2mm Tapered type	15
インプラント径φ3.4mm Tapered type	16
インプラント径φ3.7mm Tapered type	17
インプラント径φ4.2mm Tapered type	18
インプラント径φ4.7mm Tapered type	19
インプラント径φ5.2mm Tapered type	20
インプラント径φ3.7mm Straight type	21
インプラント径φ4.2mm Straight type	22
インプラント径φ4.7mm Straight type	23
インプラント径φ5.2mm Straight type	24

インプラント体とサージカルガイドステント適用表

Tapered type	25
Straight type	26

製品リスト	27~39
-------------	-------

FINESIA® Surgical Guide System


ご使用の前に

- 治療計画時には開口量を測定し、FINESIA Surgical Guide Systemが適応可能か確認してください。

(開口量の測定時は、次の「切削時の寸法」と「埋入時の寸法」にご注意ください)

切削時の寸法：コントラヘッド部寸法 + 各ドリル寸法(長さ) + サージカルガイドステント高さ※

埋入時の寸法：コントラヘッド部寸法 + インプラントドライバー寸法(長さ) + 埋入するインプラント体の全長 + サージカルガイドステント高さ※

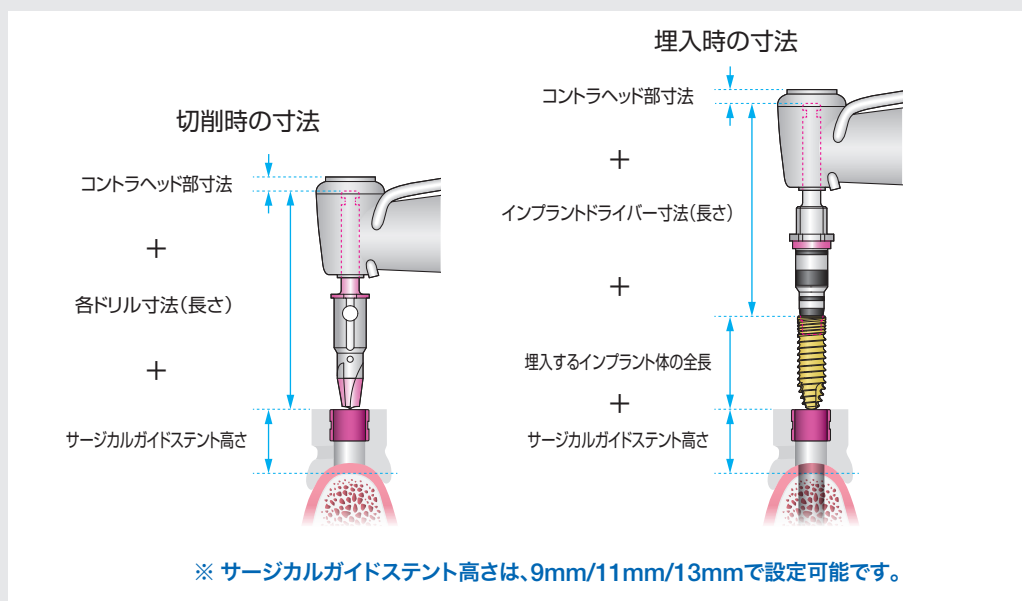


- 当社インプランターNeoシリーズを使用の場合は、内部注水用ノズルはサイズM(20mm)を使用してください。

それ以外のインプラントモーターを使用の場合は、各メーカーへお問い合わせください。

- オペ前に、各ドリルの内部注水口から正常に注水されることを口腔外で確認してください。

- 形成したインプラント窩に適したインプラントサイズを選定してください。

内部注水ドリルの仕様

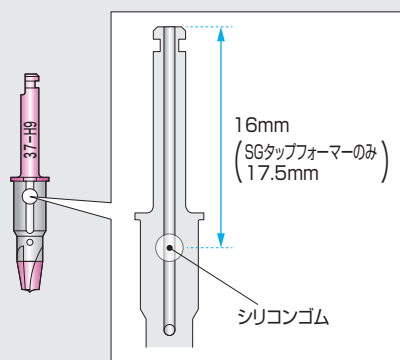


- シリコンゴムは、パッキンの役割を果たして注水の逆流を防ぎます。
- ノズル挿入時、ノズルがシリコンゴムまで挿入されていることを確認してください。(ノズル先端がシリコン部に圧入されている感触を感じながら奥までノズルを挿入してください)
- SGパイロットドリル、SGステップドリル、SGファイナルドリル、SGタップフォーマーは内部注水仕様となっています。
- SGティッシュパンチは内部注水仕様ではありませんが、内部注水用ノズルをコントラチャック部に収納できます。


注) 注水口(3口)から正常に注水されることを
口腔外で確認してください。

コントラヘッド部寸法


インプランター Neo※

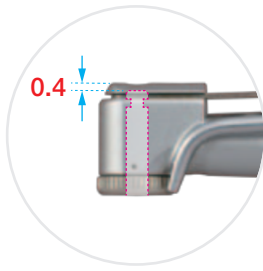


インプランター Neo BRIGHT※

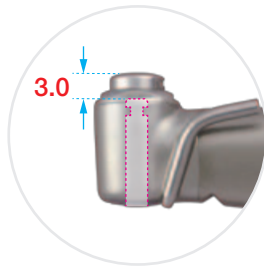

インプランター Neo Black※

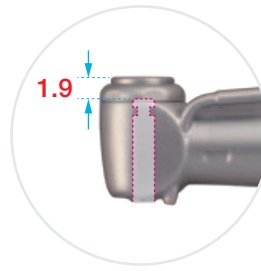


インプランター Neo Plus※

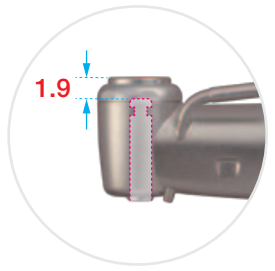


(単位: mm)

ドリル寸法(長さ)一覧


SGティッシュパンチ

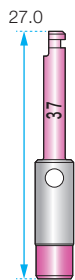


SGパイロットドリル

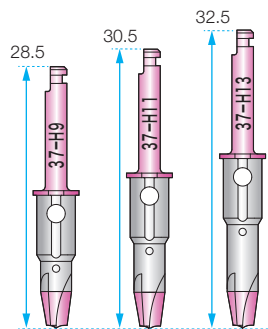


SGステップドリル

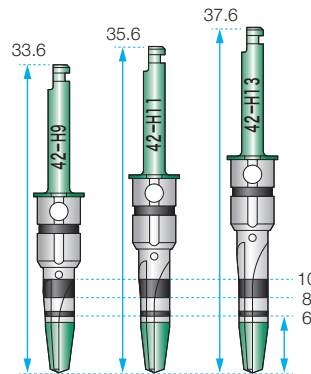


SGファイナルドリルTP

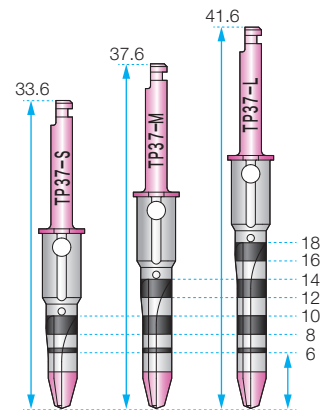


SGファイナルドリルST

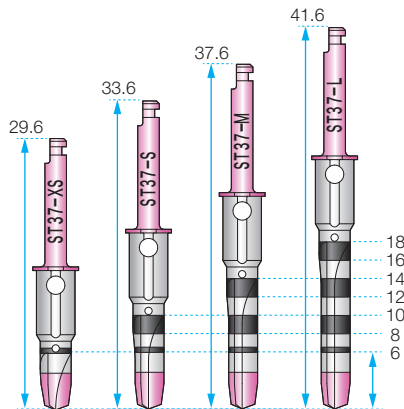

SGタップフォーマー-TP

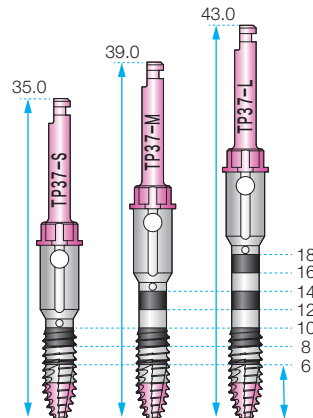


SGタップフォーマー-ST

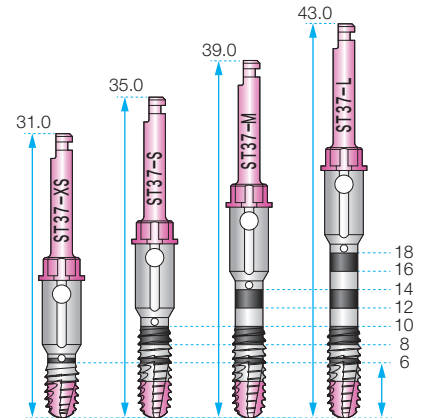


(単位: mm)

インプラントドライバー寸法(長さ)

SG BLインプラントドライバー

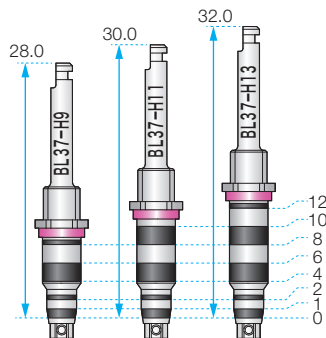

SG BLインプラントドライバー-WH

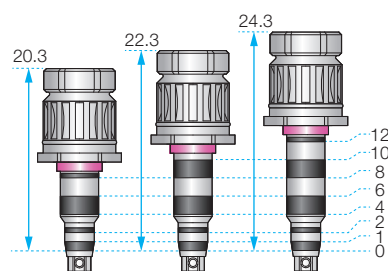

※インプランター Neo、インプランター Neo BRIGHT、
インプランター Neo Blackおよびインプランター Neo Plusの
製造販売元は株式会社ナカニシです。

インプランター Neo【医療機器承認番号: 22200BZX00173000】

インプランター Neo Black【認証番号: 222ALBZX00003000】

インプランター Neo BRIGHT【医療機器承認番号: 22200BZX00201000】

インプランター Neo Plus【認証番号: 223ALBZX00027A01】

注) ドリル寸法(長さ)、およびインプラントドライバー寸法(長さ)は、直径に関わらず同一です。



STEP 1 CT 撮影

CT撮影用ステントを準備の上、医用CTまたはコンビームCTで撮影を行います。

注) オペ時の口腔内と同じ状態でCT撮影されることが理想です。



STEP 2 3D 治療計画

撮影したCT画像を当社指定のシミュレーションソフト用データに変換し、3D画像を作成します。シミュレーションソフト上でインプラントを配置し治療計画を立案します。計画立案後は、シミュレーションソフトを医師、ラボ、患者とのコミュニケーションツールとして使います。

注1) 治療計画には、当社指定のシミュレーションソフトを使用してください。

また、使用に当たっては、シミュレーションソフトメーカーの操作マニュアルを参照してください。

注2) 当社指定のサージカルガイドステント製作メーカーとそのシミュレーションソフトに関しては、当社にお問い合わせください。

注3) インプラント体のサイズ選択と埋入位置については「FINESIAマニュアル 外科用マニュアル」を参照してください。



STEP 3 FINESIA専用サージカルガイドステント製作


骨支持タイプ、粘膜支持タイプ、歯牙支持タイプより固定方法を選択し、サージカルガイドステント高さ9mm、11mm、13mmの3種類から、術式に合ったサージカルガイドステントを製作します。

サージカルガイドステントの固定方法



SGガイドチューブポジション

サージカルガイドステントの固定方法や軟組織の厚さ等によってSGガイドチューブポジションが決まります。

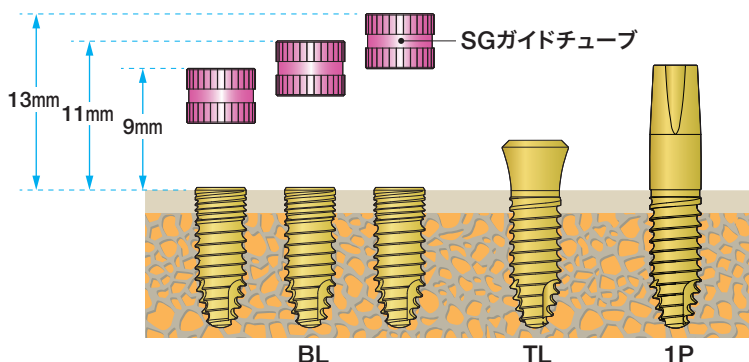

1P: 1Piece BL: Bone Level TL: Tissue Level

STEP 4

術式

1 SGティッシュパンチ



パンチ回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら切削してください。

歯肉のみ切除するドリル。


先端径は、インプラント径より0.3mm大きい設計。

例) SGティッシュパンチ37 → 先端径φ4.0(対象インプラント径φ3.7)

注) 回転数20rpmで使用してください。

内部注水用ノズルを装着のまま、コントラチャック部への取付けが可能です。

2 SGパイロットドリル

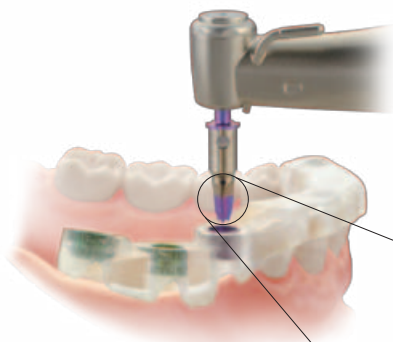


ドリル回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら切削してください。

骨面から深さ5.5mmまでドリリングできるスターティングドリル。
皮質骨を切削する役割。


【内部注水式】

注) 回転数800～1200rpmで使用してください。

サージカルガイドステント高さ9mm、11mm、13mmに合わせて、専用のドリルを使用してください。

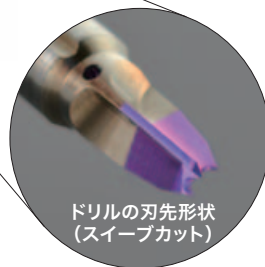

ドリルの刃先形状
(スイープカット)

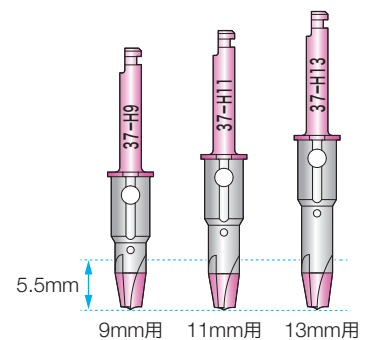

STEP 4 術式

3 SGファイナルドリル




ドリル回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら切削してください。

インプラント窩形成に使用するドリル。

【内部注水式】

注) 回転数800～1200rpmで使用してください。

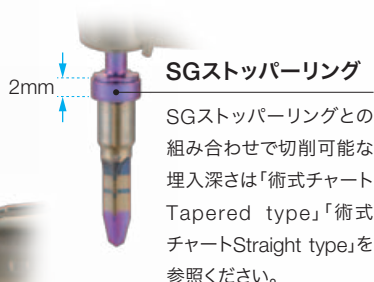

SGストッパーリング

SGストッパーリングとの組み合わせで切削可能な埋入深さは「術式チャート Tapered type」「術式チャートStraight type」を参照ください。

ATTENTION

装着時の注意点

SGストッパーリングの組み付け注意事項

ドリルの中心軸に対し、SGストッパーリングを垂直に装着してください。

対象:
SGステップドリル
SGファイナルドリル
SGタップフォーマー



(単位 :mm)


ドリル先端仕様		
ドリルの刃長は、インプラント体よりも下記のように長く設定されています。		
SGステップドリル	SGファイナルドリルTP	SGファイナルドリルST
φ4.2 φ4.7 φ5.2 → 0.2長い 0.2 ↑	φ3.0 φ3.2 φ3.4 φ3.7 → 0.1長い φ4.2 φ4.7 φ5.2 → 0.2長い 0.1もしくは0.2 ↑	φ3.7 φ4.2 φ4.7 φ5.2 → 0.2長い 0.2 ↑



4 SGタップフォーマー



タップフォーマー回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら切削してください。

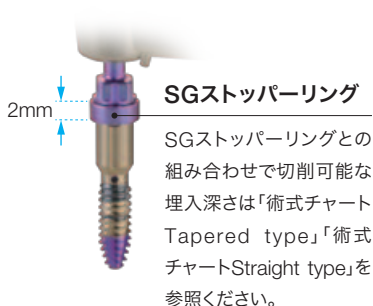

骨質の硬い場合、インプラント径に応じてタップを形成する器具。

【内部注水式】

注) トルク70N・cm以下、回転数20rpmで使用してください。

直径5.2mmのインプラント体埋入時は、通常の骨質の場合でも必ずタップフォーマーを使用してください。

タップ形成の際、骨質が硬い場合は2～3回戻し、再度タップ形成を行ってください。



ATTENTION

SGタップフォーマーが骨を噛み込んだ時の対処方法

SGタップフォーマーが骨を噛み込んだ場合は、FDアダプタをSGタップフォーマーの四角ヘッドに組み付け、トルクレンチで逆回転させてください。

FDアダプタ

トルクレンチ

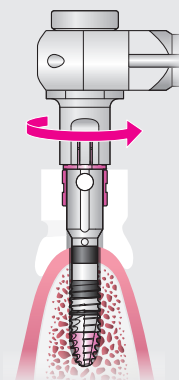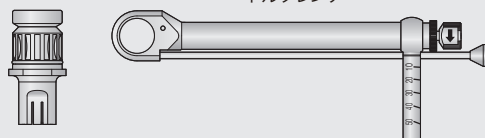

5 SGガイドアンカー



多数歯の症例の際、サージカルガイドステントを固定する器具。インプラント窩の深さ・方向を確認することにも使用可能。


インプラント窩の深さ確認方法

- スtent付の場合 埋入深度を示した溝をX線写真またはCT画像で確認してください。
- スtentを外した場合 埋入深度を示したレーザーマーキングを目視で確認してください。

SGガイドアンカーTP

SGガイドアンカーST

骨内長6mmではSサイズ、8～14mmまではMサイズ、16mmはLサイズを使用してください。ただしTPの骨内長6mmサイズはありません。

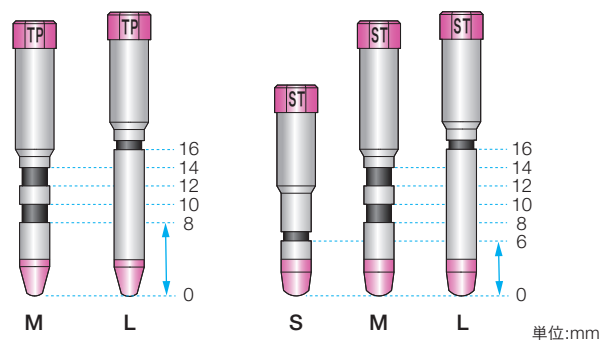

STEP 4

術 式

インプラント径φ4.2mm、φ4.7mm、φ5.2mmではSGステップドリルが必要です。

SGステップドリル




ドリル回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら切削してください。

インプラント窩を形成する際に順次拡大するためのドリル。

【内部注水式】


注) 回転数800～1200rpmで使用してください。

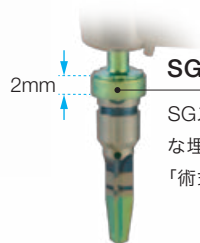

SGストッパーリング

SGストッパーリングとの組み合わせで切削可能な埋入深さは「術式チャートTapered type」「術式チャートStraight type」を参照ください。

サージカルガイドステント高さ9mm、11mm、13mmに合わせて、専用のドリルを使用してください。

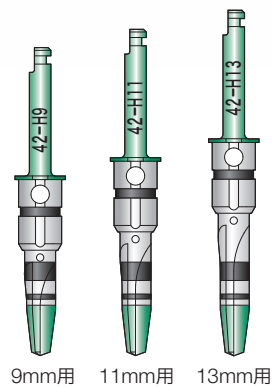

9mm用

11mm用

13mm用

STEP 5

埋入

SG BLインプラントドライバー




ドライバー回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら埋入してください。

インプラント体を埋入する器具。

注) トルク: 最初の設定20N・cm (50N・cm以下の範囲で徐々にトルクを上げてください) 回転数: 20rpm以下で使用してください。

サージカルガイドステント高さ9mm、11mm、13mmに合わせて、専用のインプラントドライバーを使用してください。


埋入トルクが50N・cmを超える場合、インプラント体を一度除去し、SGタップフォーマーでタップ形成を行った後、再度インプラント体を埋入してください。

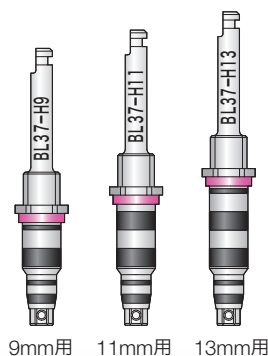


9mm用 11mm用 13mm用

注) 1PとTLはサージカルガイドステントを外して埋入してください。

埋入方法は「FINESIAマニュアル 外科用マニュアル」を参照してください。

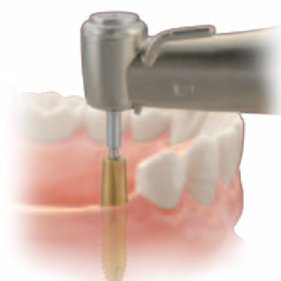

1P

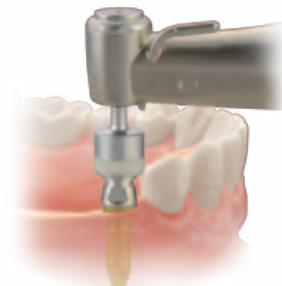


TL

ATTENTION

インプラント体嵌合部内部の方向確認方法

SG BLインプラントドライバーの先端部の六角(B)とつば部の六角(A)面は同じ向きのため、埋入時につば部の六角(A)を見ながらインプラント体内部の六角向きが調整できます。


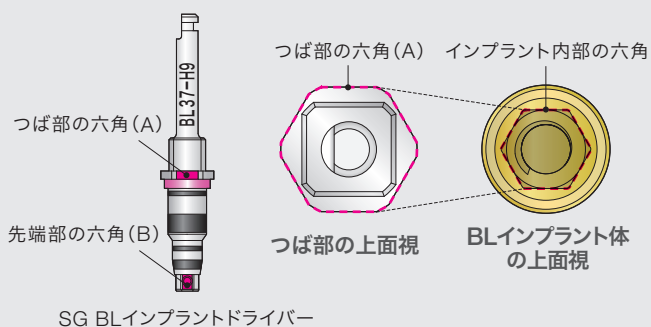


STEP 5 埋入

ATTENTION

インプラント体のピックアップ

- ① 使用前に、インプラント体把持部にアナログ等を適合させて、把持機能が正常に作用することを確認してください。^{※1}
- ② 本製品とインプラント体を組み合わせる際は、まっすぐ所定の位置まで（奥まで）挿入し、しっかりと固定されていることを確認してください。固定されない場合は、器具及びインプラント体破損の恐れがあります。^{※2}
- ③ 本製品を使用する際は、本製品の中心軸がインプラント体と同軸になっていることを確認してください。同軸でない場合は、器具及びインプラント体破損の恐れがあります。^{※3}

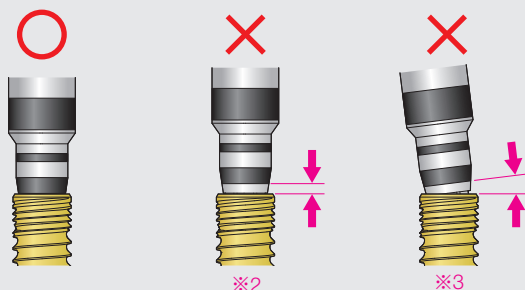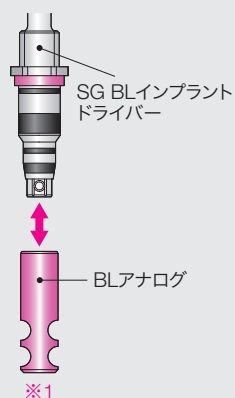


ATTENTION

インプラントモータを使用しない場合の埋入方法


トルクレンチでインプラント体を埋入する場合は SG BLインプラントドライバー-WHを使用してください。

インプラント体嵌合部内部の方向確認方法

SG BLインプラントドライバー-WHの先端部の六角(B)と天面の六角(A)面は同じ向きのため、埋入時に天面の六角(A)を見ながらインプラント体内部の六角向きが調整できます。

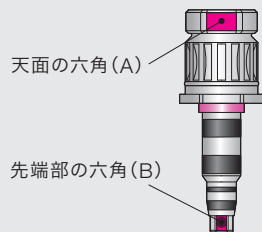

SG BLインプラントドライバー-WH

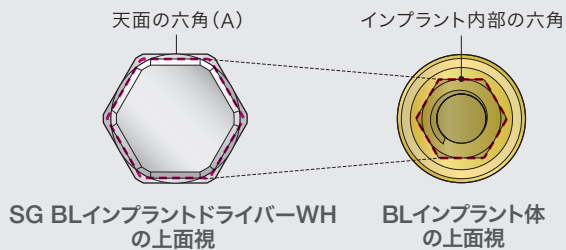

SG BLインプラントドライバー-WH
の上面視

BLインプラント体
の上面視

内部注水ドリルの清掃方法



内部注水口の洗浄

コップなどに精製水を入れ、内部注水ノズルを通して注水させてください。

注）内部注水ドリル内に生理食塩水などが残留していると詰まりの原因となります。



ノズル清掃針

ドリルの注水口に詰まりがある場合は、ノズル清掃針 (CDM03509) などで清掃してください。

それ以降の清掃については、当社にお問い合わせください。

器具オートクレーブ滅菌条件

本製品は未滅菌であり、口腔内で使用する前に必ず洗浄および滅菌を行ってから、使用してください。


・滅菌条件例

(第 16 改正日本薬局方 参考情報 微生物殺滅法 2.滅菌法 2.1.加熱法
(i) 高圧蒸気法による。保持温度及び保持時間は右表参照で行ってください。)

オートクレーブ条件

保持温度	保持時間
121～124℃	15分間
126～129℃	10分間


術式チャート(サージカルガイドステント高さ9mm)

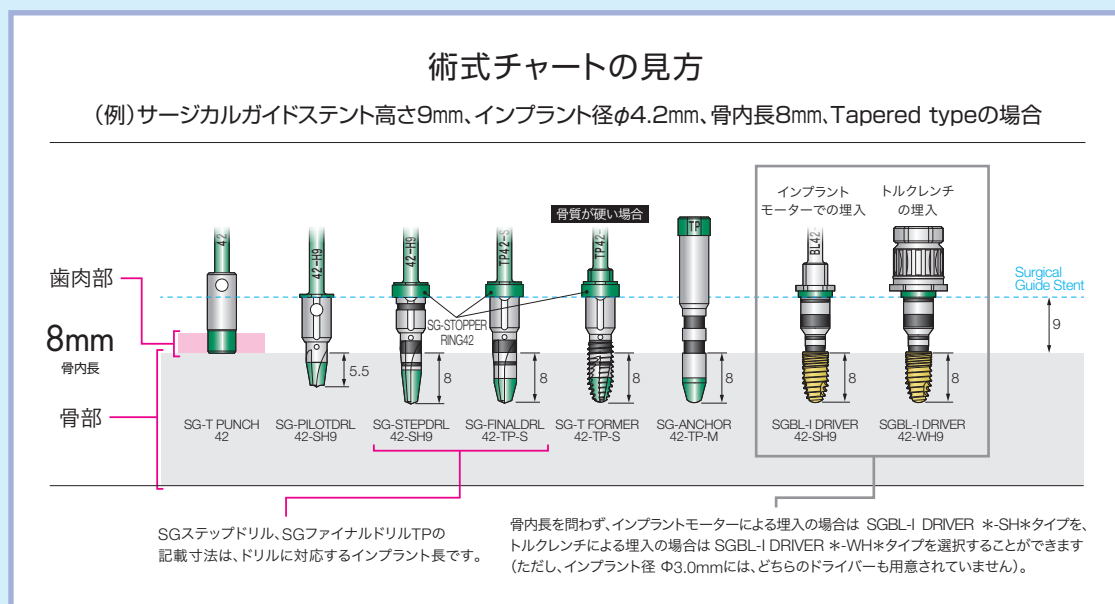

注) サージカルガイドステント高さ11mm、13mmの術式チャートについては別途お問い合わせください。


インプラント体とサージカルガイドステント適用表

製品リスト

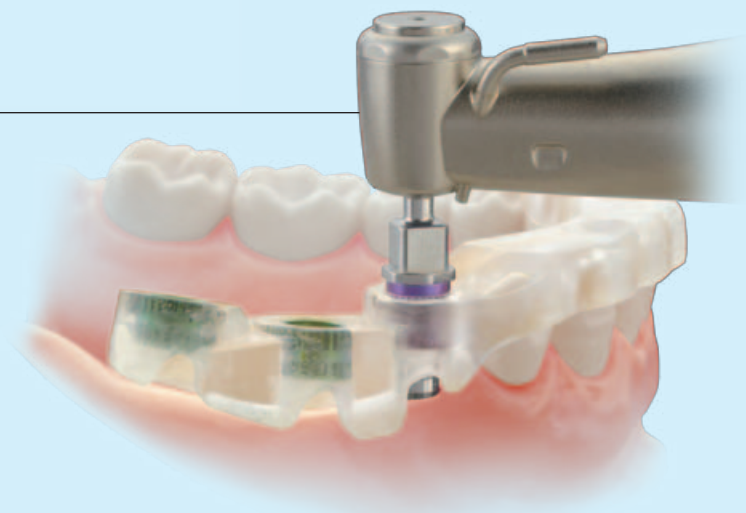

インプラント径 $\phi 3.0\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

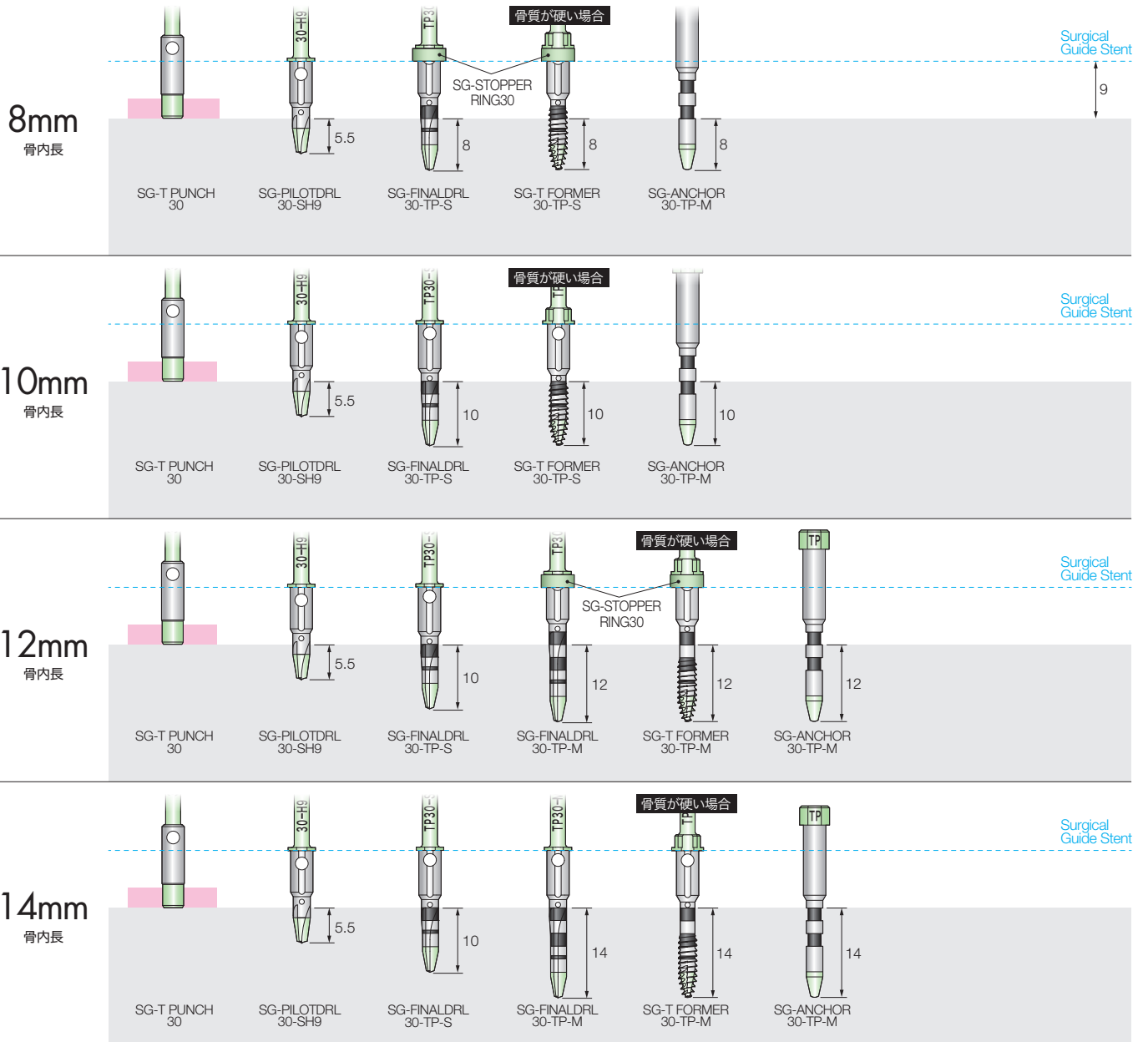

1P: 1Piece

単位 :mm

9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート


Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.2\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドシステムを外してインプラントを埋入してください。


8mm

骨内長

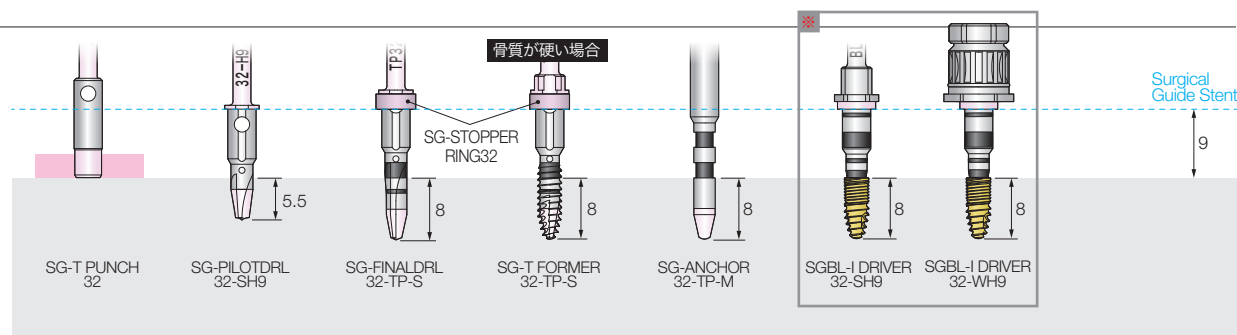


10mm

骨内長

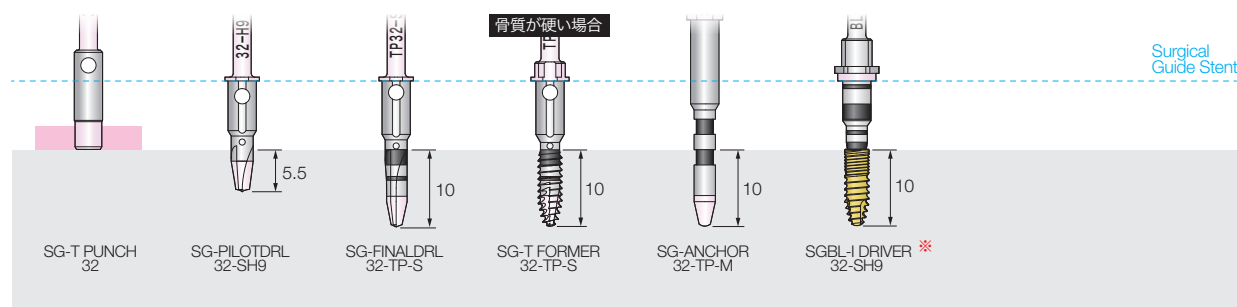


12mm

骨内長

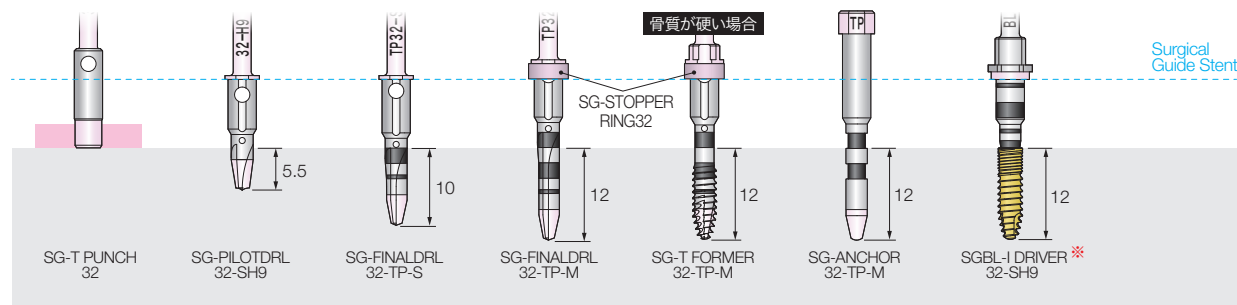


14mm

骨内長

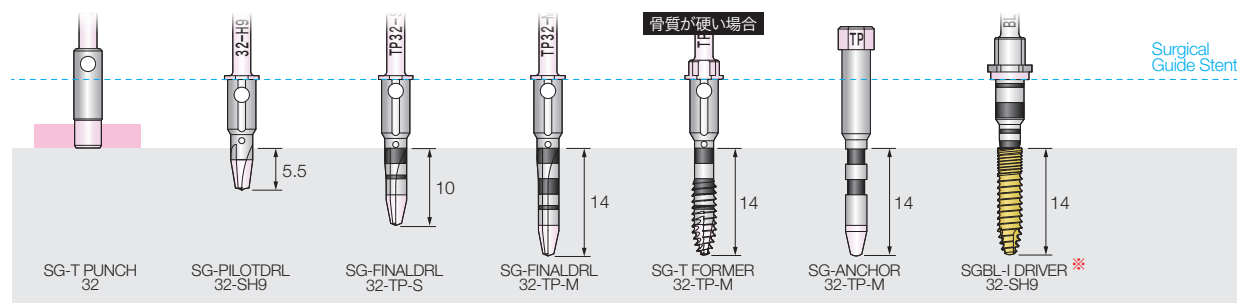

16mm

骨内長

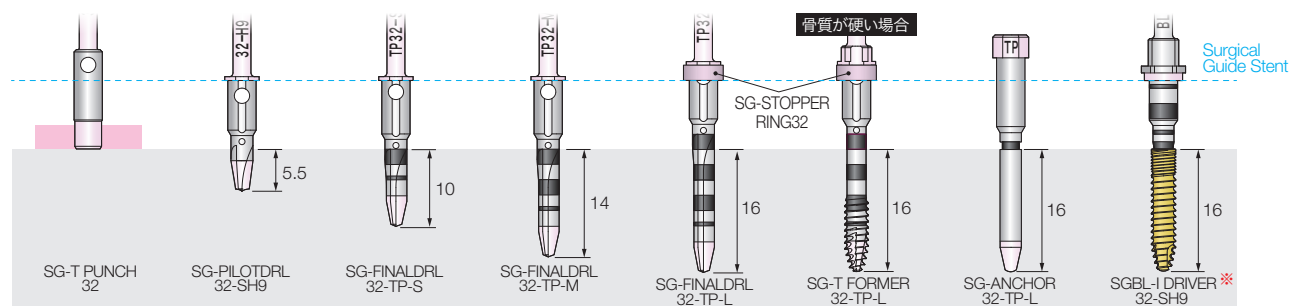


1P: 1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH9タイプを選択することができます。

インプラント径 $\phi 3.4\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

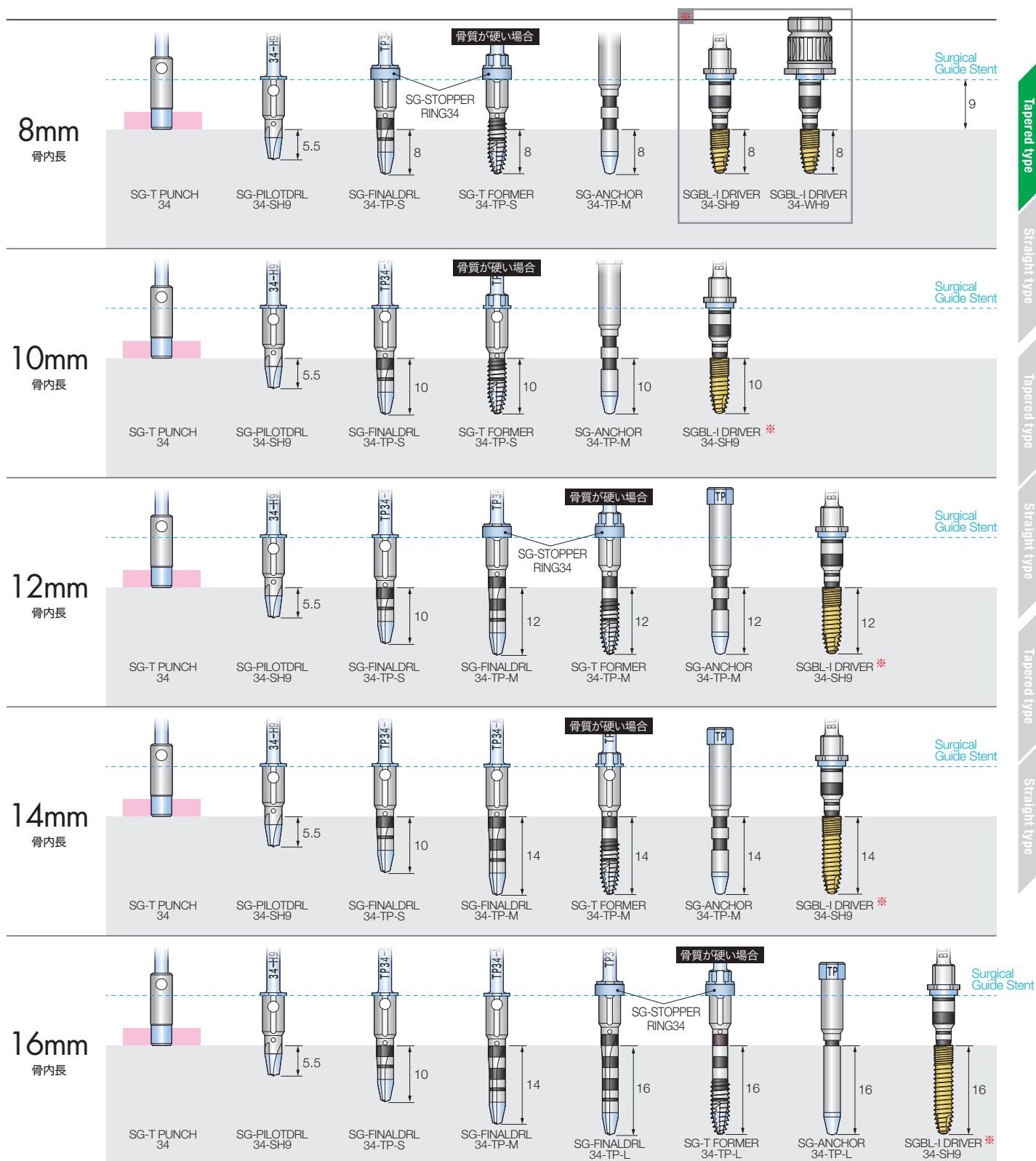

1P: 1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH9タイプを選択することができます。

9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート


Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


8mm

骨内長

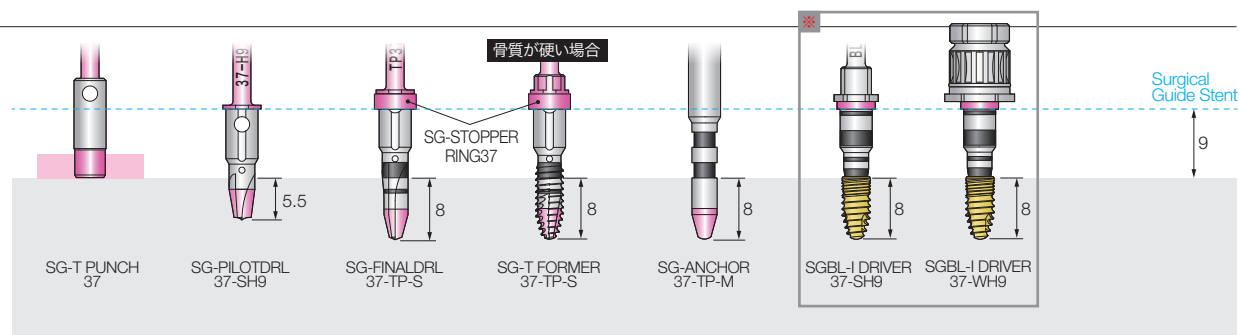


10mm

骨内長

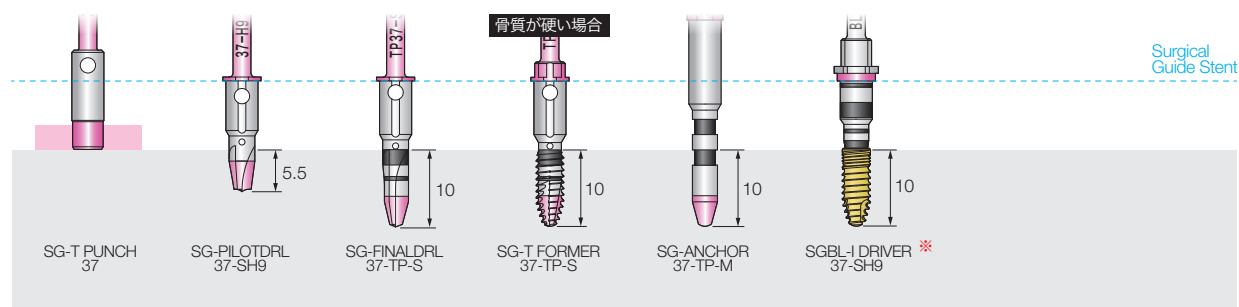


12mm

骨内長

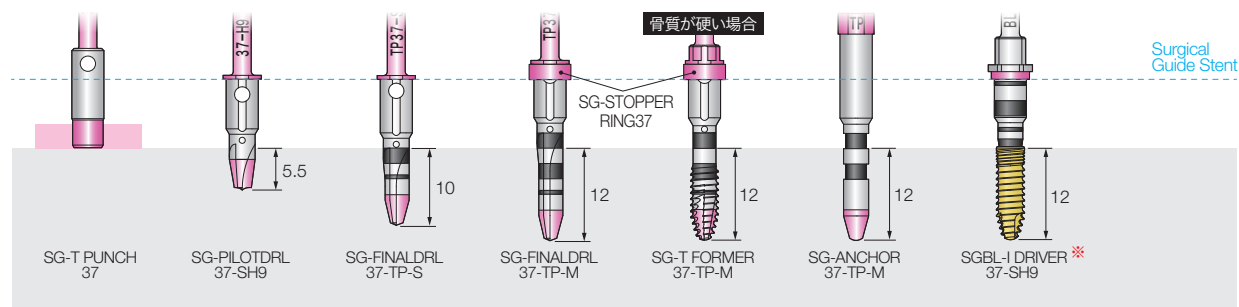


14mm

骨内長

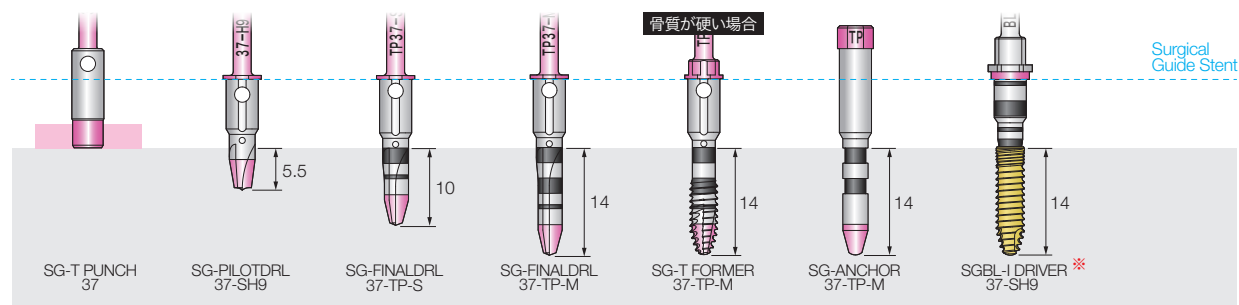

16mm

骨内長

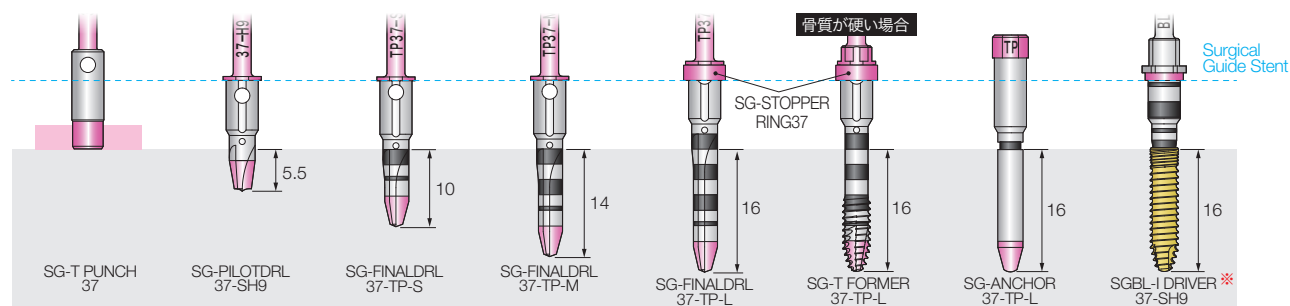

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH9タイプを選択することができます。


9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

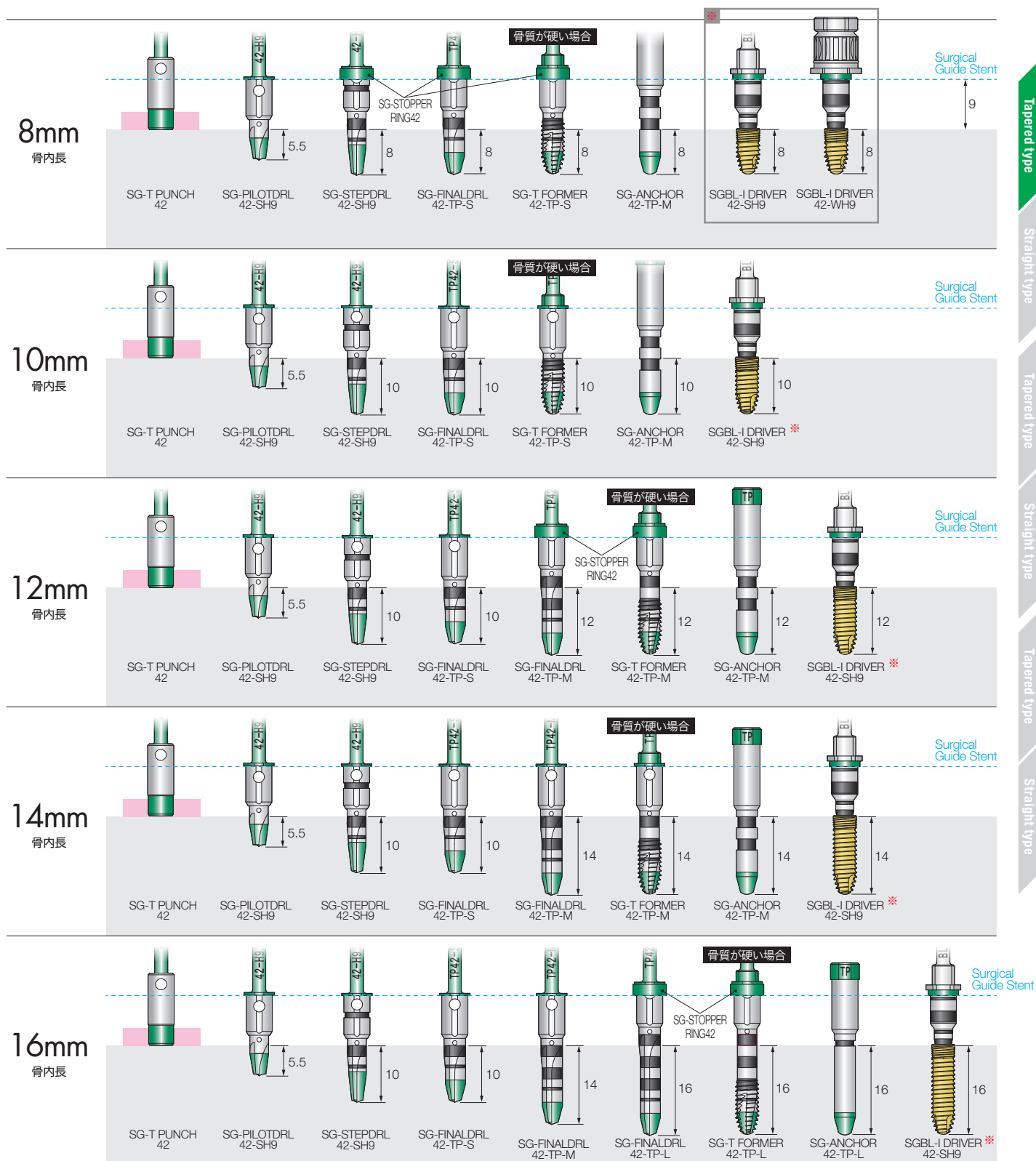

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH9タイプを選択することができます。

術式チャート

Tapered type

Straight type

Tapered type

Straight type

Tapered type

Straight type

インプラントメーカーのサージカルガイドシステム適用表

製品リスト

9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート


Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


8mm

骨内長

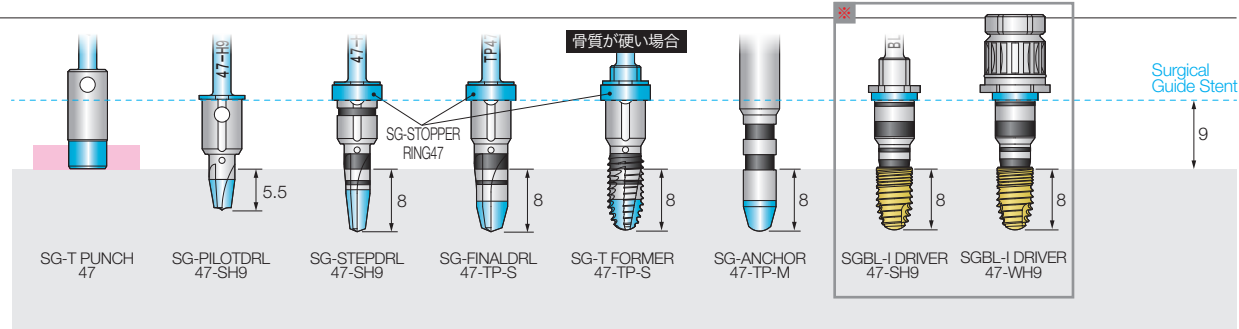


10mm

骨内長

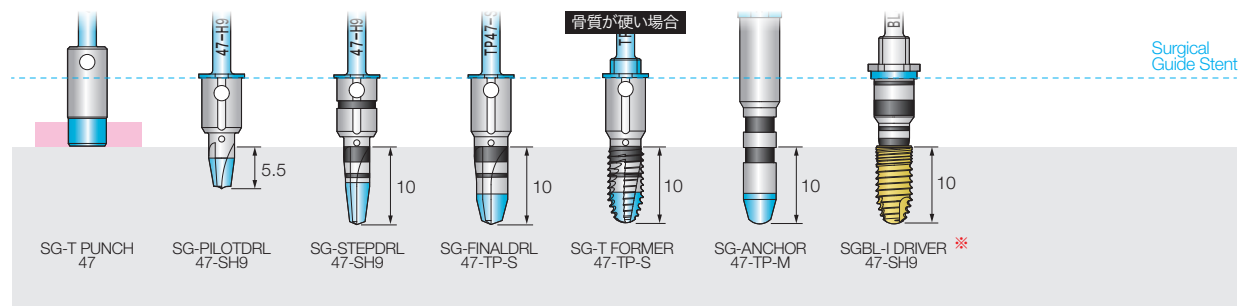


12mm

骨内長

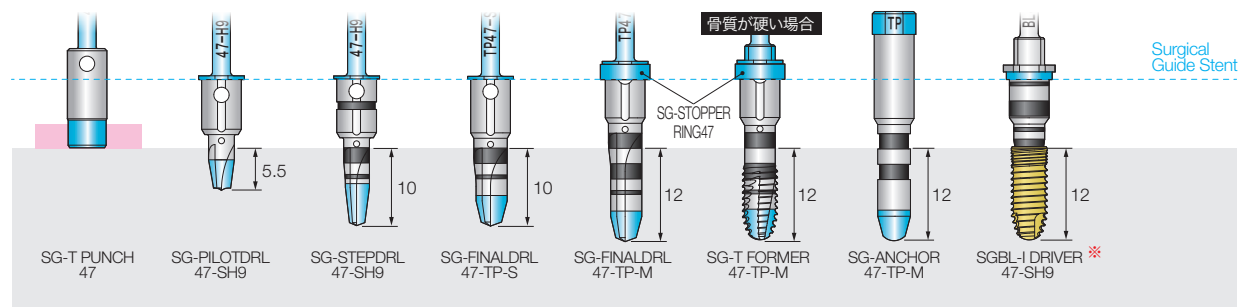


14mm

骨内長

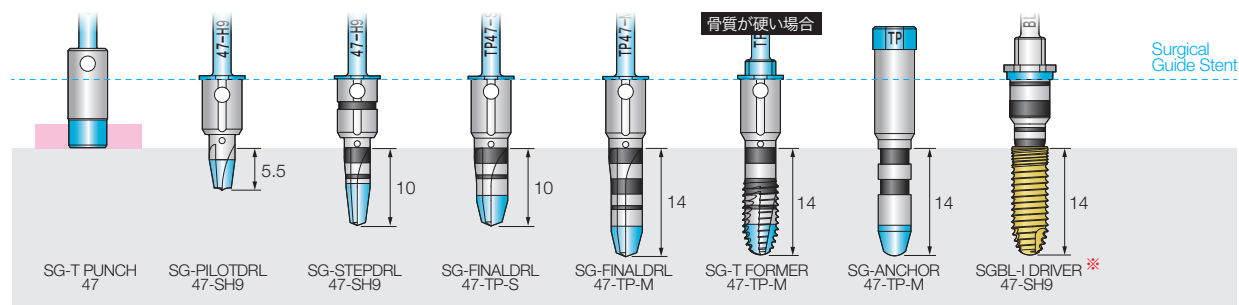

16mm

骨内長

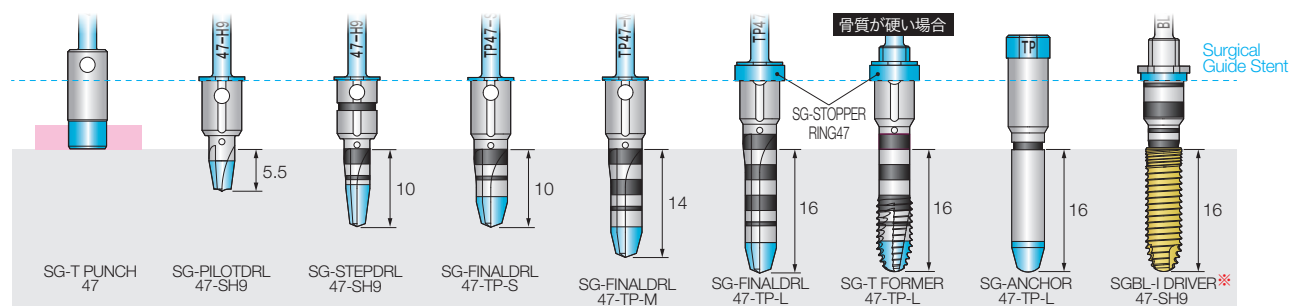


1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH9タイプを選択することができます。

インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

TLタイプはサージカルガイドシステムを外してインプラントを埋入してください。

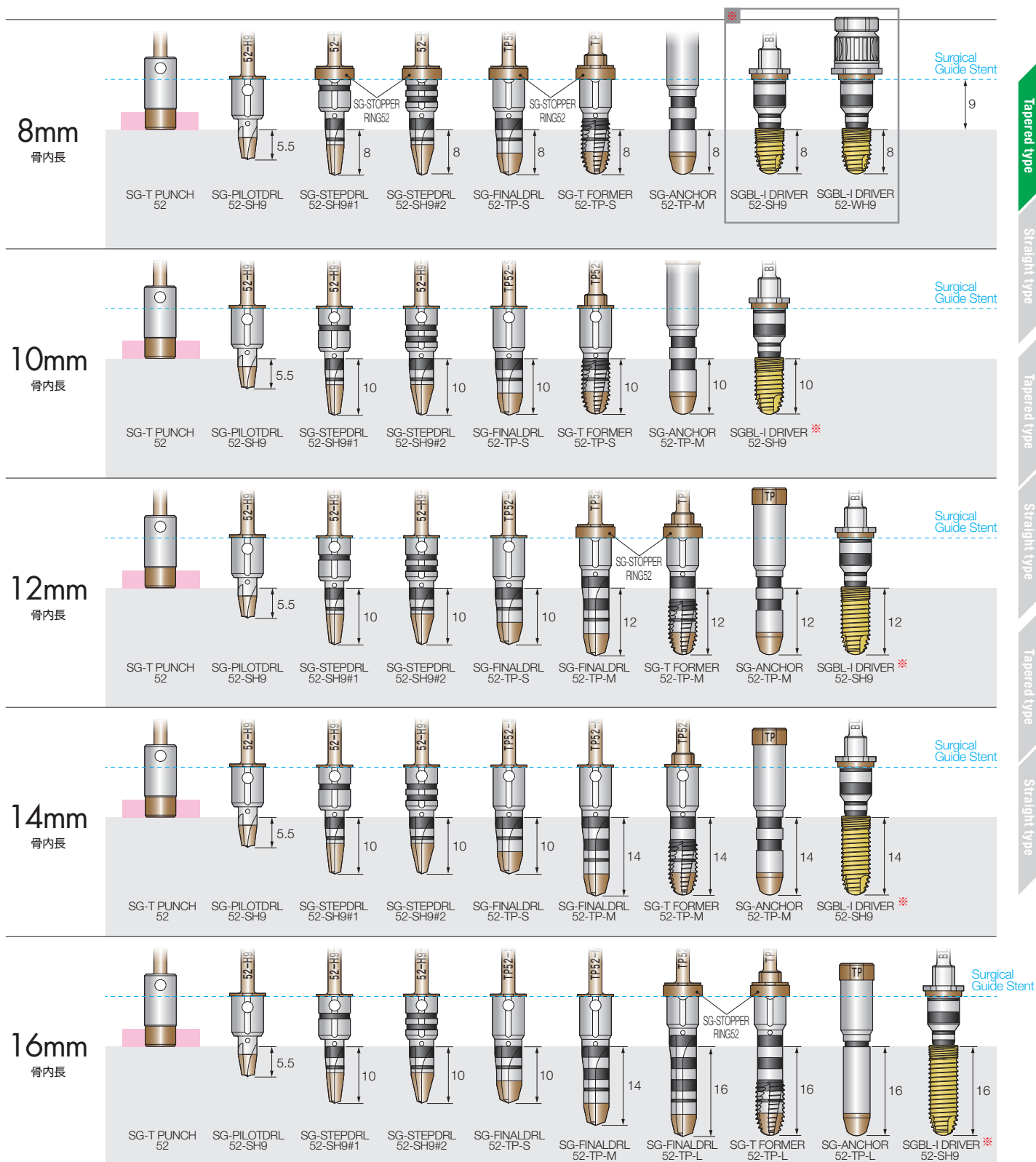

TL: Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントメーカーによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH9タイプを選択することができます。

Tapered type

Straight type

Tapered type

Straight type

Tapered type

Straight type

術式チャート

インプラントメーカーサージカルガイドシステム適用表

製品リスト

9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート


Straight type 

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


6mm

骨内長

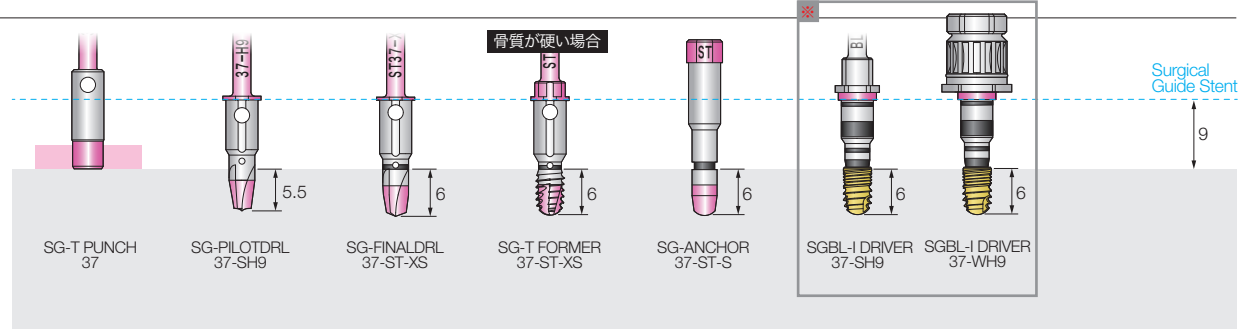


8mm

骨内長

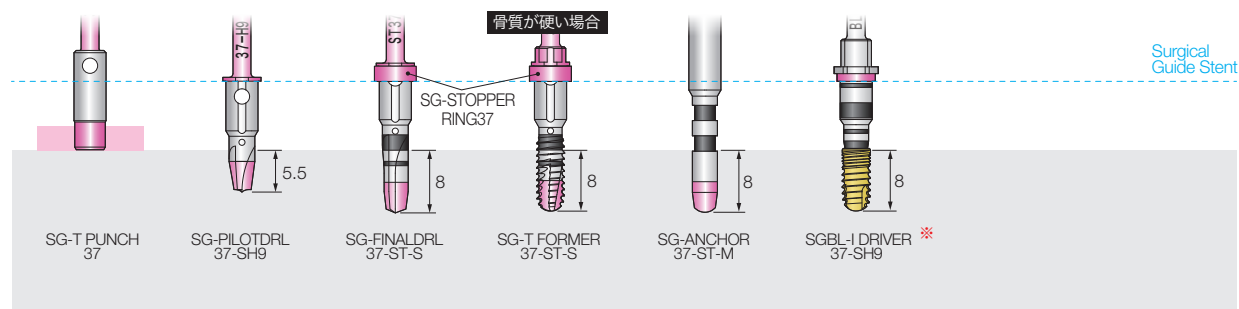


10mm

骨内長

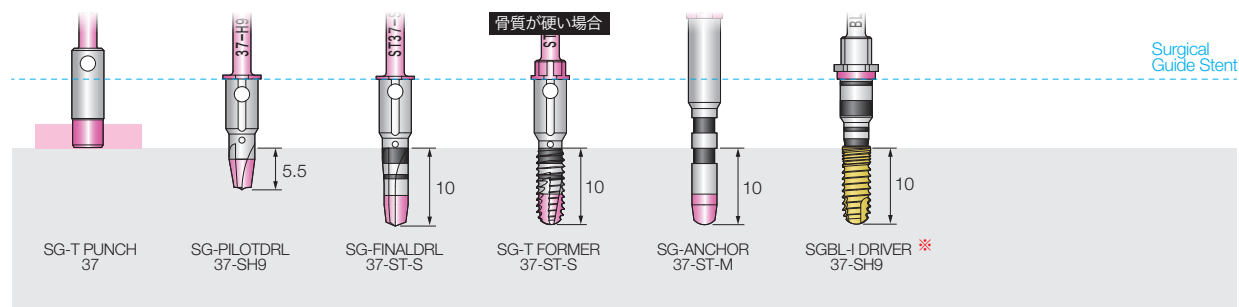


12mm

骨内長

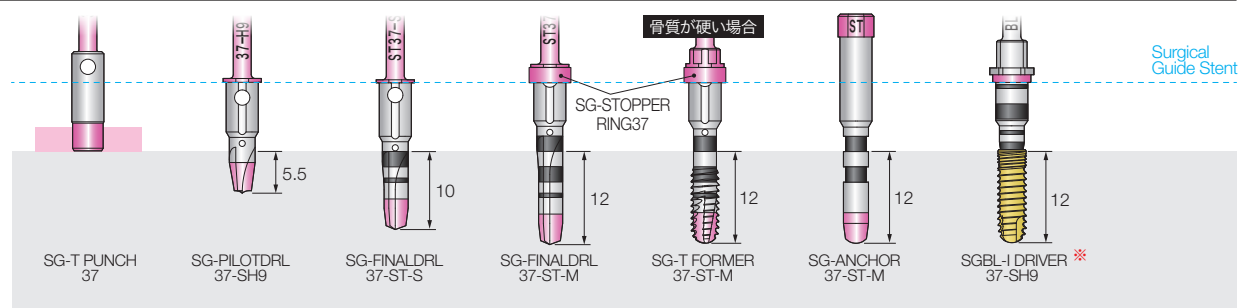


14mm

骨内長

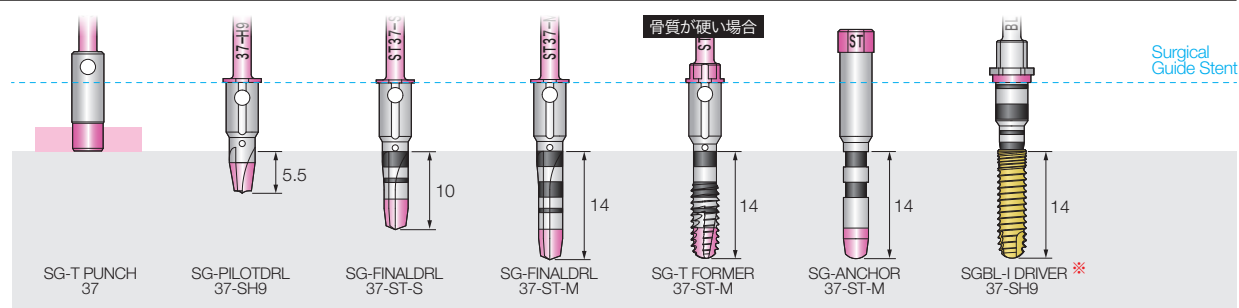

16mm

骨内長

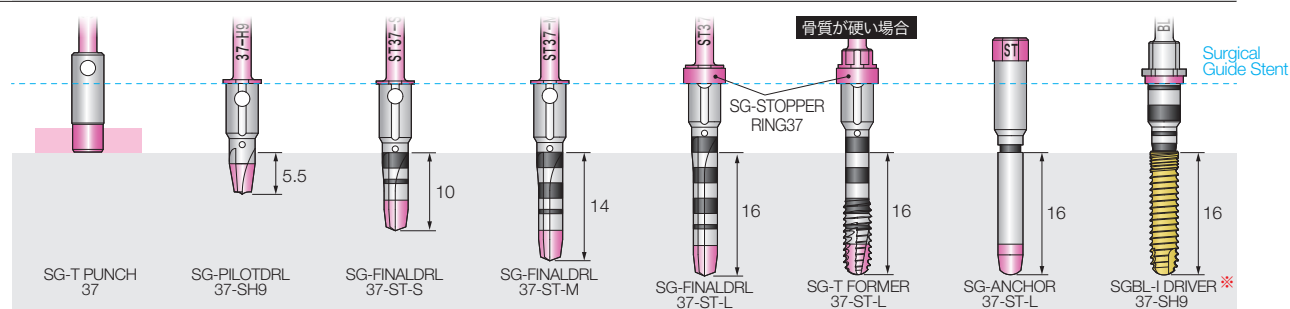


1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

* 骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH9タイプを選択することができます。

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

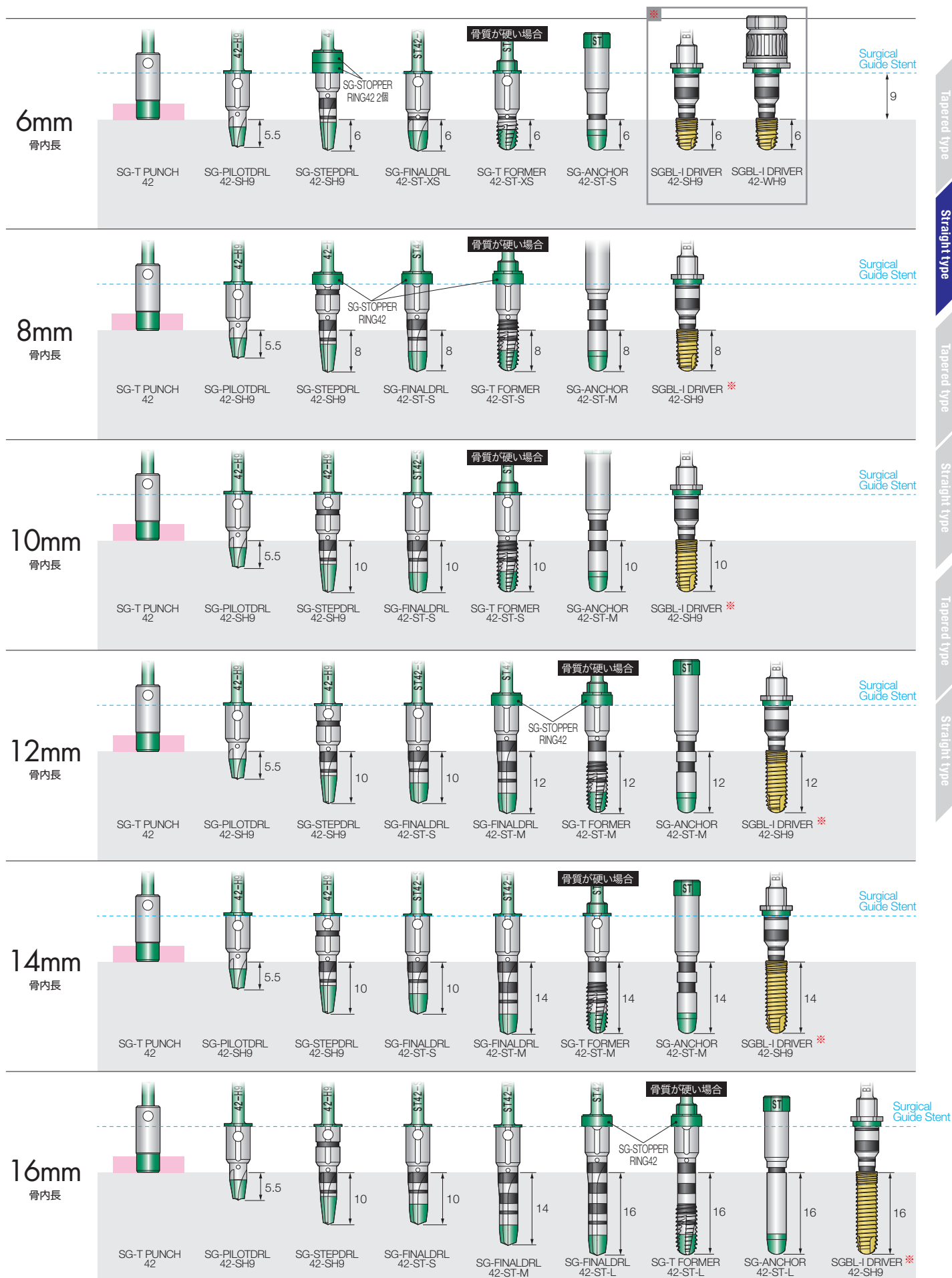

1P: 1 Piece TL: Tissue Level

単位: mm

* 骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH9タイプを選択することができます。

9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート


Straight type 

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


6mm

骨内長

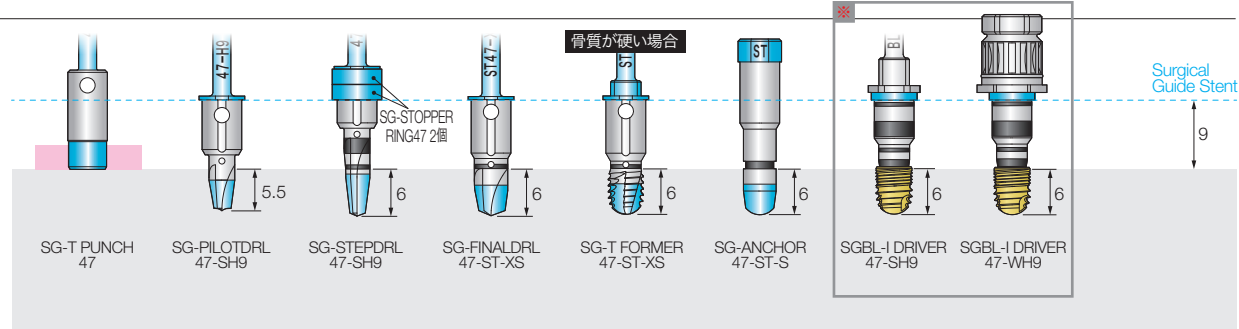


8mm

骨内長

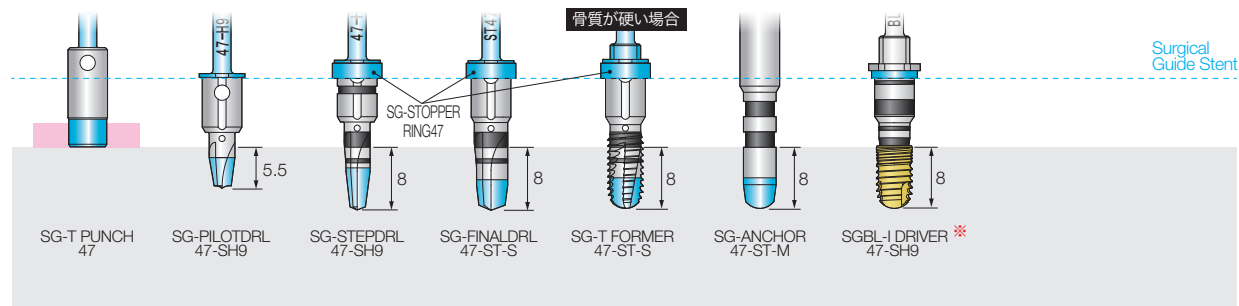


10mm

骨内長

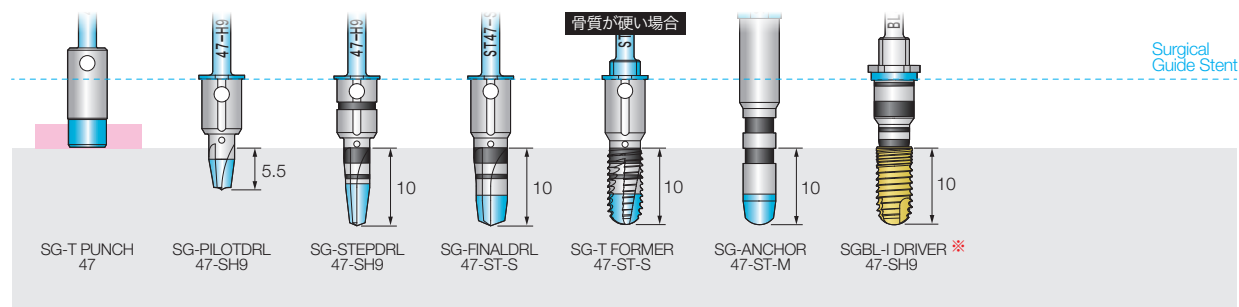


12mm

骨内長

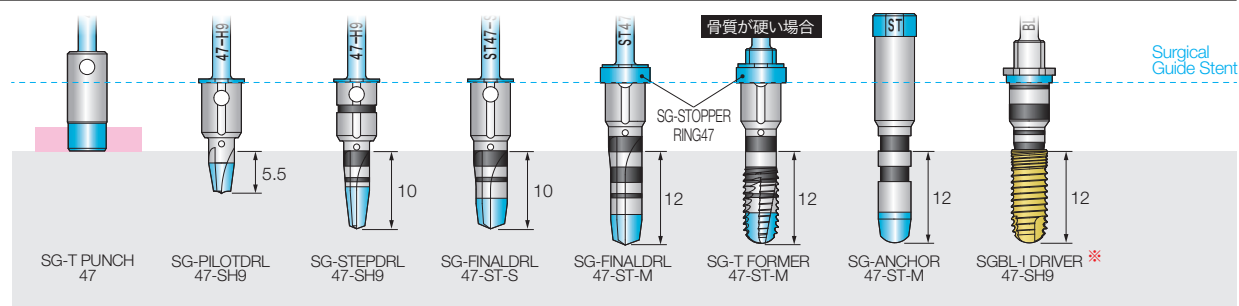


14mm

骨内長

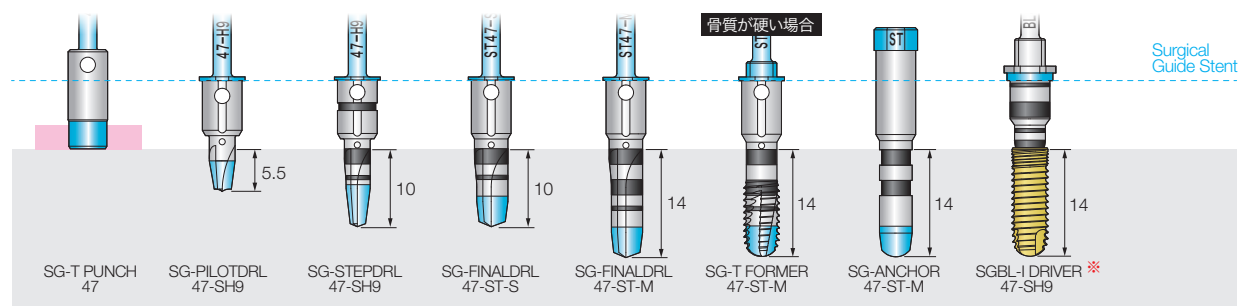

16mm

骨内長

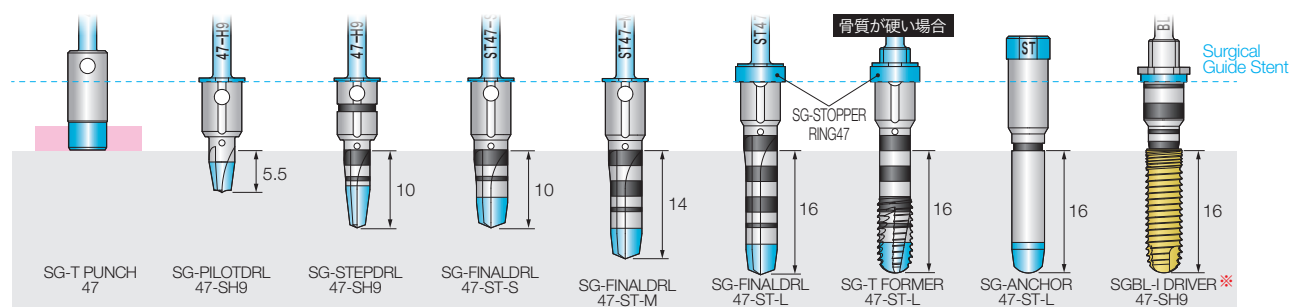


1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH9タイプを選択することができます。

インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

TLタイプはサージカルガイドシステムを外してインプラントを埋入してください。

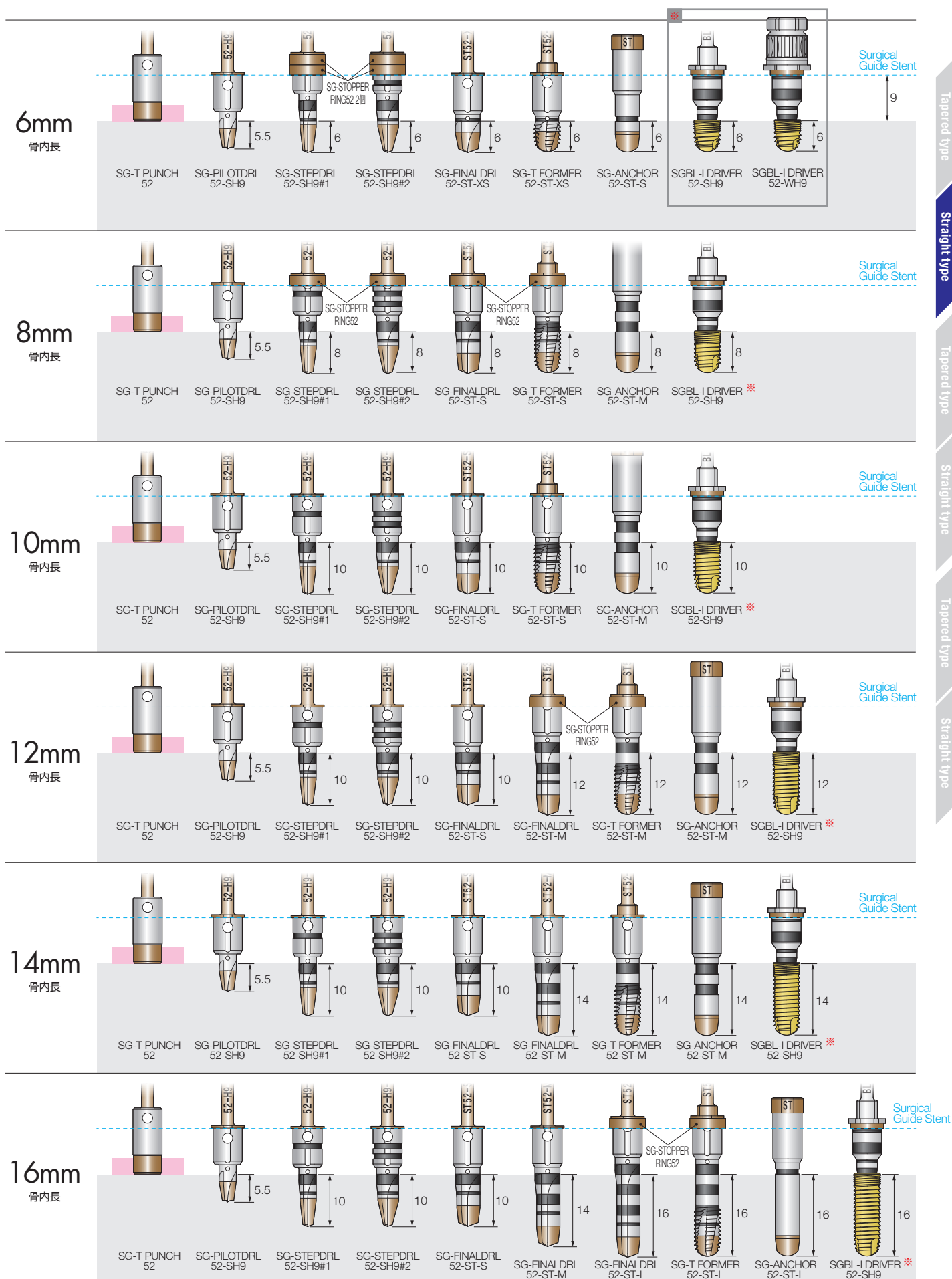

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH9タイプを選択することができます。

単位: mm

術式チャート

Straight type

Tapered type

Straight type

Tapered type

製品リスト

Straight type

製品リスト

製品リスト

製品リスト

製品リスト

製品リスト

インプラント体とサージカルガイドステント適用表 **Tapered type**

(単位:mm)

サージカルガイドステント高さ 9mm / 11mm

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
1P	骨内長							
	6							
	8	●	●	●	●	●	●	
	10	●	●	●	●	●	●	
	12	●	●	●	●	●	●	
	14	●	●	●	●	●	●	
	16							

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
BL	骨内長							
	6							
	8		●	●	●	●	●	●
	10		●	●	●	●	●	●
	12		●	●	●	●	●	●
	14		●	●	●	●	●	●
	16		●	●	●	●	●	●

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
TL	骨内長							
	6							
	8				●	●	●	●
	10				●	●	●	●
	12				●	●	●	●
	14				●	●		
	16							

サージカルガイドステント高さ 13mm

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
1P	骨内長							
	6							
	8	●	●	●	●	●	●	
	10	●	●	●	●	●	●	
	12	●	●	●	●	●	●	
	14	●	●	●	●	●	●	
	16							

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
BL	骨内長							
	6							
	8		●	●	●	●	●	●
	10		●	●	●	●	●	●
	12		●	●	●	●	●	●
	14		●	●	●	●	●	●
	16							

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
TL	骨内長							
	6							
	8				●	●	●	●
	10				●	●	●	●
	12				●	●	●	●
	14				●	●		
	16							

1P: 1Piece BL: Bone Level TL: Tissue Level

インプラント体とサージカルガイドステント適用表 **Straight type**

(単位: mm)

サージカルガイドステント高さ 9mm / 11mm

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
1P	骨内長							
	6				●	●	●	
	8				●	●	●	
	10				●	●	●	
	12				●	●	●	
	14				●	●	●	
	16							

サージカルガイドステント高さ 13mm

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
1P	骨内長							
	6				●	●	●	
	8				●	●	●	
	10				●	●	●	
	12				●	●	●	
	14				●	●	●	
	16							

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
BL	骨内長							
	6				●	●	●	●
	8				●	●	●	●
	10				●	●	●	●
	12				●	●	●	●
	14				●	●	●	●
	16				●	●	●	●

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
BL	骨内長							
	6				●	●	●	●
	8				●	●	●	●
	10				●	●	●	●
	12				●	●	●	●
	14				●	●	●	●
	16							

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
TL	骨内長							
	6				●	●	●	●
	8				●	●	●	●
	10				●	●	●	●
	12				●	●	●	●
	14				●	●		
	16							

		インプラント径						
		φ3.0	φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
TL	骨内長							
	6				●	●	●	●
	8				●	●	●	●
	10				●	●	●	●
	12				●	●	●	●
	14				●	●		
	16							

1P: 1Piece BL: Bone Level TL: Tissue Level

術式チャート

Tapered type
Straight type


インプラント体とサージカルガイドステント適用表

Tapered type
Straight type

製品リスト

Tapered type
Straight type

SGガイドチューブ

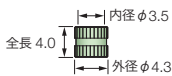インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.0		SG-GUIDE TUBE30 ※	BCDI13100
		SG-GUIDE TUBE30 (50P)	BCDI13110
φ3.2		SG-GUIDE TUBE32 ※	BCDI13101
		SG-GUIDE TUBE32 (50P)	BCDI13111
φ3.4		SG-GUIDE TUBE34 ※	BCDI13102
		SG-GUIDE TUBE34 (50P)	BCDI13112
φ3.7		SG-GUIDE TUBE37 ※	BCDI13103
		SG-GUIDE TUBE37 (50P)	BCDI13113
φ4.2		SG-GUIDE TUBE42 ※	BCDI13104
		SG-GUIDE TUBE42 (50P)	BCDI13114
φ4.7		SG-GUIDE TUBE47 ※	BCDI13105
		SG-GUIDE TUBE47 (50P)	BCDI13115
φ5.2		SG-GUIDE TUBE52 ※	BCDI13106
		SG-GUIDE TUBE52 (50P)	BCDI13116

※2個入り

SGストッパーリング

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.0		SG-STOPPER RING30	BCDI13120
φ3.2		SG-STOPPER RING32	BCDI13121
φ3.4		SG-STOPPER RING34	BCDI13122
φ3.7		SG-STOPPER RING37	BCDI13123
φ4.2		SG-STOPPER RING42	BCDI13124
φ4.7		SG-STOPPER RING47	BCDI13125
φ5.2		SG-STOPPER RING52	BCDI13126

SGティッシュパンチ

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.0		SG-T PUNCH30	BCDI13130
φ3.2		SG-T PUNCH32	BCDI13131
φ3.4		SG-T PUNCH34	BCDI13132
φ3.7		SG-T PUNCH37	BCDI13133
φ4.2		SG-T PUNCH42	BCDI13134
φ4.7		SG-T PUNCH47	BCDI13135
φ5.2		SG-T PUNCH52	BCDI13136

SGパイロットドリル

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.0		SG-PILOTDRILL30-SH9	BCDI13150
		SG-PILOTDRILL30-SH11	BCDI13151 ※
		SG-PILOTDRILL30-SH13	BCDI13152 ※
φ3.2		SG-PILOTDRILL32-SH9	BCDI13153
		SG-PILOTDRILL32-SH11	BCDI13154 ※
		SG-PILOTDRILL32-SH13	BCDI13155 ※
φ3.4		SG-PILOTDRILL34-SH9	BCDI13156
		SG-PILOTDRILL34-SH11	BCDI13157 ※
		SG-PILOTDRILL34-SH13	BCDI13158 ※
φ3.7		SG-PILOTDRILL37-SH9	BCDI13159
		SG-PILOTDRILL37-SH11	BCDI13160 ※
		SG-PILOTDRILL37-SH13	BCDI13161 ※
φ4.2		SG-PILOTDRILL42-SH9	BCDI13162
		SG-PILOTDRILL42-SH11	BCDI13163 ※
		SG-PILOTDRILL42-SH13	BCDI13164 ※
φ4.7		SG-PILOTDRILL47-SH9	BCDI13165
		SG-PILOTDRILL47-SH11	BCDI13166 ※
		SG-PILOTDRILL47-SH13	BCDI13167 ※
φ5.2		SG-PILOTDRILL52-SH9	BCDI13168
		SG-PILOTDRILL52-SH11	BCDI13169 ※
		SG-PILOTDRILL52-SH13	BCDI13170 ※

※受注生産品






SGステップドリル

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ4.2		SG-STEPPDRL42-SH9	BCDI13180
		SG-STEPPDRL42-SH11	BCDI13181 ※
		SG-STEPPDRL42-SH13	BCDI13182 ※
φ4.7		SG-STEPPDRL47-SH9	BCDI13183
		SG-STEPPDRL47-SH11	BCDI13184 ※
		SG-STEPPDRL47-SH13	BCDI13185 ※
φ5.2 (#1)		SG-STEPPDRL52-SH9#1	BCDI13186
		SG-STEPPDRL52-SH11#1	BCDI13187 ※
		SG-STEPPDRL52-SH13#1	BCDI13188 ※
φ5.2 (#2)		SG-STEPPDRL52-SH9#2	BCDI13189
		SG-STEPPDRL52-SH11#2	BCDI13190 ※
		SG-STEPPDRL52-SH13#2	BCDI13191 ※

※受注生産品












SGファイナルドリルTP

Tapered type 

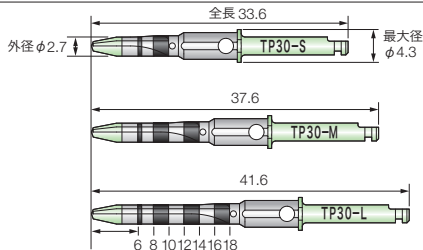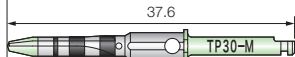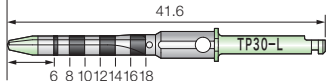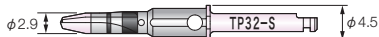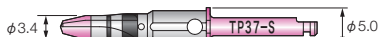インプラント径 (単位: mm)	寸法・形状 (単位: mm)	商品名	商品コード
φ3.0		SG-FINALDRL30-TP-S	BCDI13200
		SG-FINALDRL30-TP-M	BCDI13201
		SG-FINALDRL30-TP-L	BCDI13202
φ3.2		SG-FINALDRL32-TP-S	BCDI13203
		SG-FINALDRL32-TP-M	BCDI13204
		SG-FINALDRL32-TP-L	BCDI13205
φ3.4		SG-FINALDRL34-TP-S	BCDI13206
		SG-FINALDRL34-TP-M	BCDI13207
		SG-FINALDRL34-TP-L	BCDI13208
φ3.7		SG-FINALDRL37-TP-S	BCDI13209
		SG-FINALDRL37-TP-M	BCDI13210
		SG-FINALDRL37-TP-L	BCDI13211
φ4.2		SG-FINALDRL42-TP-S	BCDI13212
		SG-FINALDRL42-TP-M	BCDI13213
		SG-FINALDRL42-TP-L	BCDI13214
φ4.7		SG-FINALDRL47-TP-S	BCDI13215
		SG-FINALDRL47-TP-M	BCDI13216
		SG-FINALDRL47-TP-L	BCDI13217
φ5.2		SG-FINALDRL52-TP-S	BCDI13218
		SG-FINALDRL52-TP-M	BCDI13219
		SG-FINALDRL52-TP-L	BCDI13220

SGファイナルドリルST

Straight type 

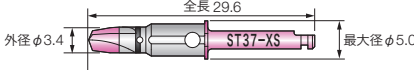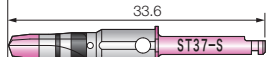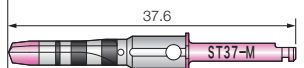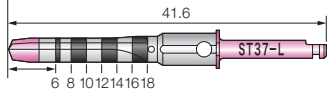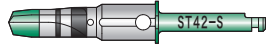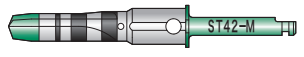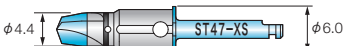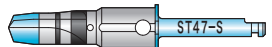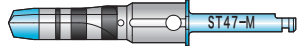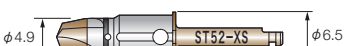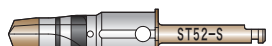インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.7		SG-FINALDRL37-ST-XS	BCDI13230
		SG-FINALDRL37-ST-S	BCDI13231
		SG-FINALDRL37-ST-M	BCDI13232
		SG-FINALDRL37-ST-L	BCDI13233
φ4.2		SG-FINALDRL42-ST-XS	BCDI13234
		SG-FINALDRL42-ST-S	BCDI13235
		SG-FINALDRL42-ST-M	BCDI13236
		SG-FINALDRL42-ST-L	BCDI13237
φ4.7		SG-FINALDRL47-ST-XS	BCDI13238
		SG-FINALDRL47-ST-S	BCDI13239
		SG-FINALDRL47-ST-M	BCDI13240
		SG-FINALDRL47-ST-L	BCDI13241
φ5.2		SG-FINALDRL52-ST-XS	BCDI13242
		SG-FINALDRL52-ST-S	BCDI13243
		SG-FINALDRL52-ST-M	BCDI13244
		SG-FINALDRL52-ST-L	BCDI13245

術式チャート

Tapered type

Straight type

Tapered type

Straight type

Tapered type










Straight type

インプラント径ごとのドリル径の目安表

製品リスト











SGタップフォーマーTP

Tapered type 

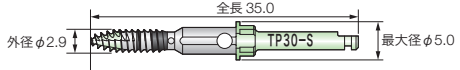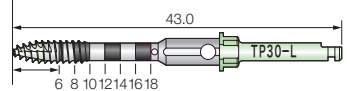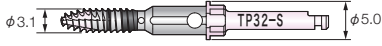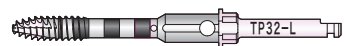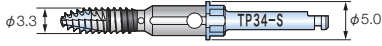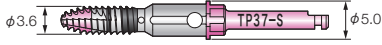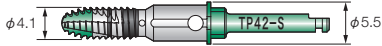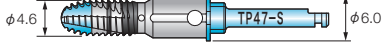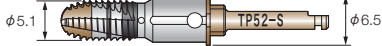インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.0		SG-T FORMER30-TP-S	BCDI13250
		SG-T FORMER30-TP-M	BCDI13251
		SG-T FORMER30-TP-L	BCDI13252
φ3.2		SG-T FORMER32-TP-S	BCDI13253
		SG-T FORMER32-TP-M	BCDI13254
		SG-T FORMER32-TP-L	BCDI13255
φ3.4		SG-T FORMER34-TP-S	BCDI13256
		SG-T FORMER34-TP-M	BCDI13257
		SG-T FORMER34-TP-L	BCDI13258
φ3.7		SG-T FORMER37-TP-S	BCDI13259
		SG-T FORMER37-TP-M	BCDI13260
		SG-T FORMER37-TP-L	BCDI13261
φ4.2		SG-T FORMER42-TP-S	BCDI13262
		SG-T FORMER42-TP-M	BCDI13263
		SG-T FORMER42-TP-L	BCDI13264
φ4.7		SG-T FORMER47-TP-S	BCDI13265
		SG-T FORMER47-TP-M	BCDI13266
		SG-T FORMER47-TP-L	BCDI13267
φ5.2		SG-T FORMER52-TP-S	BCDI13268
		SG-T FORMER52-TP-M	BCDI13269
		SG-T FORMER52-TP-L	BCDI13270

SGタップフォーマーST

Straight type 

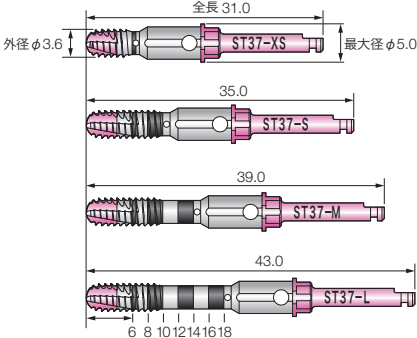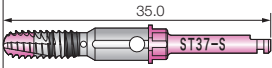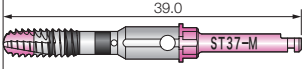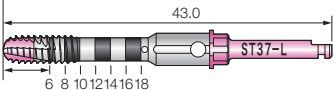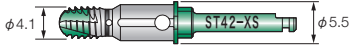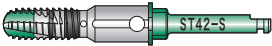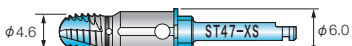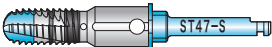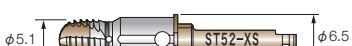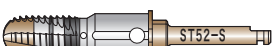インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
$\phi 3.7$		SG-T FORMER37-ST-XS	BCDI13280
		SG-T FORMER37-ST-S	BCDI13281
		SG-T FORMER37-ST-M	BCDI13282
		SG-T FORMER37-ST-L	BCDI13283
$\phi 4.2$		SG-T FORMER42-ST-XS	BCDI13284
		SG-T FORMER42-ST-S	BCDI13285
		SG-T FORMER42-ST-M	BCDI13286
		SG-T FORMER42-ST-L	BCDI13287
$\phi 4.7$		SG-T FORMER47-ST-XS	BCDI13288
		SG-T FORMER47-ST-S	BCDI13289
		SG-T FORMER47-ST-M	BCDI13290
		SG-T FORMER47-ST-L	BCDI13291
$\phi 5.2$		SG-T FORMER52-ST-XS	BCDI13292
		SG-T FORMER52-ST-S	BCDI13293
		SG-T FORMER52-ST-M	BCDI13294
		SG-T FORMER52-ST-L	BCDI13295

Tapered type
Straight type

Tapered type
Straight type

Tapered type
Straight type

Tapered type
Straight type



術式チャート

インプラント体サイズ別ガイド/インスリン適用表

製品リスト




SGガイドアンカーTP

Tapered type 

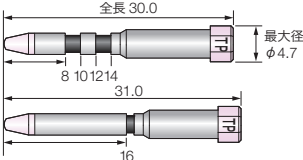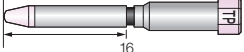インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.0		SG-ANCHOR30-TP-M	BCDI13300
φ3.2		SG-ANCHOR32-TP-M	BCDI13302
		SG-ANCHOR32-TP-L	BCDI13303
φ3.4		SG-ANCHOR34-TP-M	BCDI13304
		SG-ANCHOR34-TP-L	BCDI13305
φ3.7		SG-ANCHOR37-TP-M	BCDI13306
		SG-ANCHOR37-TP-L	BCDI13307
φ4.2		SG-ANCHOR42-TP-M	BCDI13308
		SG-ANCHOR42-TP-L	BCDI13309
φ4.7		SG-ANCHOR47-TP-M	BCDI13310
		SG-ANCHOR47-TP-L	BCDI13311
φ5.2		SG-ANCHOR52-TP-M	BCDI13312
		SG-ANCHOR52-TP-L	BCDI13313

SGガイドアンカーST

Straight type 

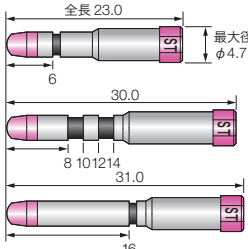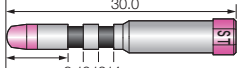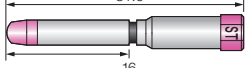インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.7		SG-ANCHOR37-ST-S	BCDI13320
		SG-ANCHOR37-ST-M	BCDI13321
		SG-ANCHOR37-ST-L	BCDI13322
φ4.2		SG-ANCHOR42-ST-S	BCDI13323
		SG-ANCHOR42-ST-M	BCDI13324
		SG-ANCHOR42-ST-L	BCDI13325
φ4.7		SG-ANCHOR47-ST-S	BCDI13326
		SG-ANCHOR47-ST-M	BCDI13327
		SG-ANCHOR47-ST-L	BCDI13328
φ5.2		SG-ANCHOR52-ST-S	BCDI13329
		SG-ANCHOR52-ST-M	BCDI13330
		SG-ANCHOR52-ST-L	BCDI13331

Tapered type

Straight type

Tapered type

Straight type

Tapered type












Straight type

術式チャート

インプラント体とサージカルガイドの互換性表

製品リスト

SG BLインプラントドライバー

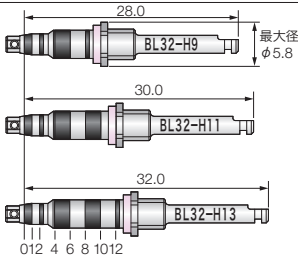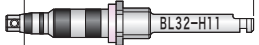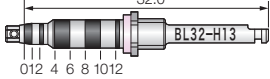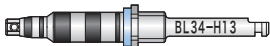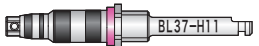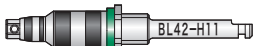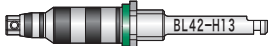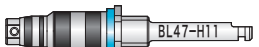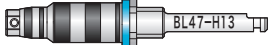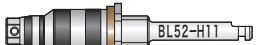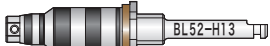インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2		SGBL-I DRIVER32-SH9	BCDI13340
		SGBL-I DRIVER32-SH11	BCDI13341 ※
		SGBL-I DRIVER32-SH13	BCDI13342 ※
φ3.4		SGBL-I DRIVER34-SH9	BCDI13343
		SGBL-I DRIVER34-SH11	BCDI13344 ※
		SGBL-I DRIVER34-SH13	BCDI13345 ※
φ3.7		SGBL-I DRIVER37-SH9	BCDI13346
		SGBL-I DRIVER37-SH11	BCDI13347 ※
		SGBL-I DRIVER37-SH13	BCDI13348 ※
φ4.2		SGBL-I DRIVER42-SH9	BCDI13349
		SGBL-I DRIVER42-SH11	BCDI13350 ※
		SGBL-I DRIVER42-SH13	BCDI13351 ※
φ4.7		SGBL-I DRIVER47-SH9	BCDI13352
		SGBL-I DRIVER47-SH11	BCDI13353 ※
		SGBL-I DRIVER47-SH13	BCDI13354 ※
φ5.2		SGBL-I DRIVER52-SH9	BCDI13355
		SGBL-I DRIVER52-SH11	BCDI13356 ※
		SGBL-I DRIVER52-SH13	BCDI13357 ※

※受注生産品

SG BLインプラントドライバー-WH

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2		SGBL-I DRIVER32-WH9	BCDI13411
		SGBL-I DRIVER32-WH11	BCDI13412
		SGBL-I DRIVER32-WH13	BCDI13413
φ3.4		SGBL-I DRIVER34-WH9	BCDI13414
		SGBL-I DRIVER34-WH11	BCDI13415
		SGBL-I DRIVER34-WH13	BCDI13416
φ3.7		SGBL-I DRIVER37-WH9	BCDI13417
		SGBL-I DRIVER37-WH11	BCDI13418
		SGBL-I DRIVER37-WH13	BCDI13419
φ4.2		SGBL-I DRIVER42-WH9	BCDI13420
		SGBL-I DRIVER42-WH11	BCDI13421
		SGBL-I DRIVER42-WH13	BCDI13422
φ4.7		SGBL-I DRIVER47-WH9	BCDI13423
		SGBL-I DRIVER47-WH11	BCDI13424
		SGBL-I DRIVER47-WH13	BCDI13425
φ5.2		SGBL-I DRIVER52-WH9	BCDI13426
		SGBL-I DRIVER52-WH11	BCDI13427
		SGBL-I DRIVER52-WH13	BCDI13428

Tapered type

Straight type

Tapered type

Straight type

Tapered type

Straight type

術式チャート

インプラント体とサージカルガイドシステム運用表

製品リスト

ケース関連


	商品名	商品コード
	TITANIUM TRAY	BCDI13400
	F-SG-SURGICAL CASE	BCDI13390



TITANIUM TRAY



F-SG-SURGICAL CASE

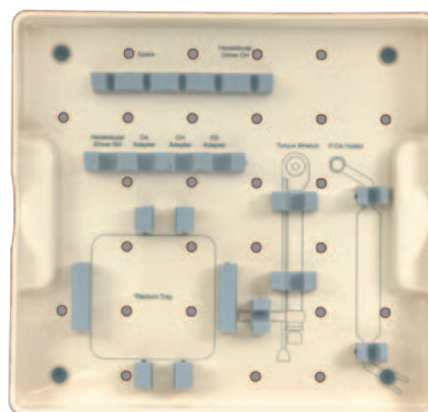

NOTES

NOTES

NOTES



京セラ株式会社

メディカル事業部 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

本 社 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地 〒612-8501
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 I・Sビル 〒140-8810
Tel:03-5782-7018 Fax:03-5782-8518

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

名古屋営業所 名古屋市東区葵3丁目15-31(住友生命千種ニュータワービル6F) 〒461-0004
Tel:052-930-1480 Fax:052-938-1388

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト7F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.finesia.world

FINESIA サージカルガイドシステム器具【医療機器届出番号：26B1X10012101123】

「FINESIA」「インプランター」は、京セラ株式会社の登録商標です。

当カタログに記載の情報は2020年6月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。