

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート

Tissue Level


Relios

Straight type



術式チャートの見方

(例) サージカルガイドステント高さ9mm、インプラント径φ4.2mm、骨内長6mm、Straight typeの場合

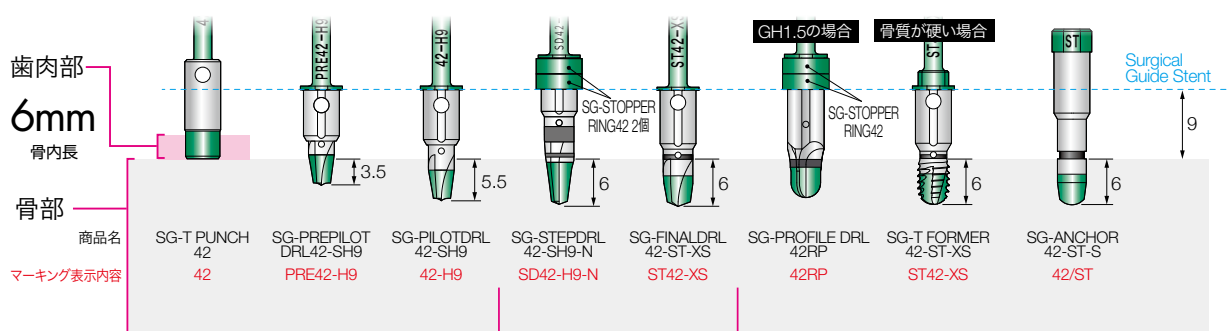

SGステップドリル、SGファイナルドリルSTの
記載寸法は、ドリルに対応するインプラント長です。

- ・インプラント体カラー高さGH1.5ではSGプロファイルドリルが必要です。
- ・インプラント体埋入はサージカルガイドステントを外して行います

ドリル先端仕様



SGステップドリル、SGファイナルドリルSTのドリルの刃長は、インプラント体よりも下記のように長く設定されています。

SGステップドリル

SGファイナルドリルST

φ4.2mm **φ4.7mm** ➡ 0.2mm長い

φ3.7mm φ4.2mm φ4.7mm ➡ 0.2mm長い

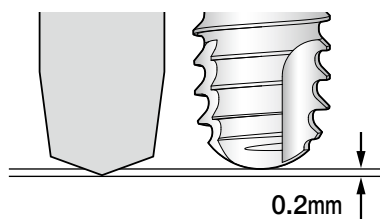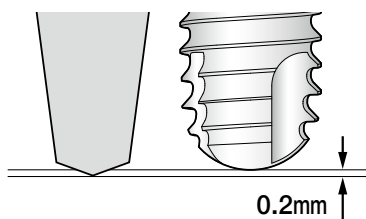

サージカルガイドシステム高さ 9mm

FINESIA®

Relios


Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート


インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

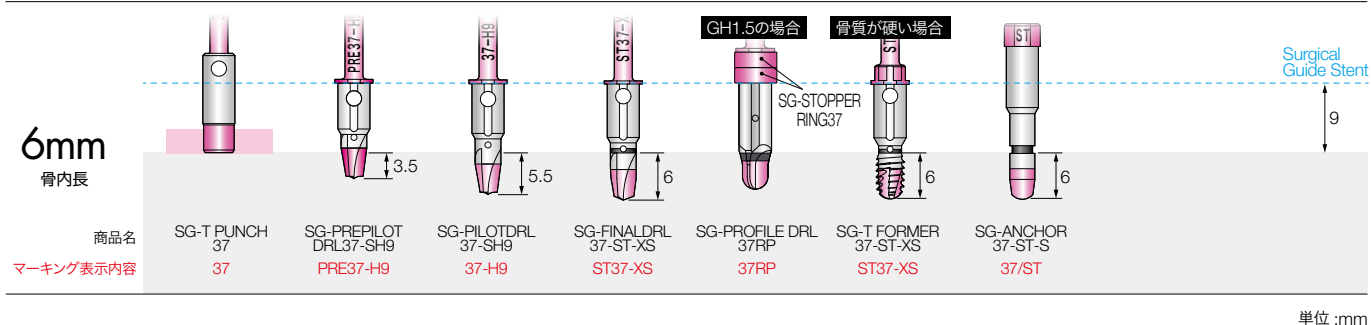


インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

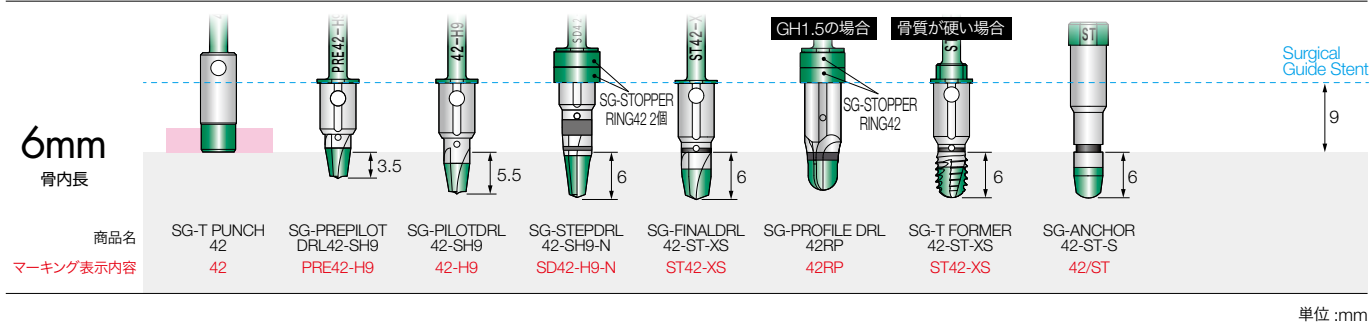

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

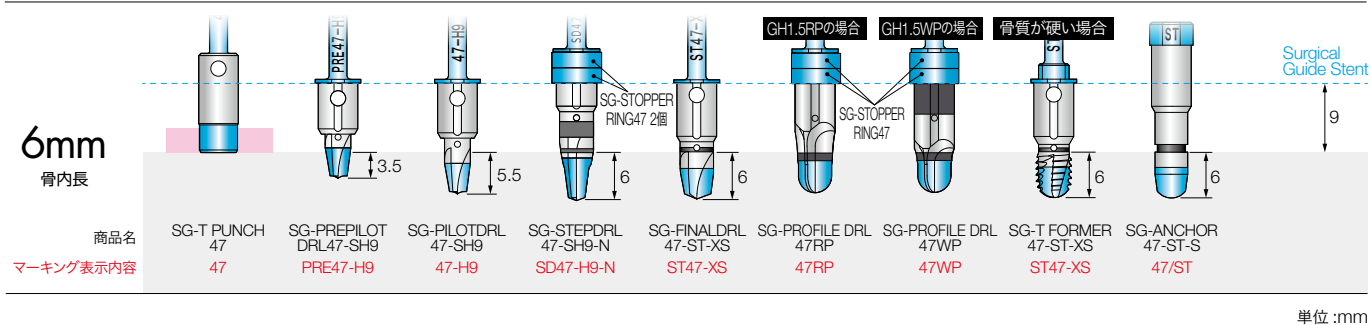

サージカルガイドステント高さ **11 mm**

FINESIA®

Relios


Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$


サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

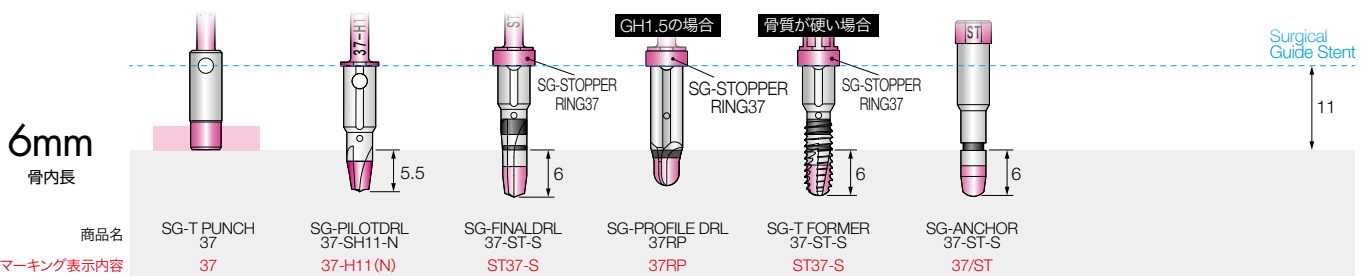

単位 :mm

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$


サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

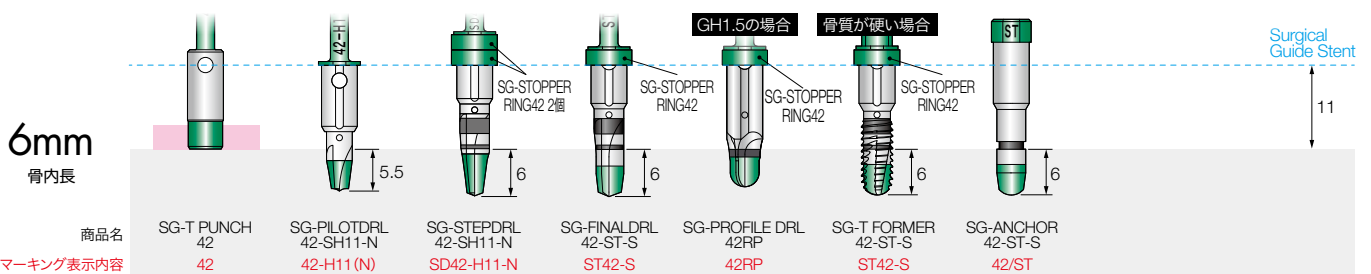

単位 :mm

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

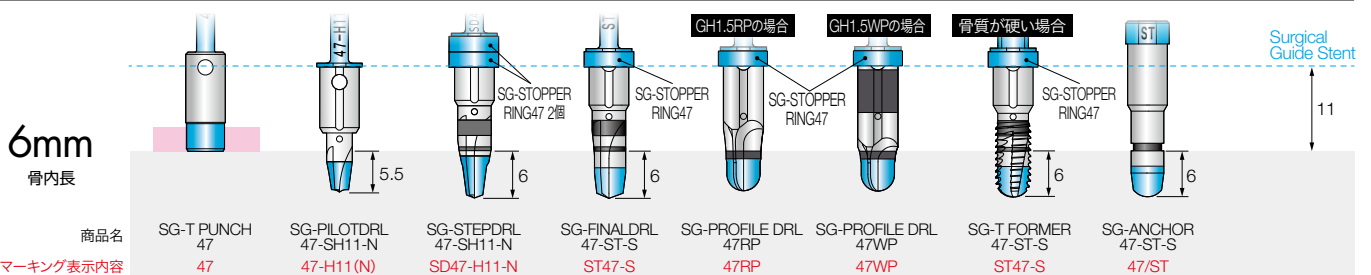

単位 :mm

サージカルガイドステント高さ **13mm**

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート


13mm
サージカルガイドシステム高さ

FINESIA Surgical Guide System
Relios 術式チャート

Straight type 


インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

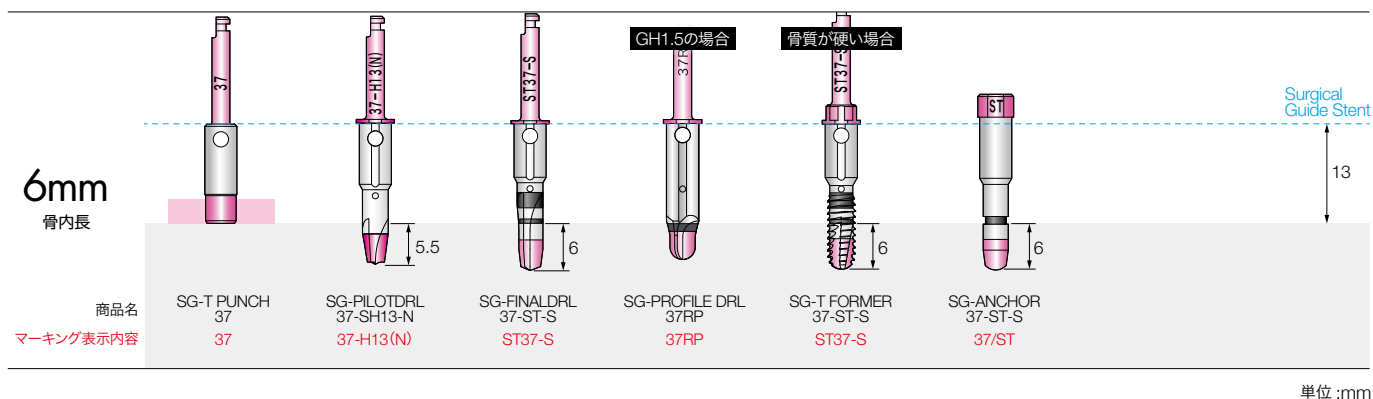


インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

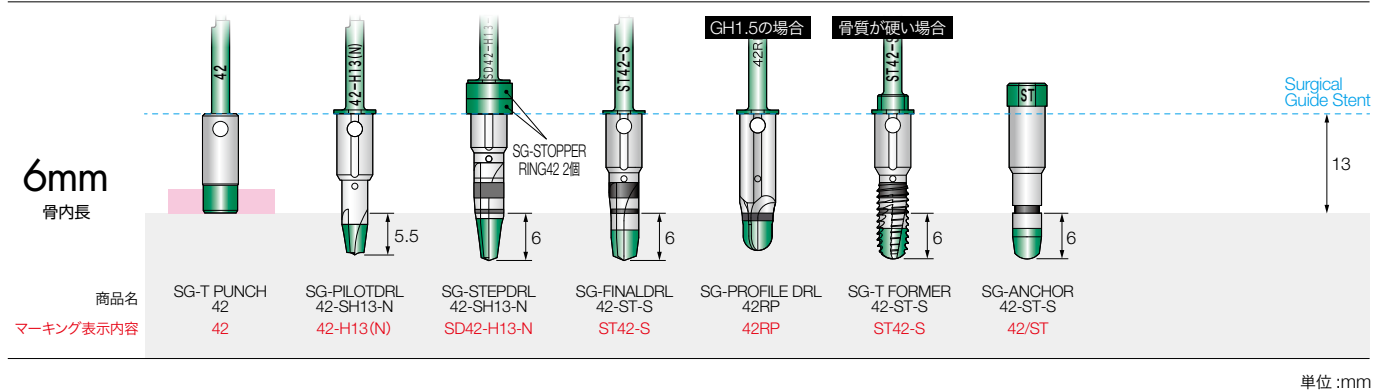

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

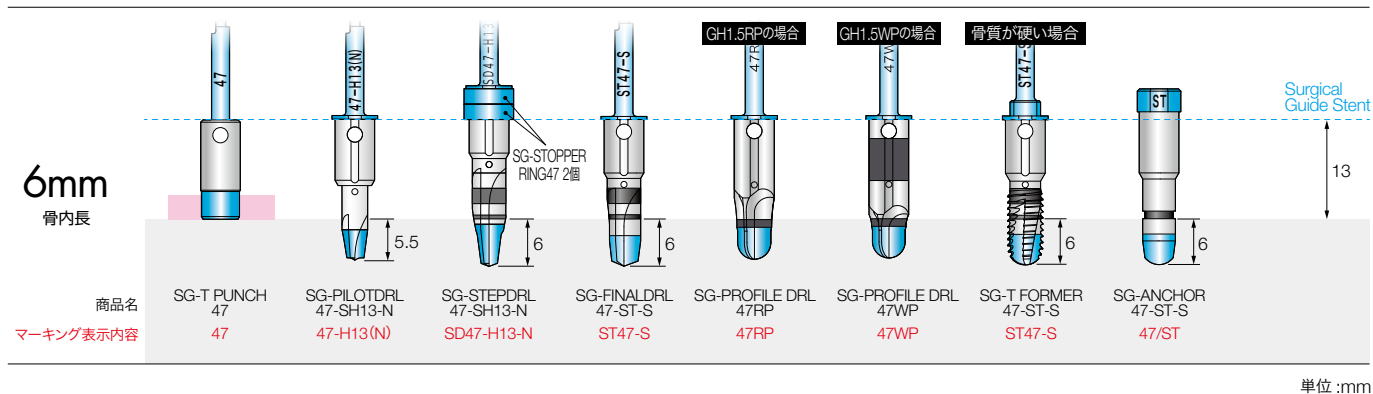

本マニュアルに記載されている製品は、下記の医療機器承認／届出番号を取得しています。

販売名	分類	一般的名称	承認 / 届出番号	クラス分類
FINESIA TLフィクスチャー BE	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	30500BZX00286000	Ⅲ
FINESIAサージカルガイドシステム器具	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	26B1X10012101123	I

製造販売元：京セラ株式会社

京セラ株式会社

メディカル事業部 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

本 社 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地 〒612-8501
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

東京事業所 東京都港区三田三丁目5番19号(住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-8316
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560

大阪事業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel: 06-7178-1898 Fax: 06-6350-8157

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel: 011-555-3288 Fax: 011-281-6525

名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京事業所となります。

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel: 086-803-3625 Fax: 026-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト6F) 〒812-0013
Tel: 092-452-8148 Fax: 090-452-8177



www.finesia.world

「FINESIA」「Relios」は、京セラ株式会社の登録商標です。
当術式チャートに記載の情報は2024年6月時点のものです。