

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type



術式チャート

Tissue Level


FINESIA® Surgical Guide System

Relios

Tapered type

術式チャートの見方

(例) サージカルガイドステント高さ9mm、インプラント径φ4.2mm、骨内長8mm、Tapered typeの場合

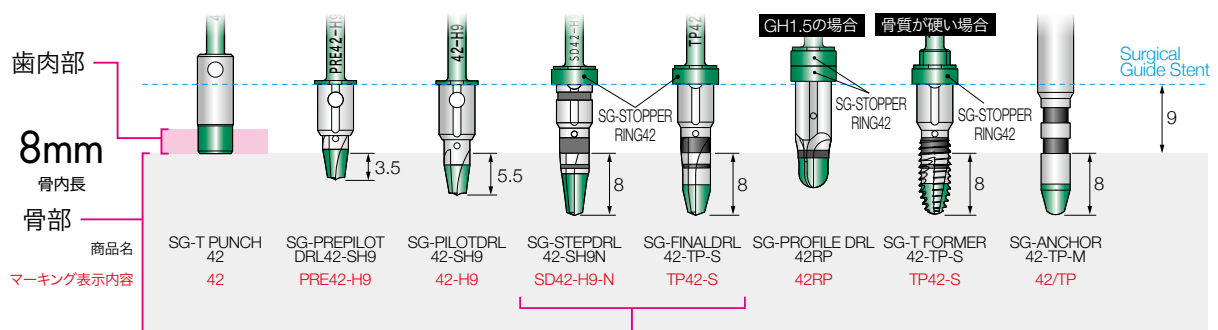

SGステップドリル、SGファイナルドリルTPの記載寸法は、ドリルに対応するインプラント長です。


・インプラント体カラー高さGH1.5ではSGプロファイルドリルが必要です。
・インプラント体埋入はサージカルガイドステントを外して行います。

ドリル先端仕様

SGステップドリル、SGファイナルドリルTPのドリルの刃長は、インプラント体よりも下記のように長く設定されています。

SGステップドリル


φ4.2mm φ4.7mm → 0.2mm長い

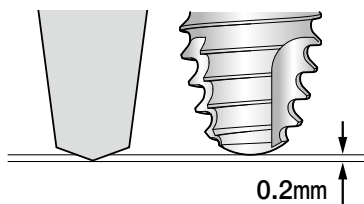

SGファイナルドリルTP

φ3.7mm → 0.1mm長い

φ4.2mm φ4.7mm → 0.2mm長い

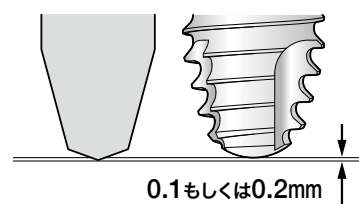

サージカルガイドシステム高さ 9mm

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart


Tapered type



術式チャート


インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

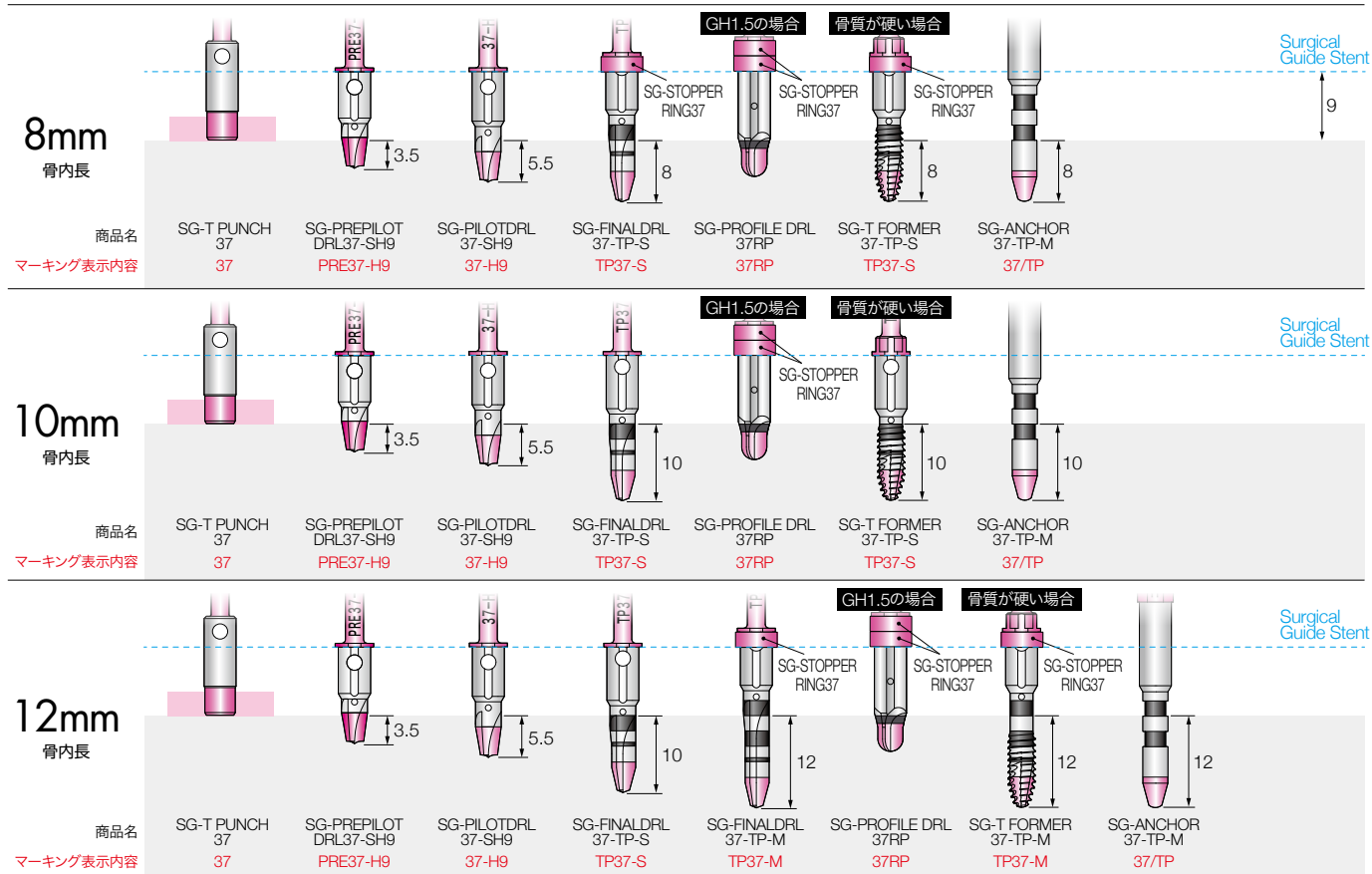


インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

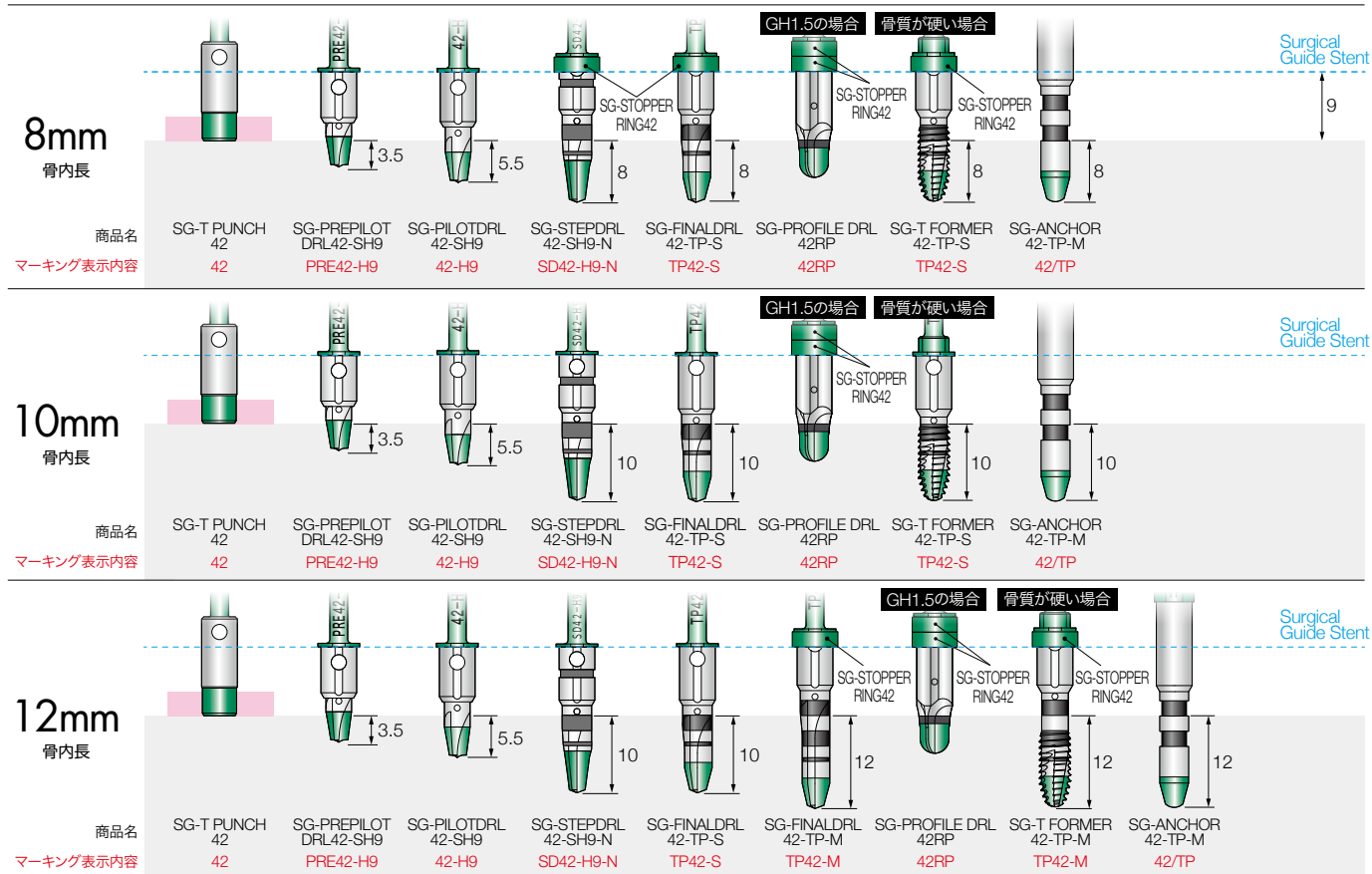

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

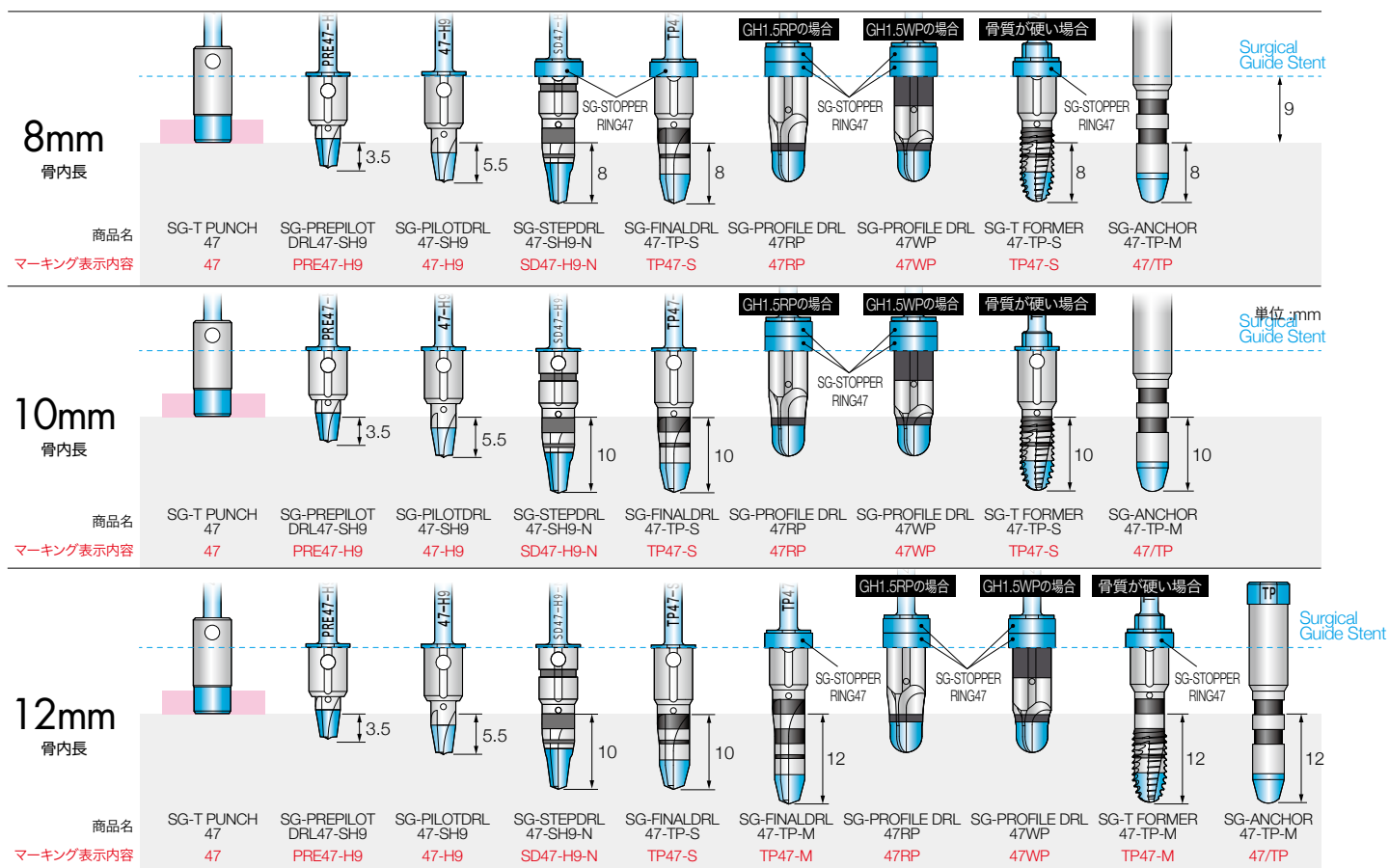

単位 : mm

サージカルガイドステント高さ **11 mm**

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type



術式チャート

11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA Surgical Guide System

Relios 術式チャート

Tapered type 


インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm

骨内長

商品名
マーキング表示内容

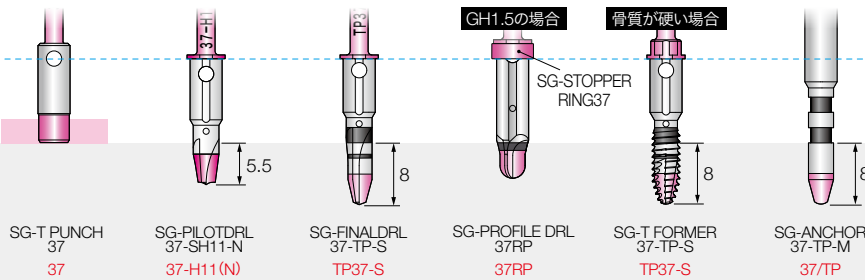


Surgical Guide Stent

11

10mm

骨内長

商品名
マーキング表示内容

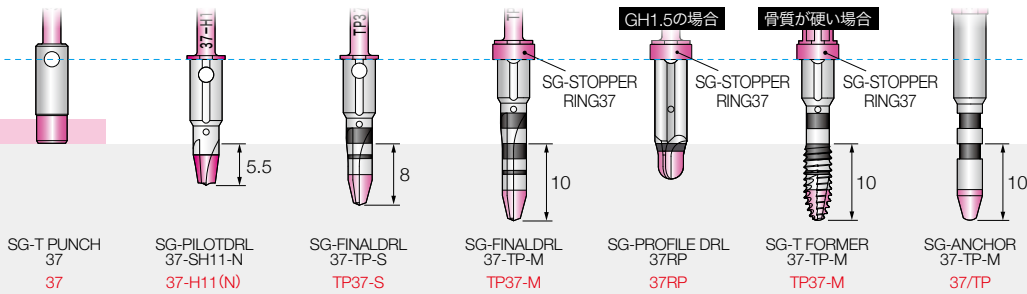


Surgical Guide Stent

12mm

骨内長

商品名
マーキング表示内容

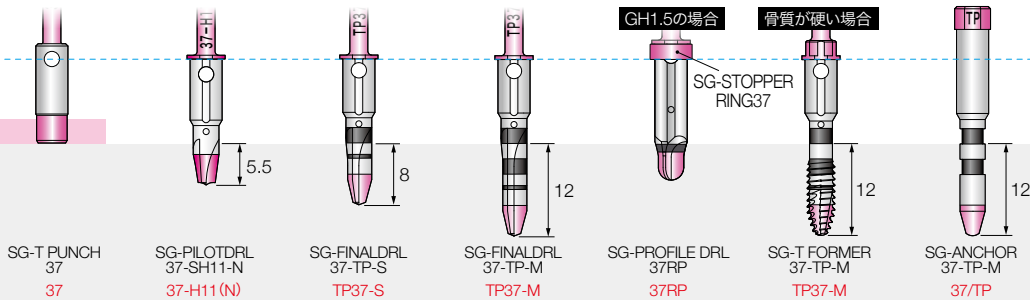


Surgical Guide Stent

単位 :mm

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$


サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

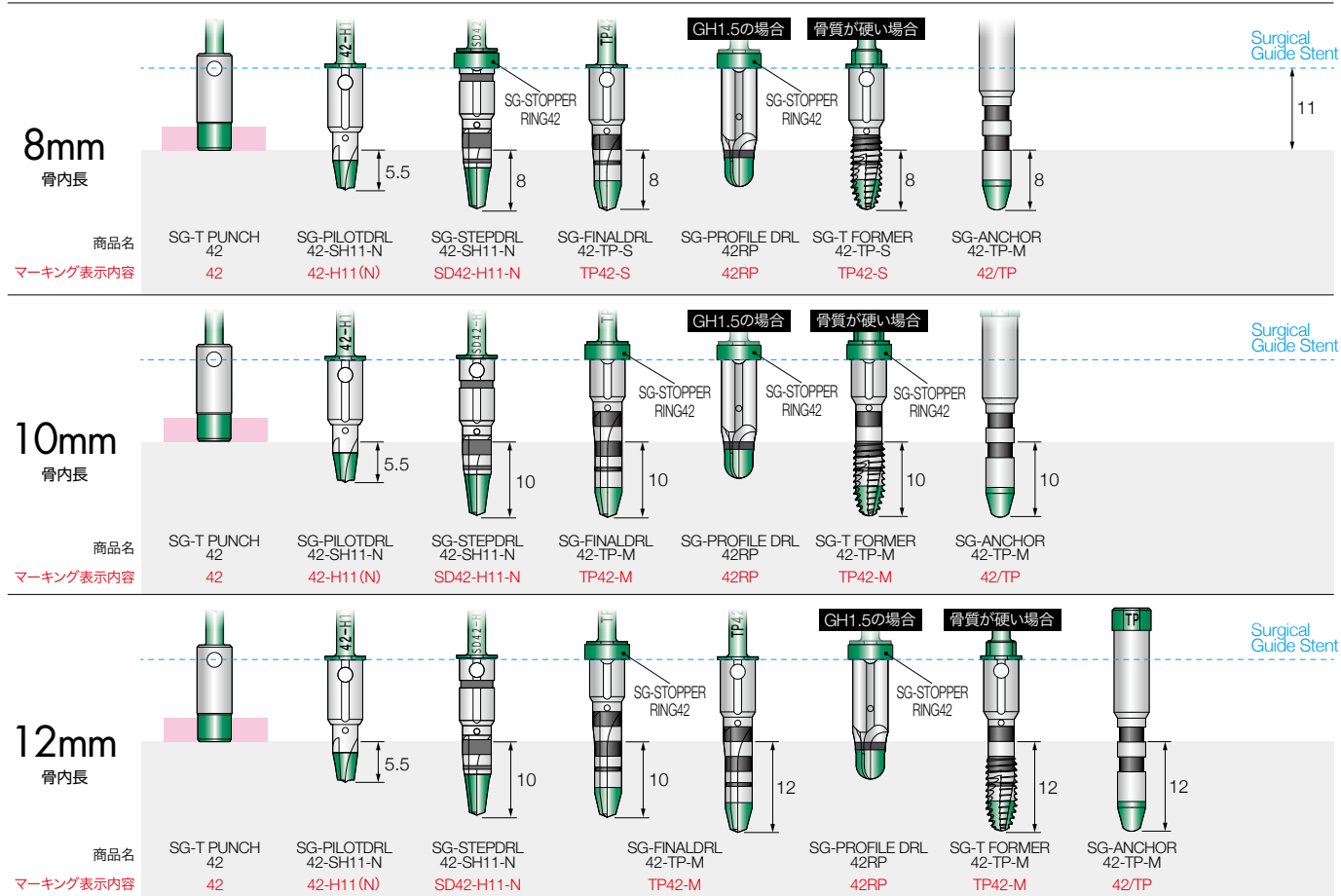

単位 :mm

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

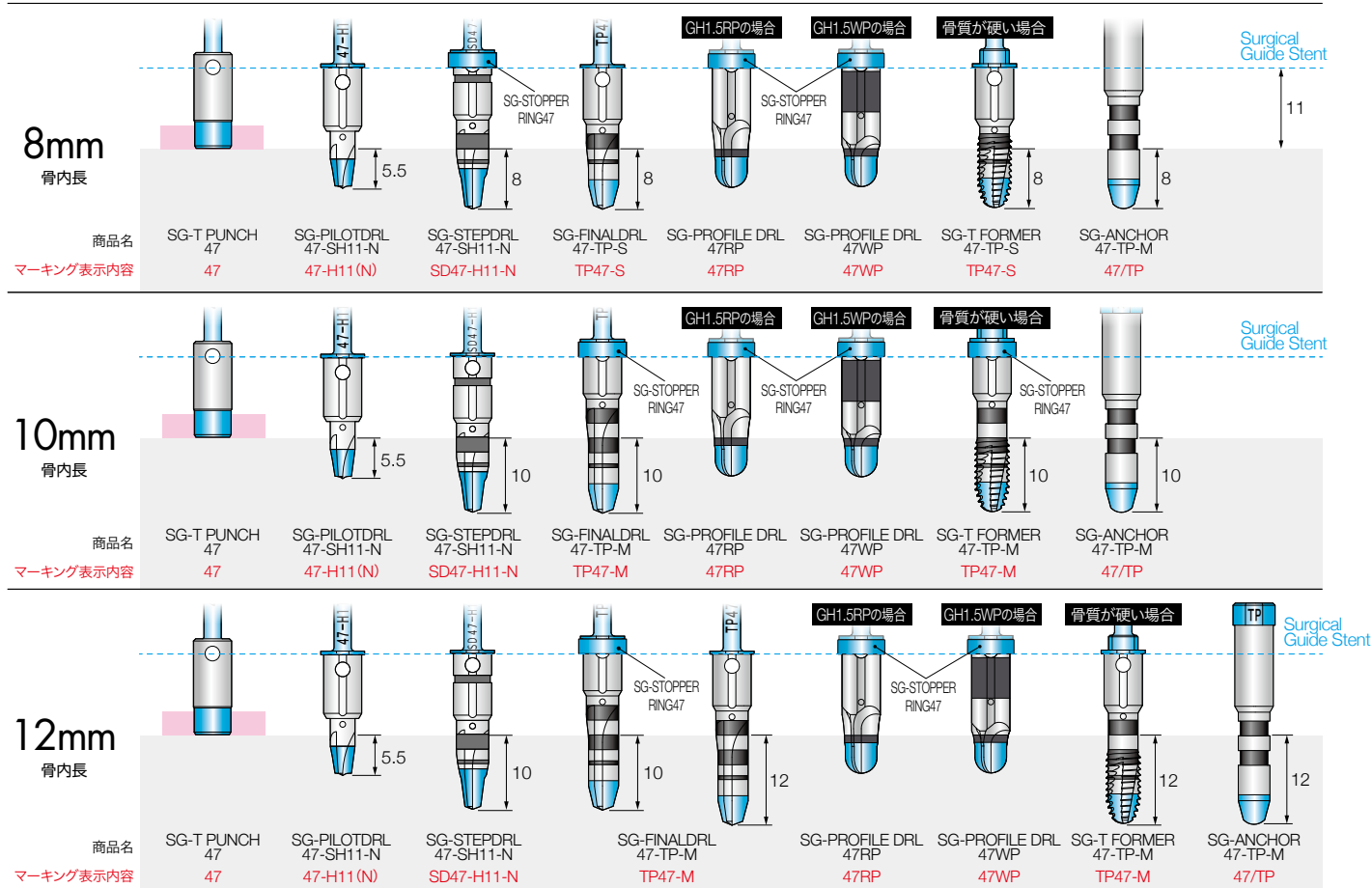

单位:mm

サージカルガイドステント高さ **13mm**

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type



術式チャート

13mm
サージカルガイドシステム




FINESIA Surgical Guide System

Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

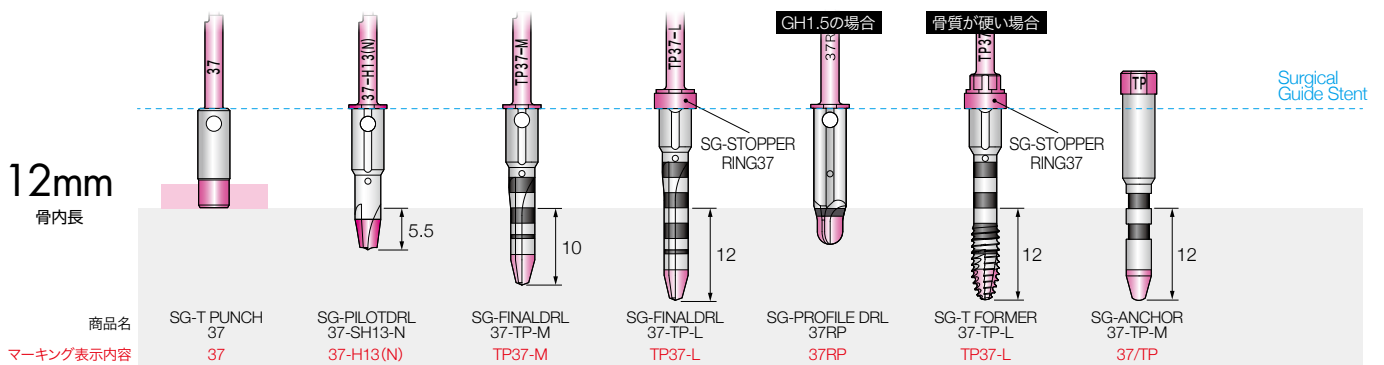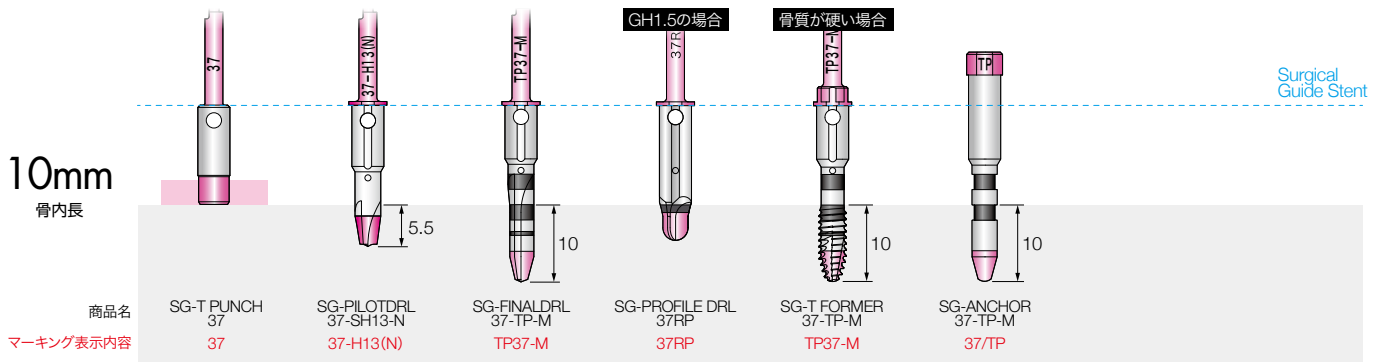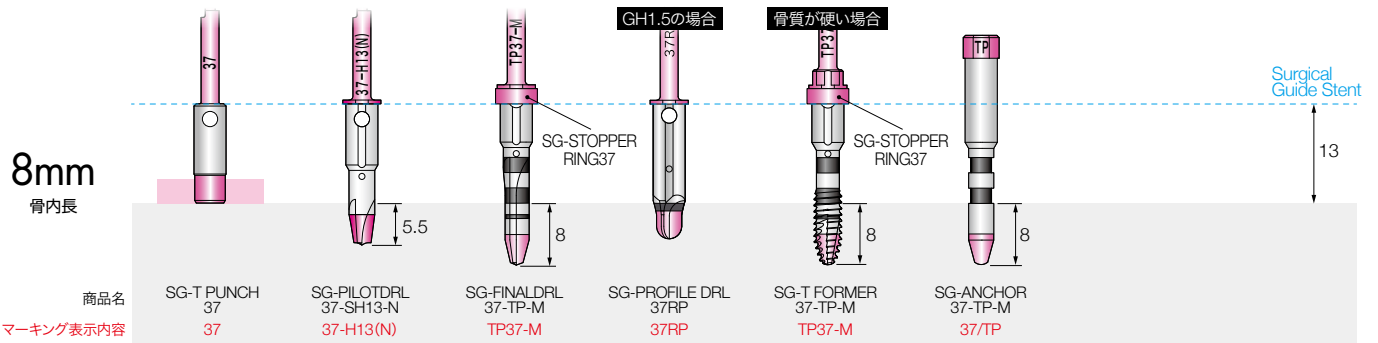

単位 :mm

13mm
サージカルガイドシステム

FINESIA Surgical Guide System

Relios 術式チャート


Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


8mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

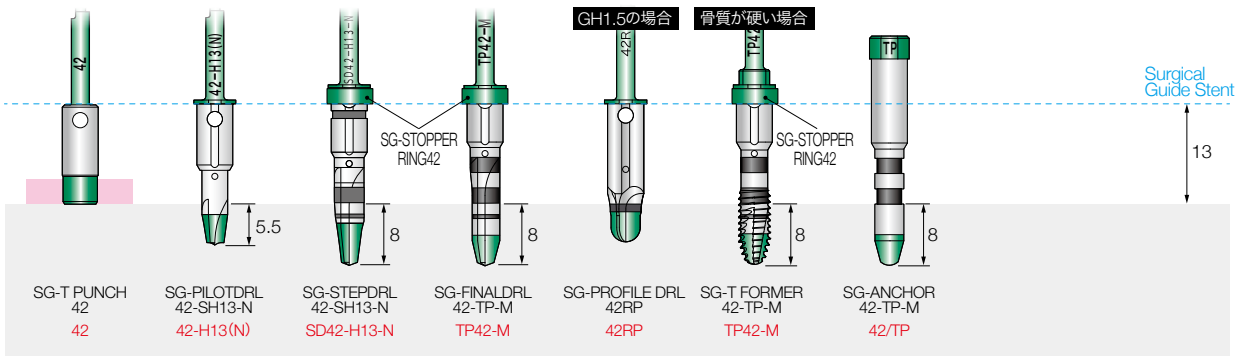


10mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

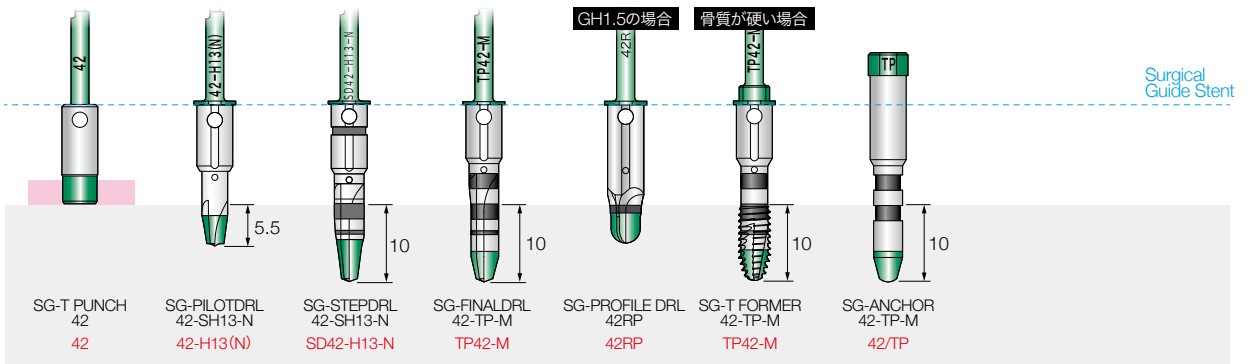

12mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

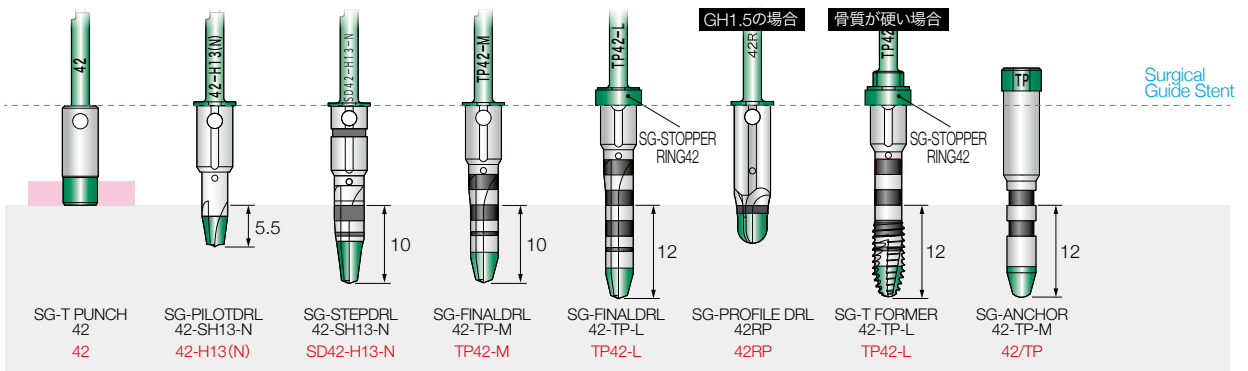

単位 :mm

13mm
サージカルガイドシステム高さ


FINESIA Surgical Guide System

Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

サージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

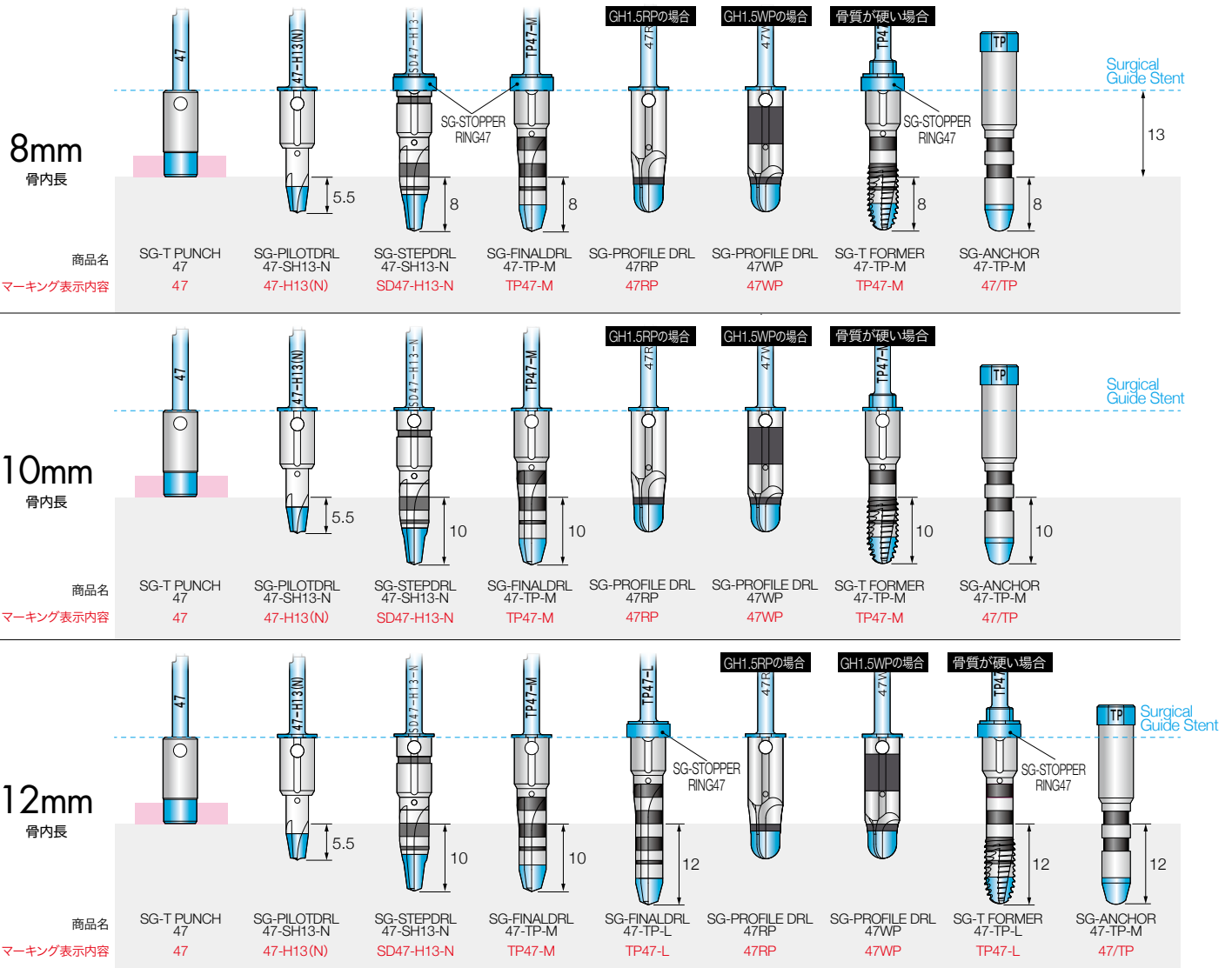

単位 : mm

本マニュアルに記載されている製品は、下記の医療機器承認／届出番号を取得しています。

販売名	分類	一般的名称	承認 / 届出番号	クラス分類
FINESIA TLフィクスチャー BE	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	30500BZX00286000	Ⅲ
FINESIAサージカルガイドシステム器具	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	26B1X10012101123	I

製造販売元：京セラ株式会社

京セラ株式会社

メディカル事業部 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

本 社 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地 〒612-8501
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

東京事業所 東京都港区三田三丁目5番19号(住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-8316
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560

大阪事業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel: 06-7178-1898 Fax: 06-6350-8157

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel: 011-555-3288 Fax: 011-281-6525

名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京事業所となります。

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel: 086-803-3625 Fax: 026-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト6F) 〒812-0013
Tel: 092-452-8148 Fax: 090-452-8177



www.finesia.world

「FINESIA」「Relios」は、京セラ株式会社の登録商標です。
当術式チャートに記載の情報は2024年6月時点のものです。