




FINESIA®
Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート

術式チャートの見方

(例) サージカルガイドステント高さ9mm、インプラント径φ4.2mm、骨内長8mm、Straight typeの場合

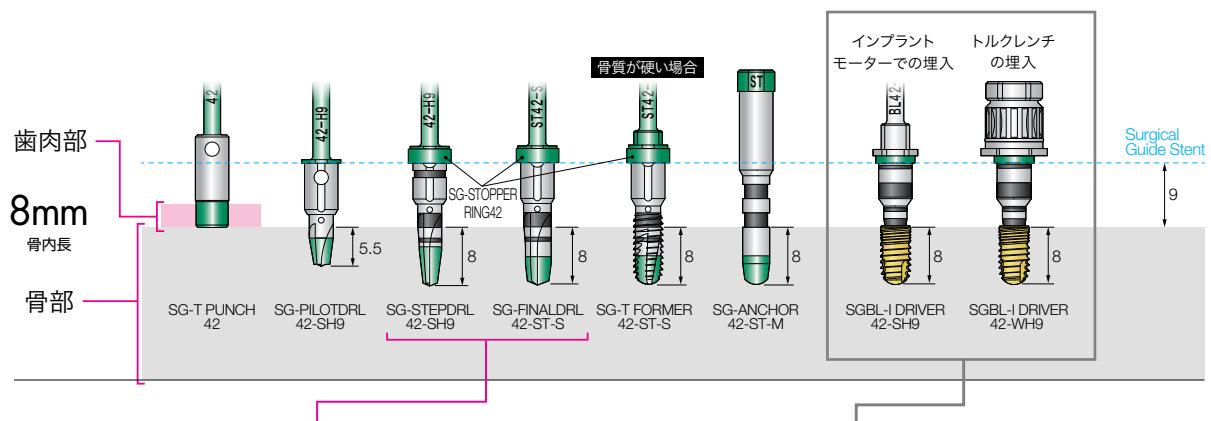

SGステップドリル、SGファイナルドリルSTの記載寸法は、ドリルに対応するインプラント長です。


骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER *SH*タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER *-WH*タイプを選択することができます (ただし、インプラント径 φ3.0mmには、どちらのドライバーも用意されていません)。

ドリル先端仕様

SGステップドリル、SGファイナルドリルSTのドリルの刃長は、インプラント体よりも下記のように長く設定されています。


SGステップドリル

φ4.2mm φ4.7mm φ5.2mm → 0.2mm長い

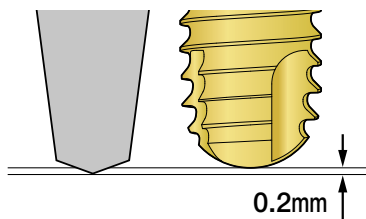

SGファイナルドリルST

φ3.7mm φ4.2mm φ4.7mm φ5.2mm → 0.2mm長い

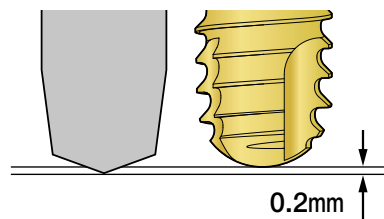


サージカルガイドシステム高さ 9mm

FINESIA®
Surgical Guide System
Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

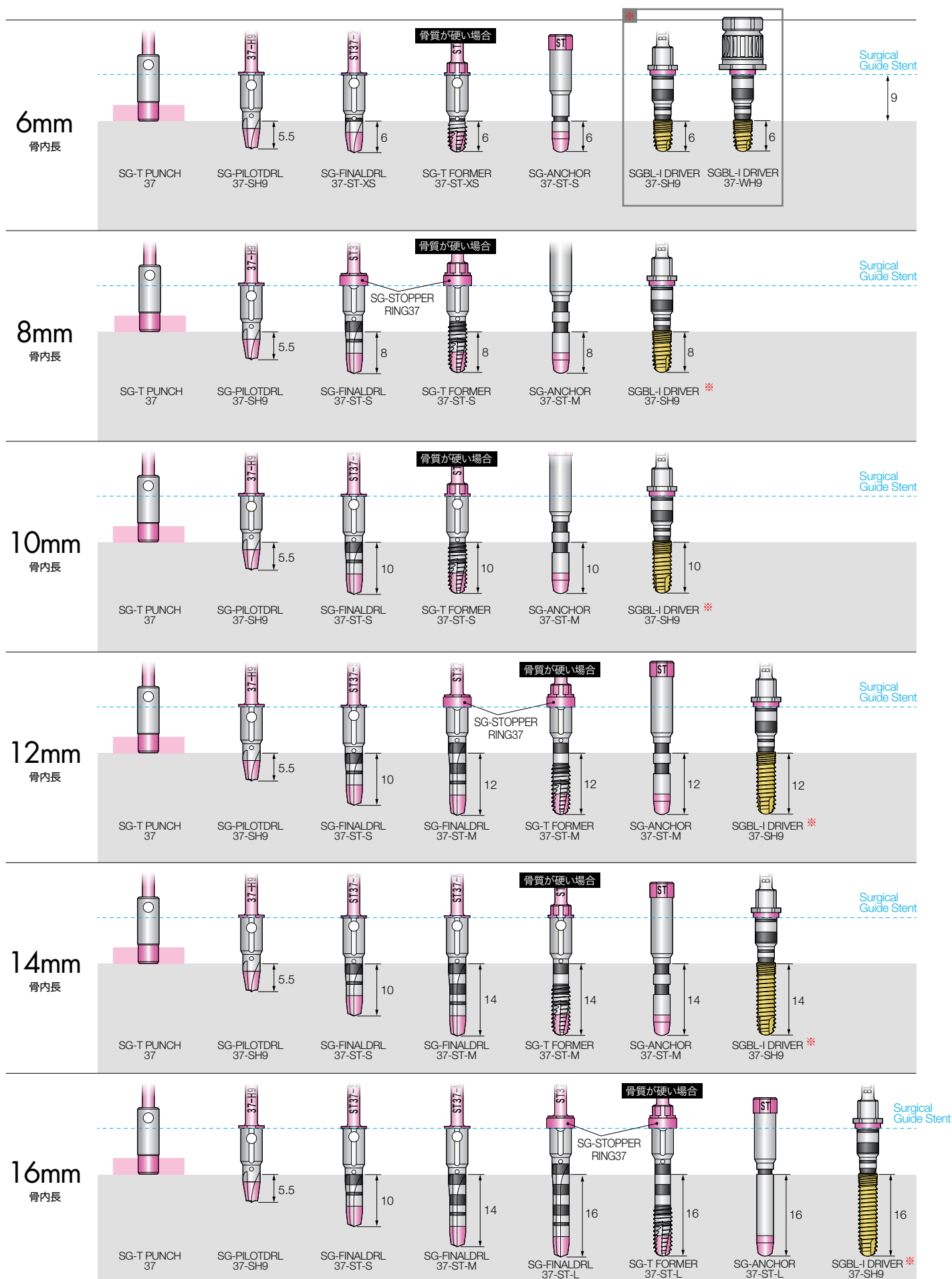

1P: 1Piece TL: Tissue Level


単位: mm

※ 骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH9タイプを選択することができます。


インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


6mm
骨内長

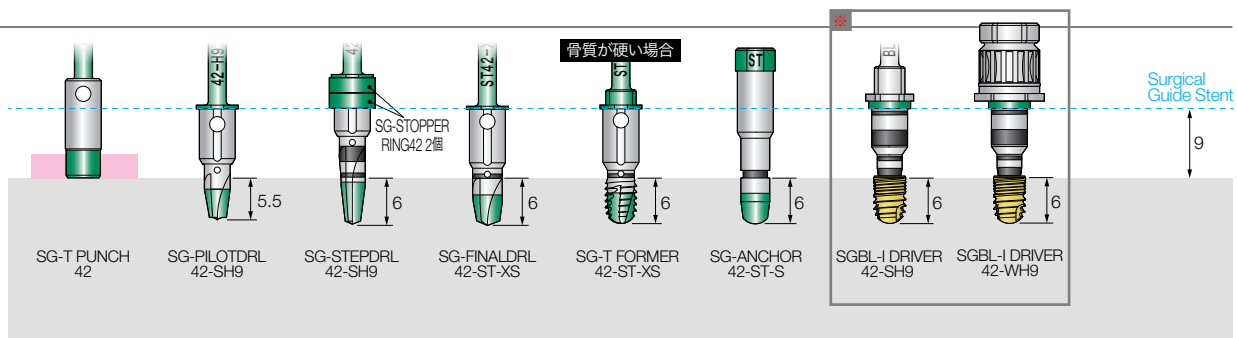


8mm
骨内長

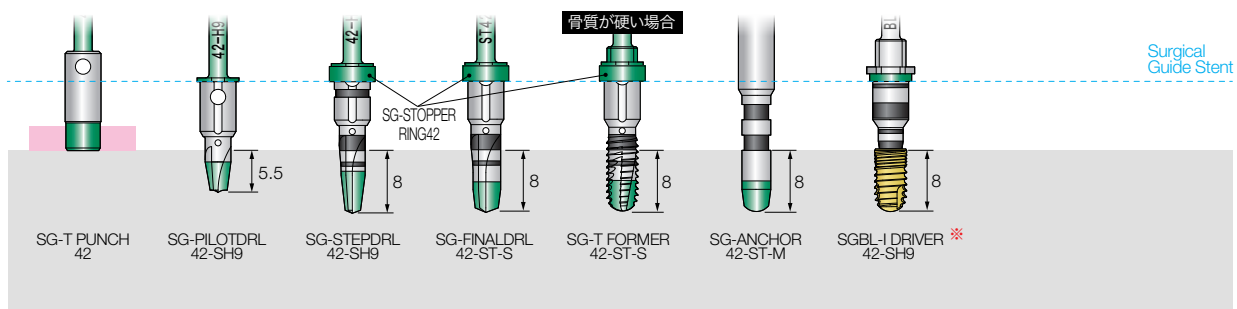


10mm
骨内長

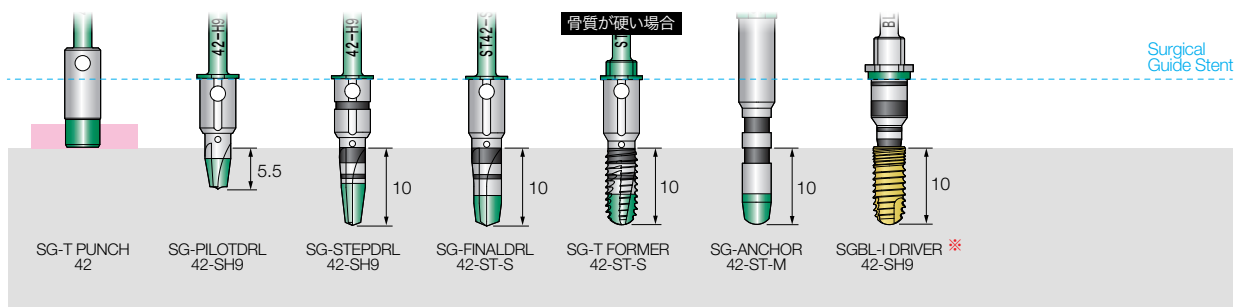


12mm
骨内長

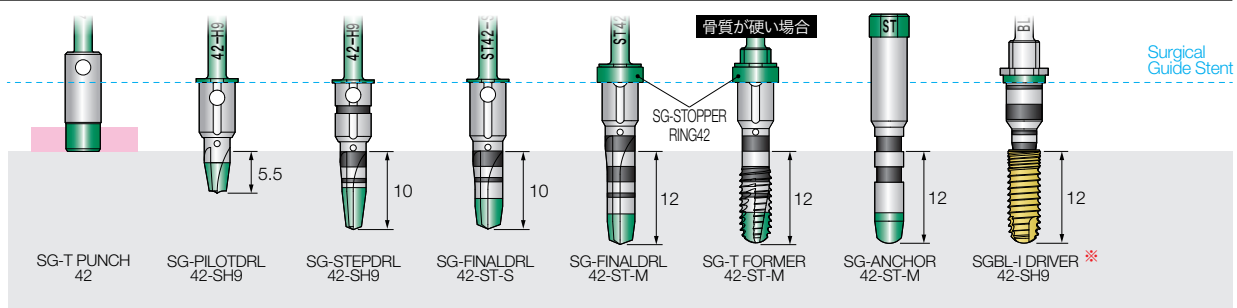

14mm
骨内長

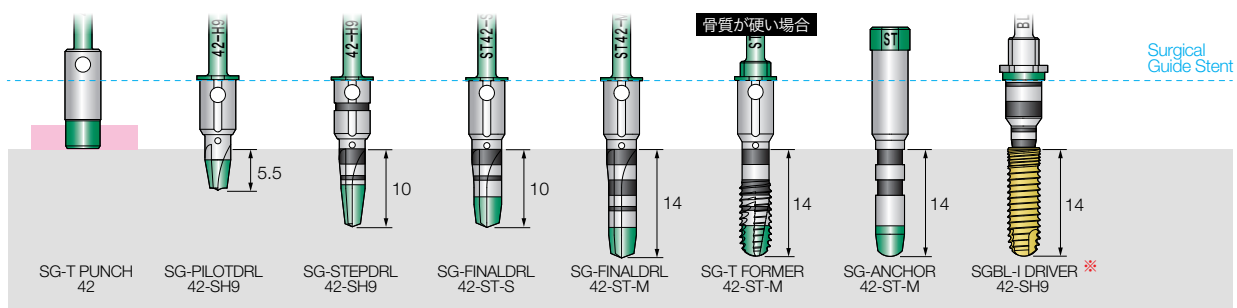

16mm
骨内長

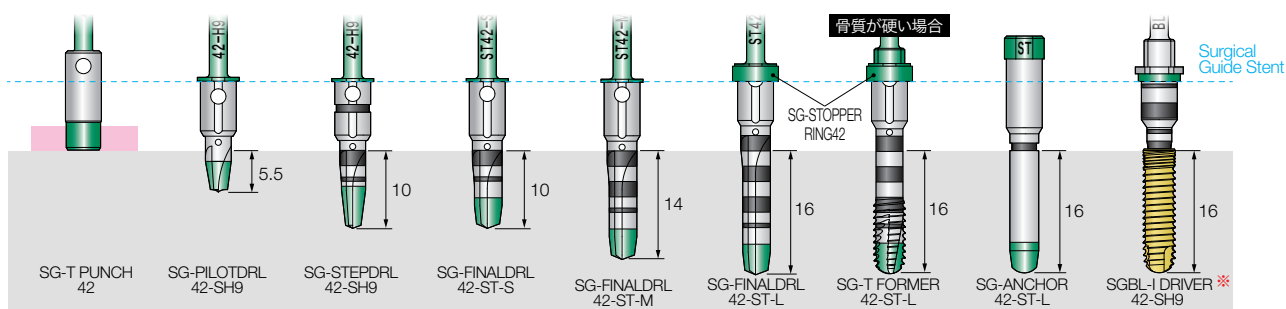

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位 : mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH9タイプを選択することができます。


9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Straight type 

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

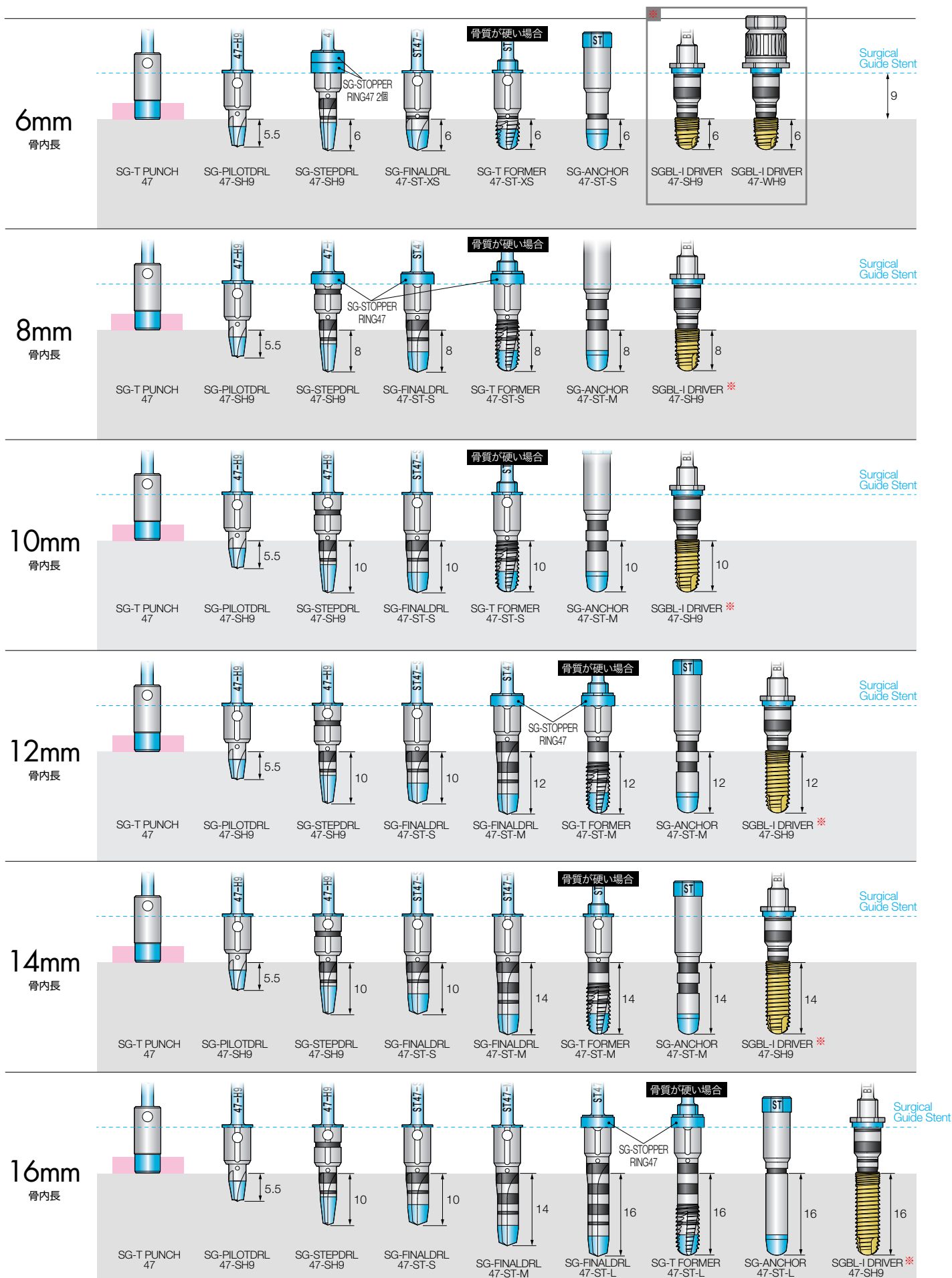


1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※ 骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH9タイプを選択することができます。

インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

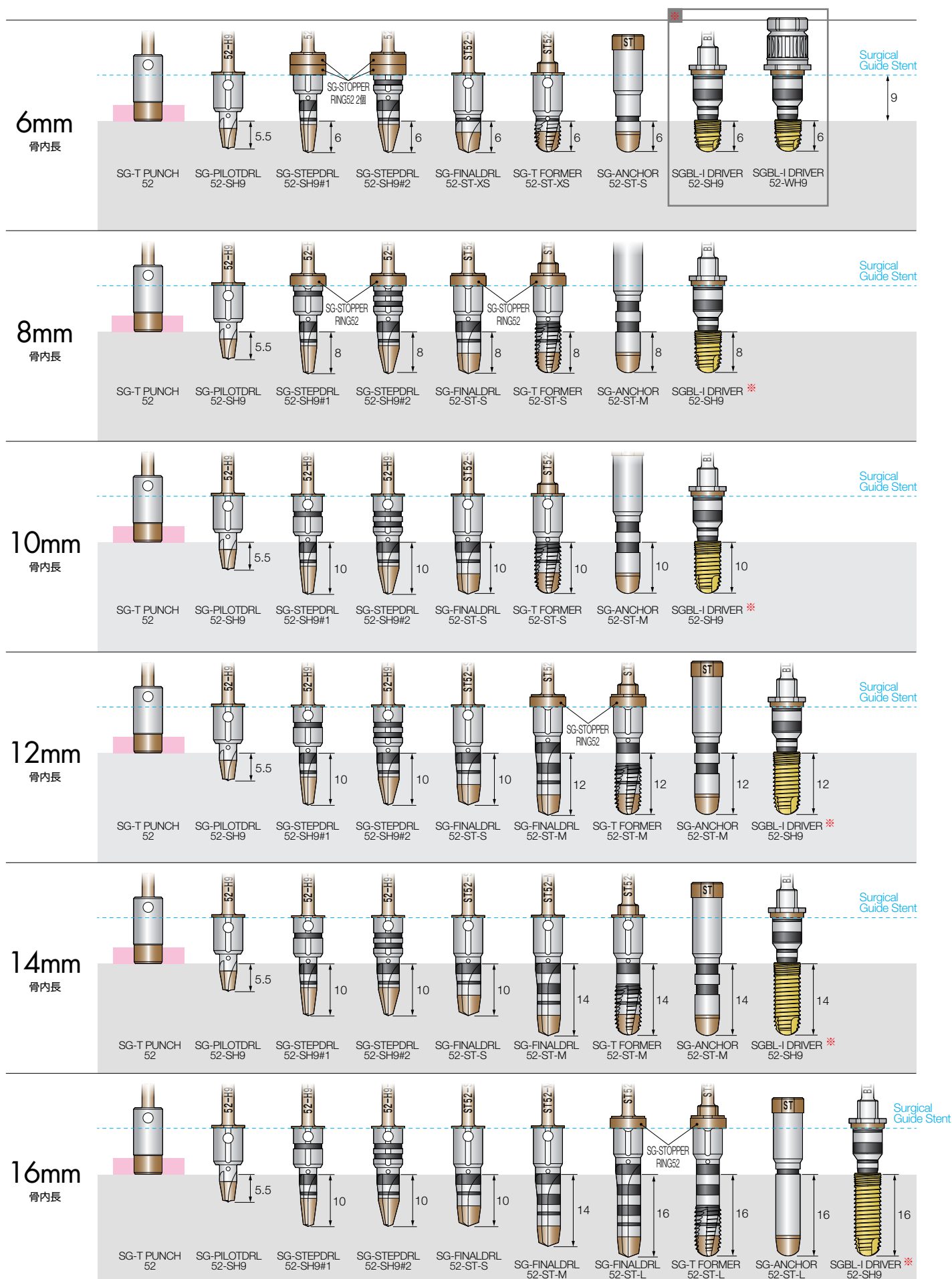

TL: Tissue Level

単位: mm

* 骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH9タイプを選択することができます。


サージカルガイドステント高さ **11 mm**

FINESIA[®]
Surgical Guide System
Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

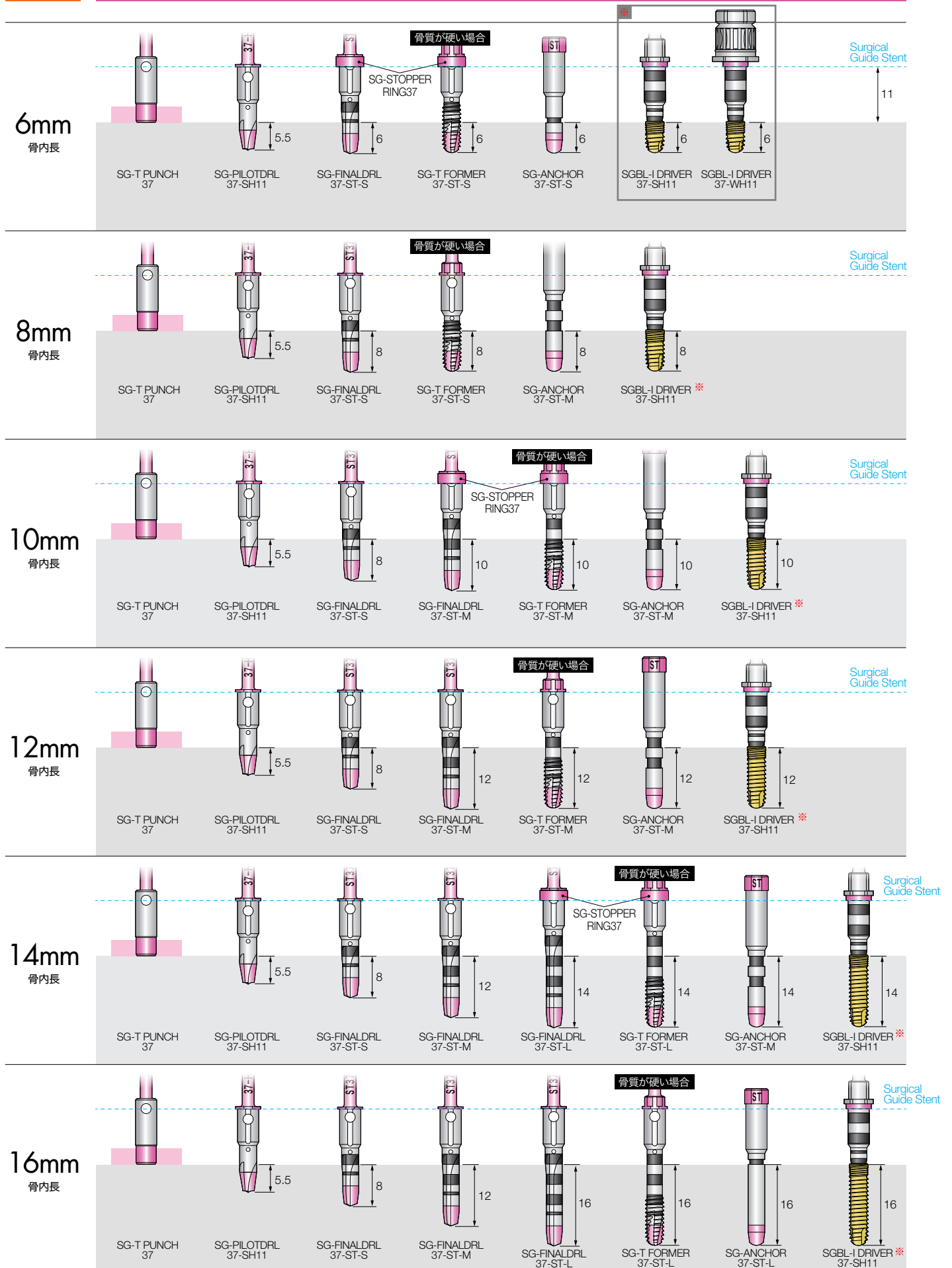

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※ 骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH11 タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH11 タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドシステム


FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Straight type 


インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


6mm
骨内長

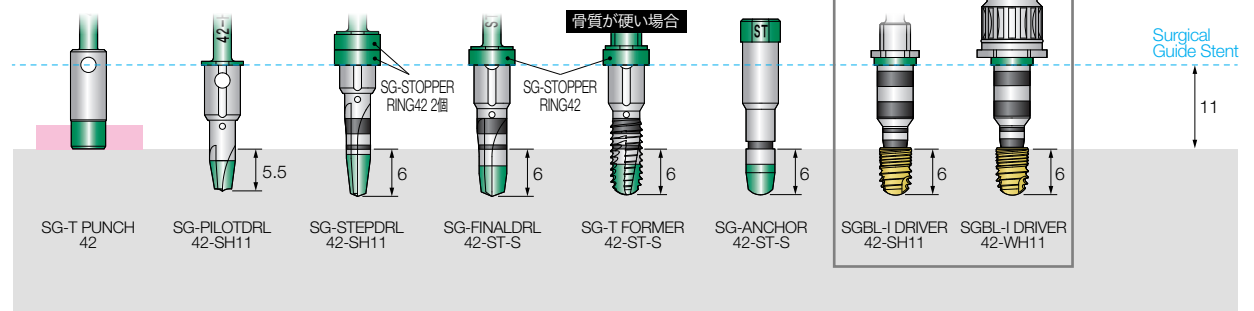


8mm
骨内長

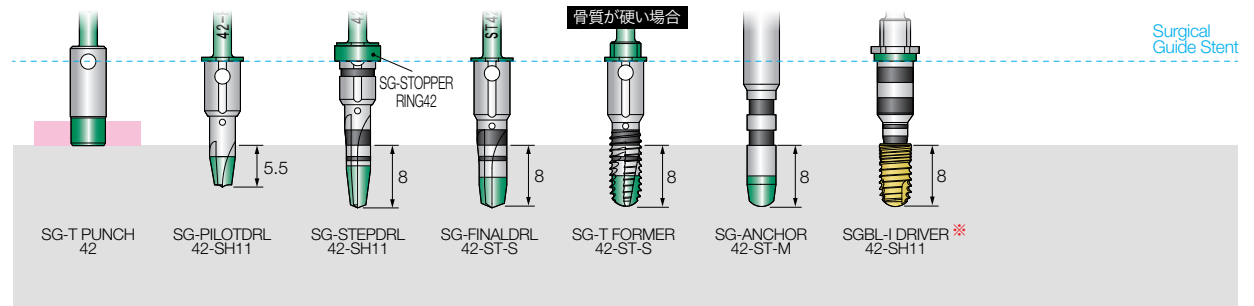


10mm
骨内長

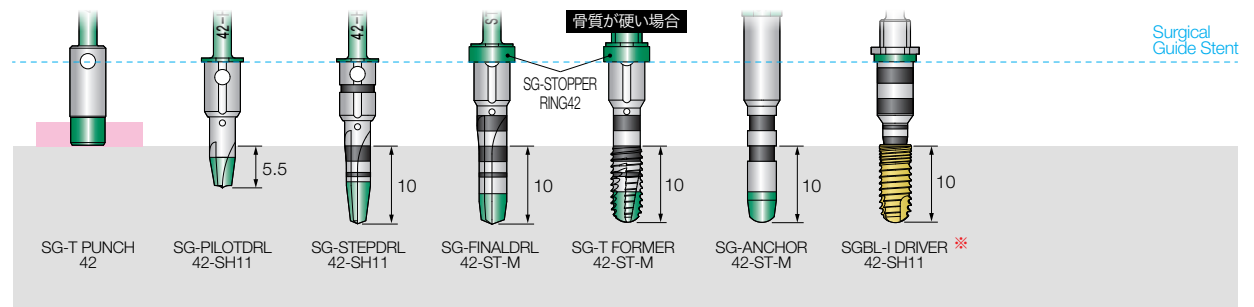


12mm
骨内長

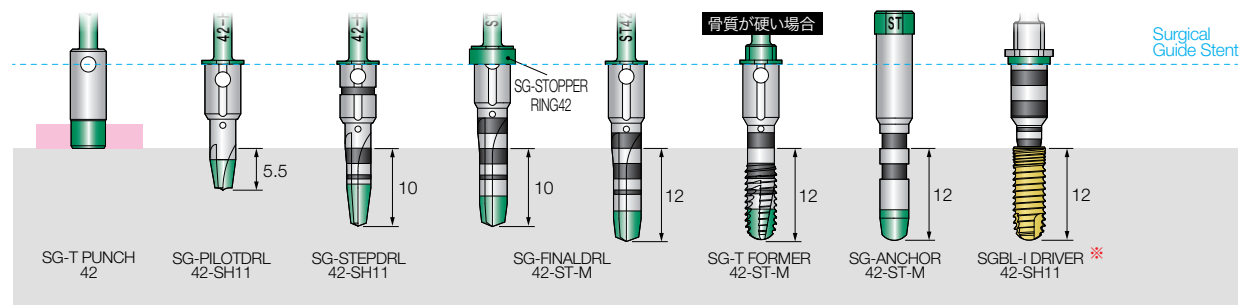

14mm
骨内長

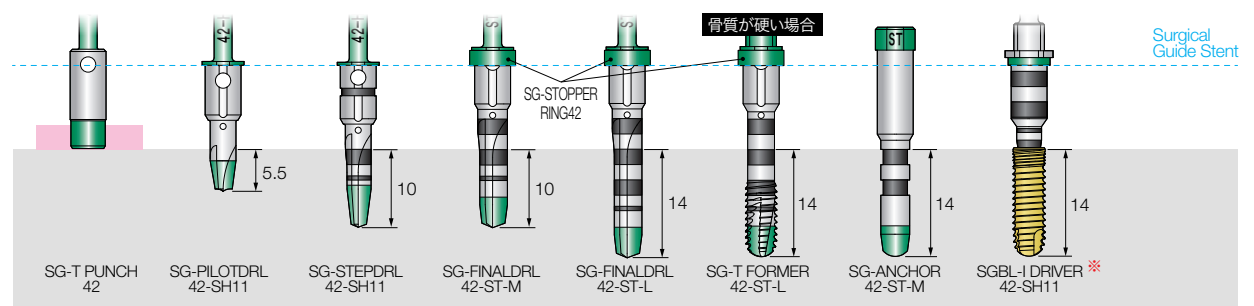

16mm
骨内長

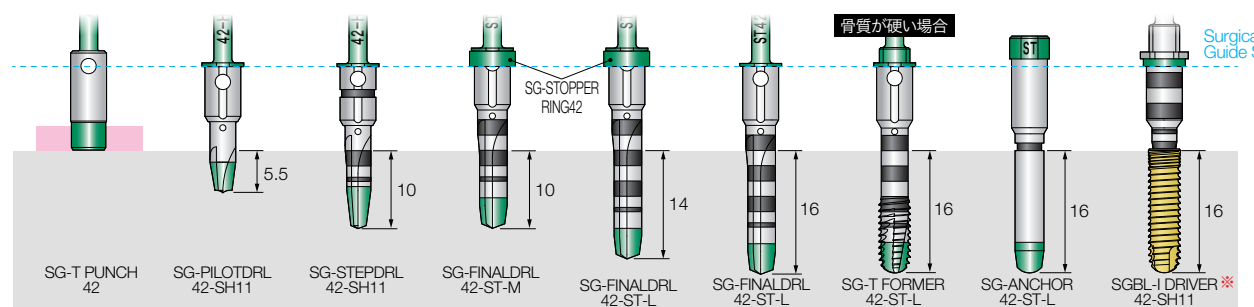

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドシステム


FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Straight type 


インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


6mm
骨内長

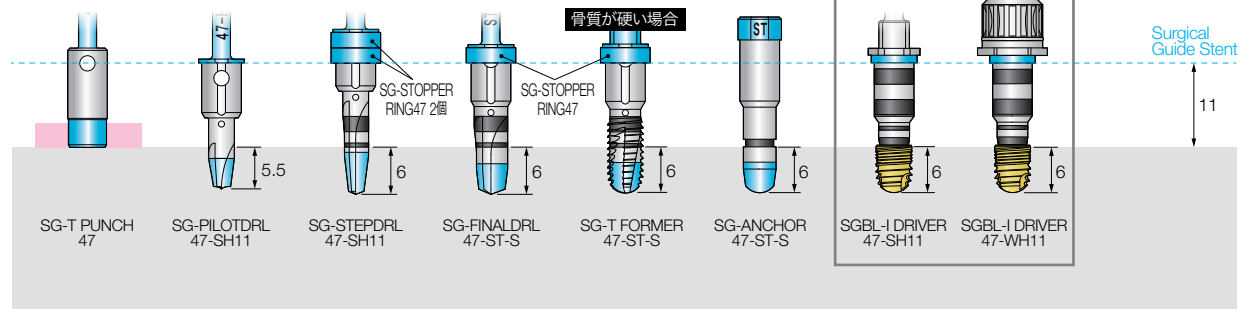


8mm
骨内長

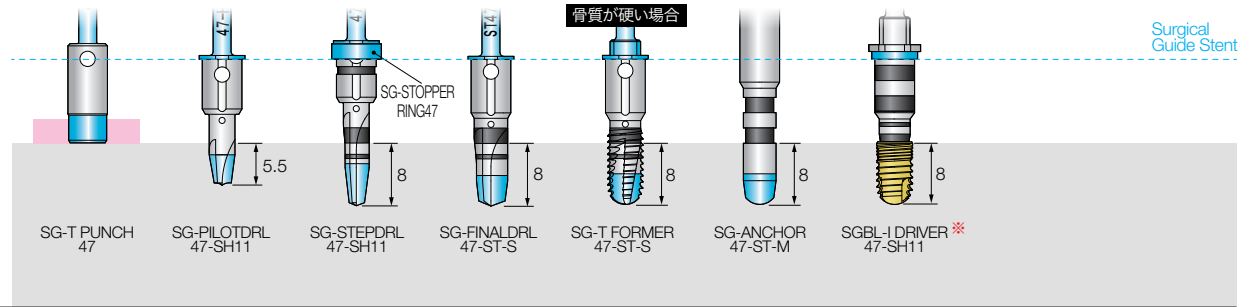


10mm
骨内長

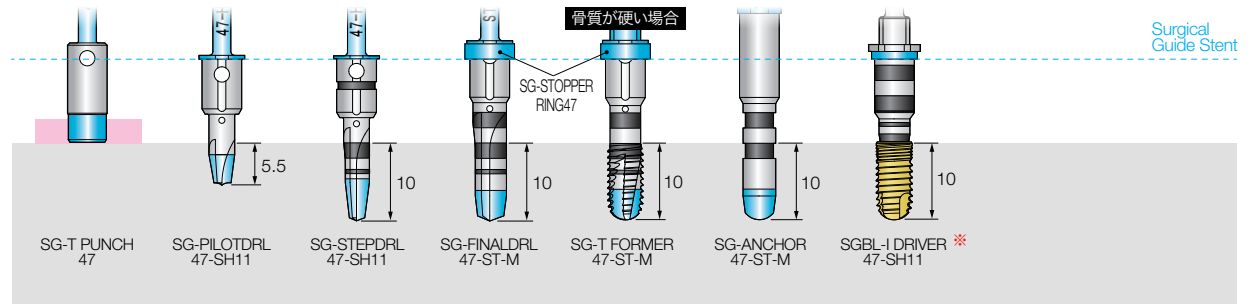


12mm
骨内長

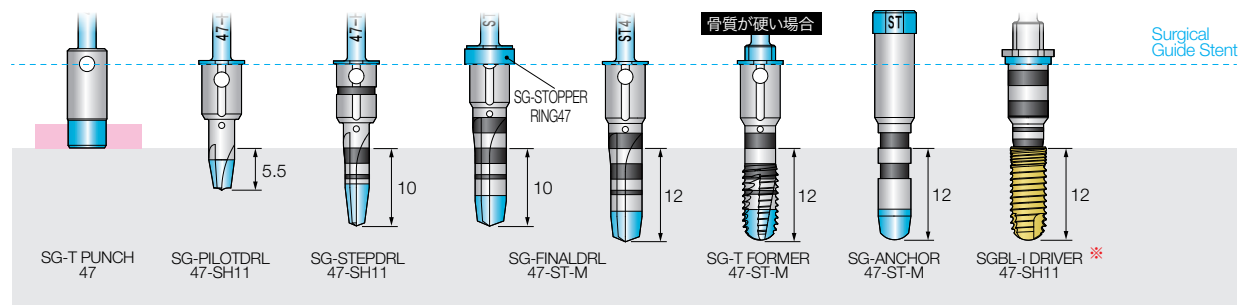

14mm
骨内長

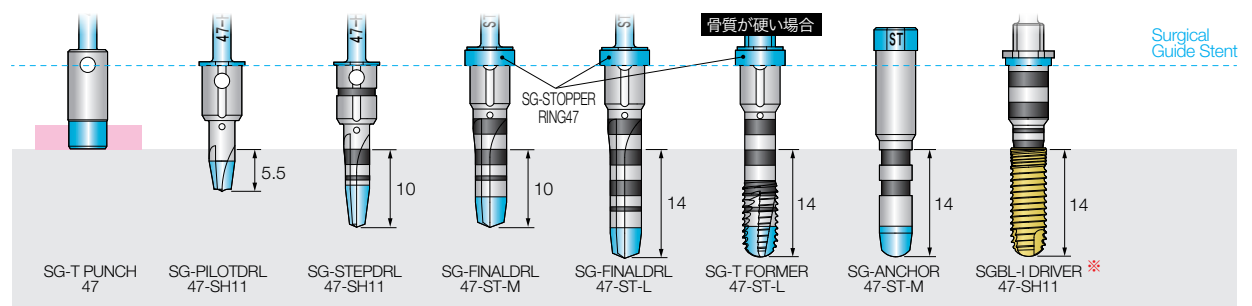

16mm
骨内長

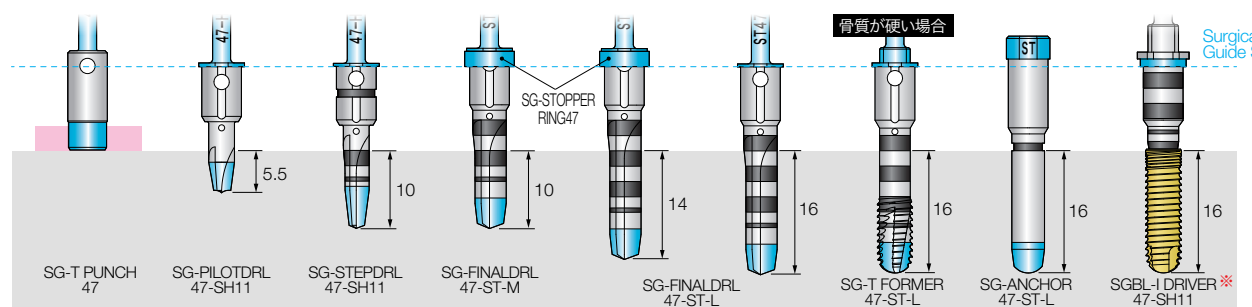

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System

術式チャート


Straight type 

インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

TLタイプはサージカルガイドシステムを外してインプラントを埋入してください。


6mm

骨内長

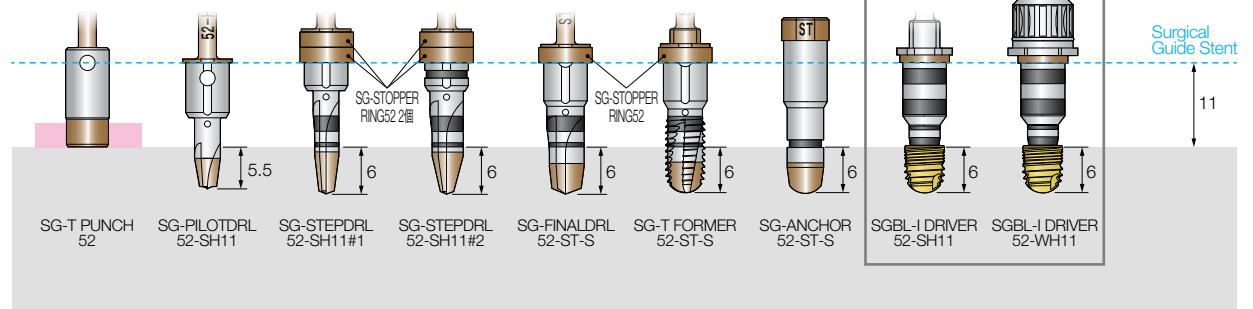


8mm

骨内長

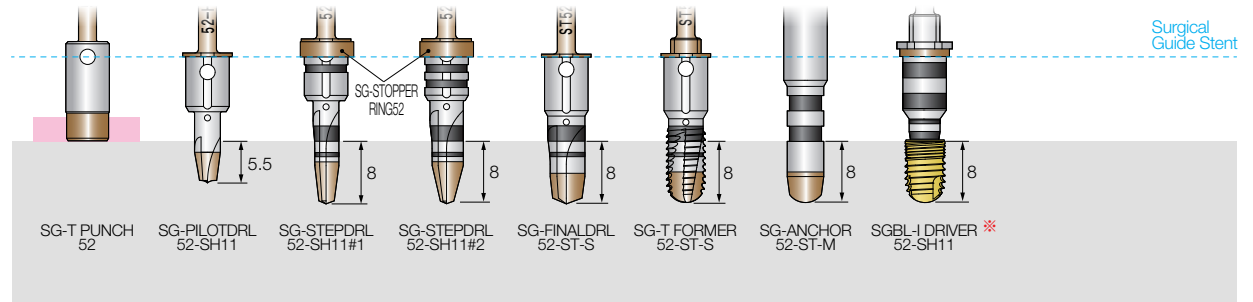


10mm

骨内長

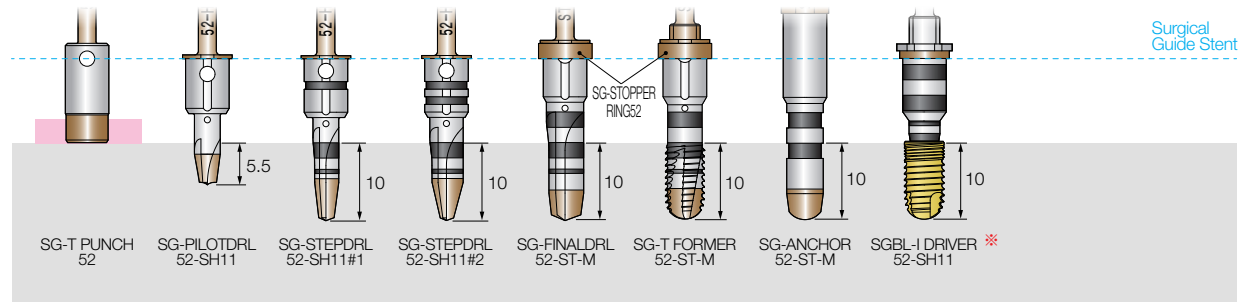


12mm

骨内長

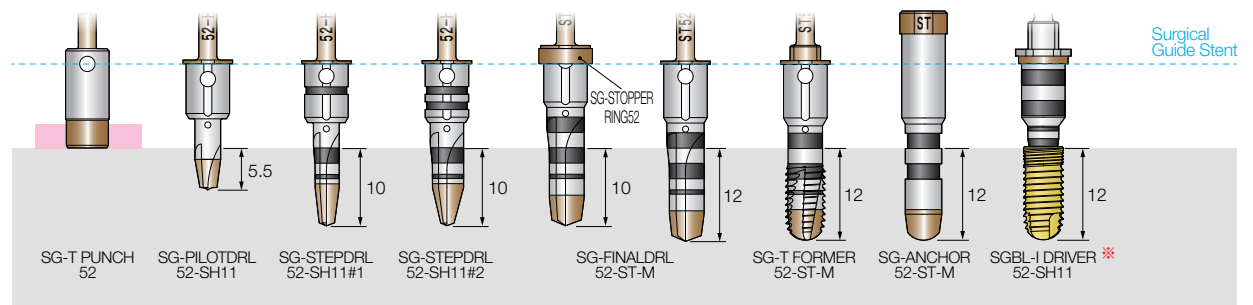


14mm

骨内長

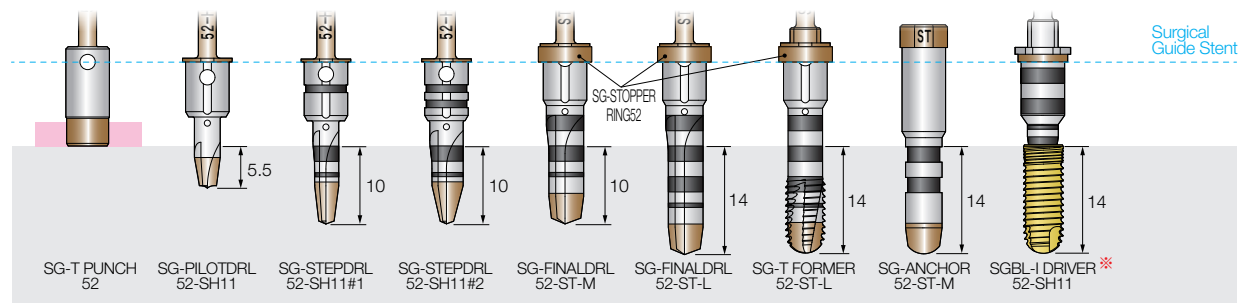

16mm

骨内長

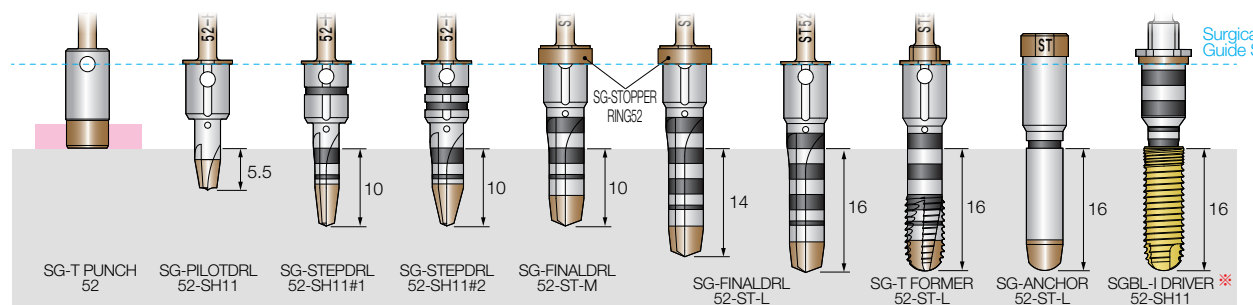

TL : Tissue Level

単位 : mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH11タイプを選択することができます。

サージカルガイドステント高さ **13mm**

FINESIA[®]
Surgical Guide System
Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート






13mm
サージカルガイドシステム高さ

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Straight type 

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドシステムを外してインプラントを埋入してください。

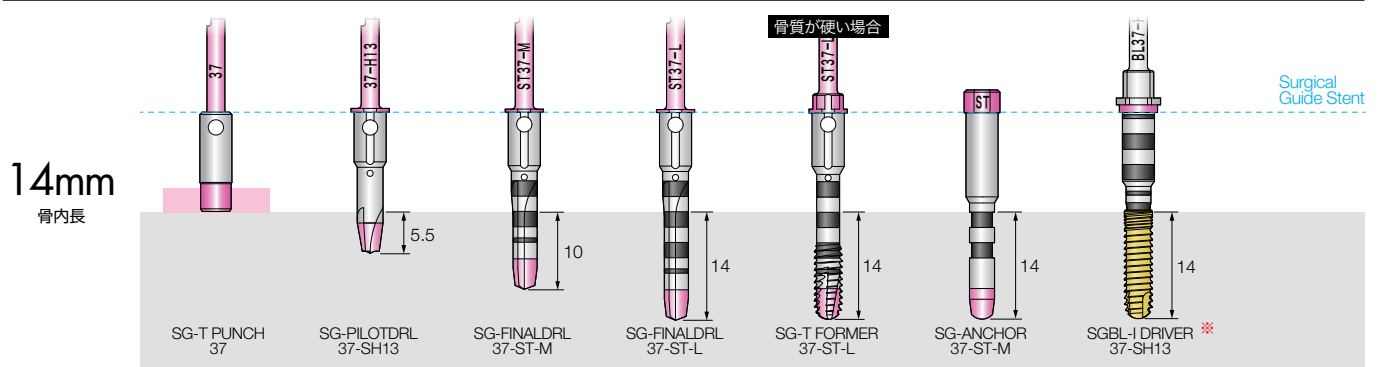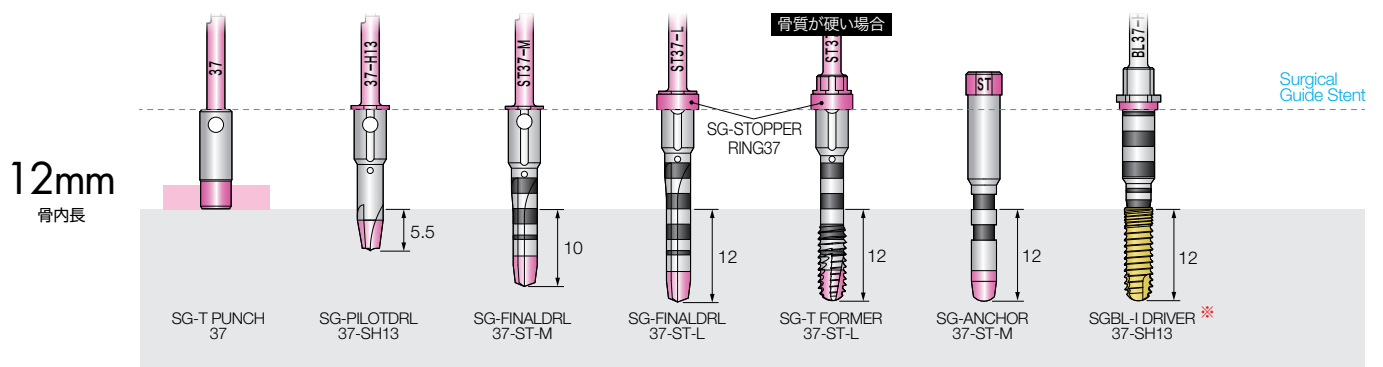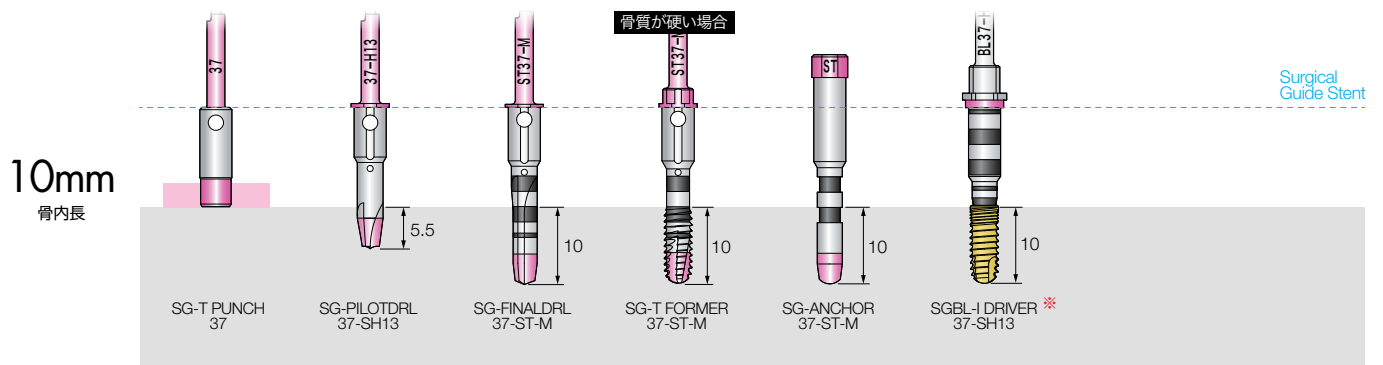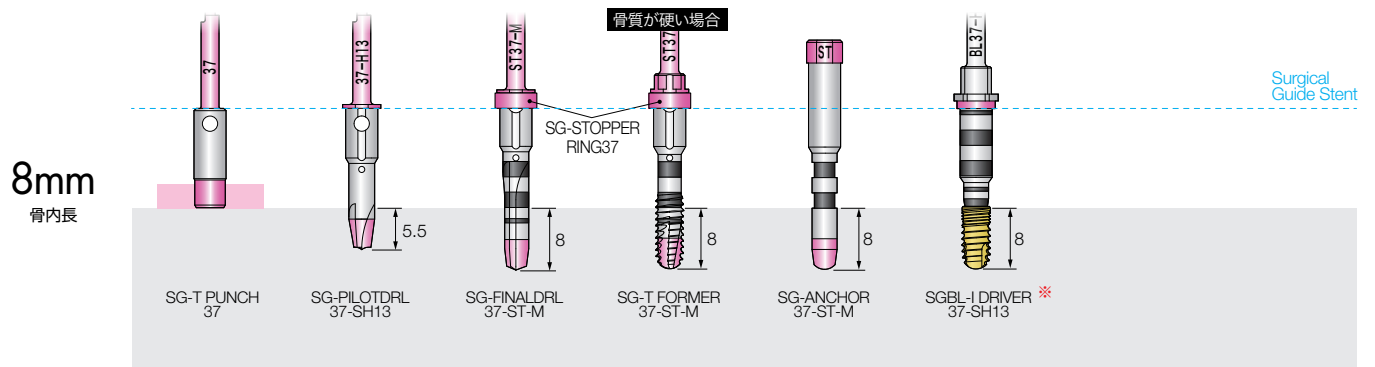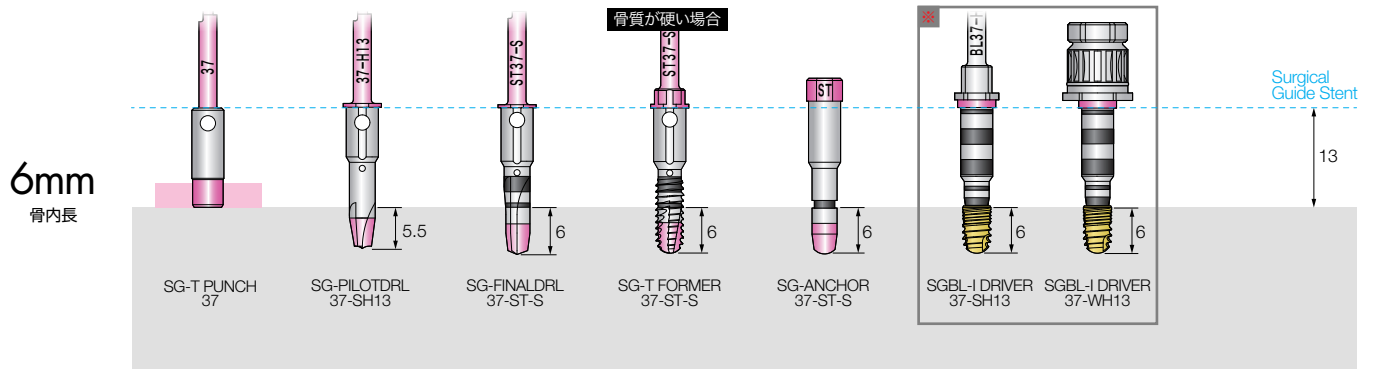

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム


FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Straight type 


インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


6mm
骨内長

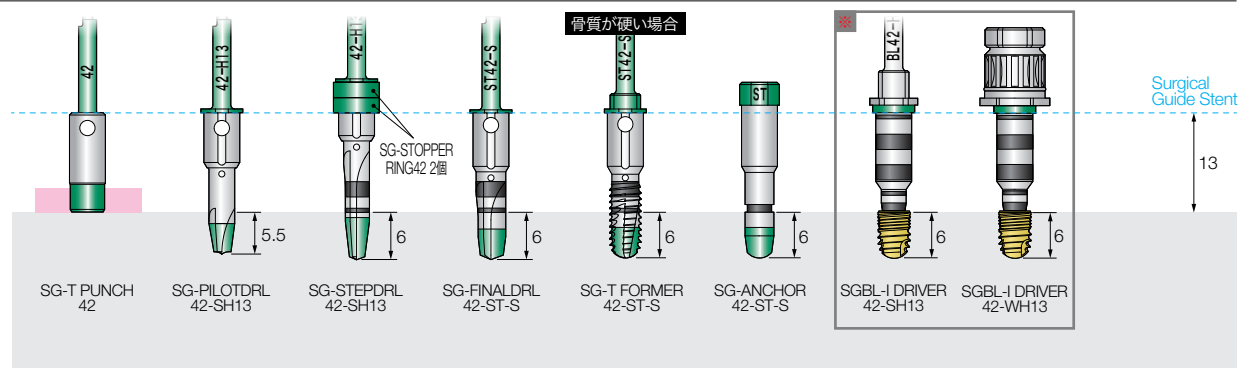


8mm
骨内長

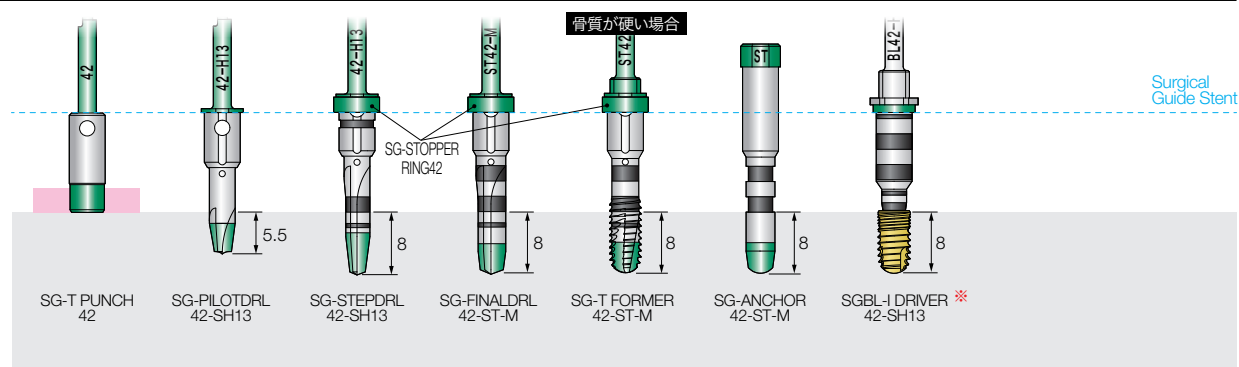


10mm
骨内長

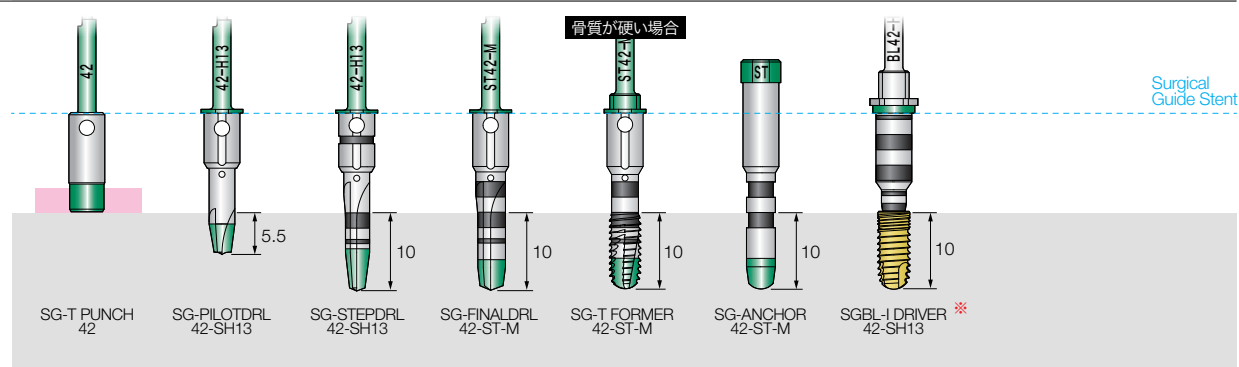

12mm
骨内長

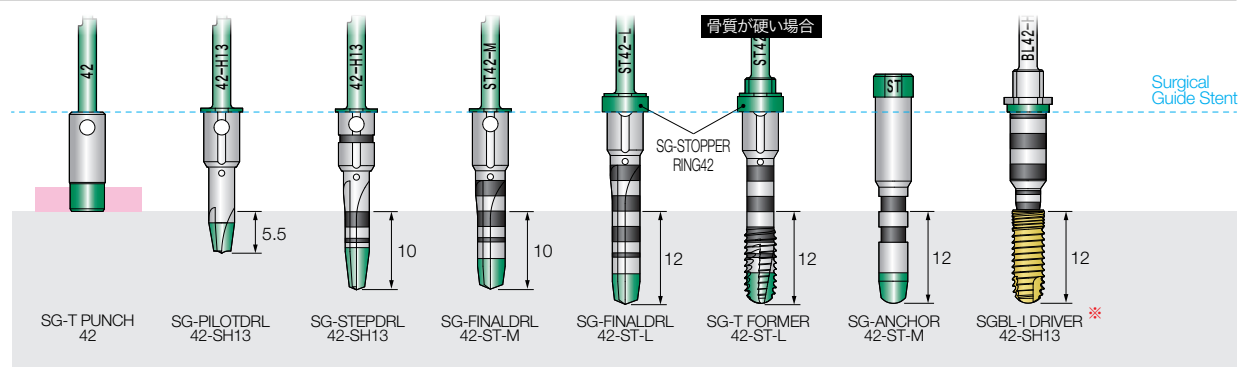

14mm
骨内長

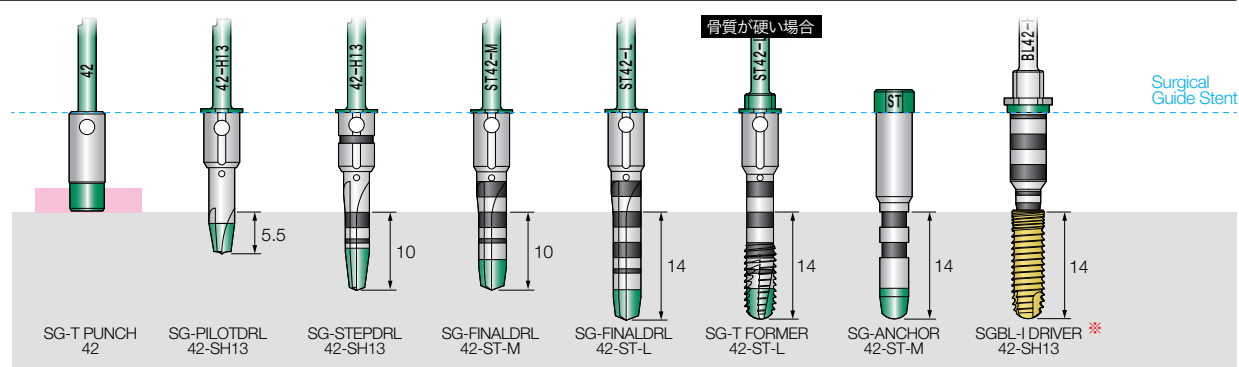

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※ 骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム


FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Straight type 


インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


6mm
骨内長

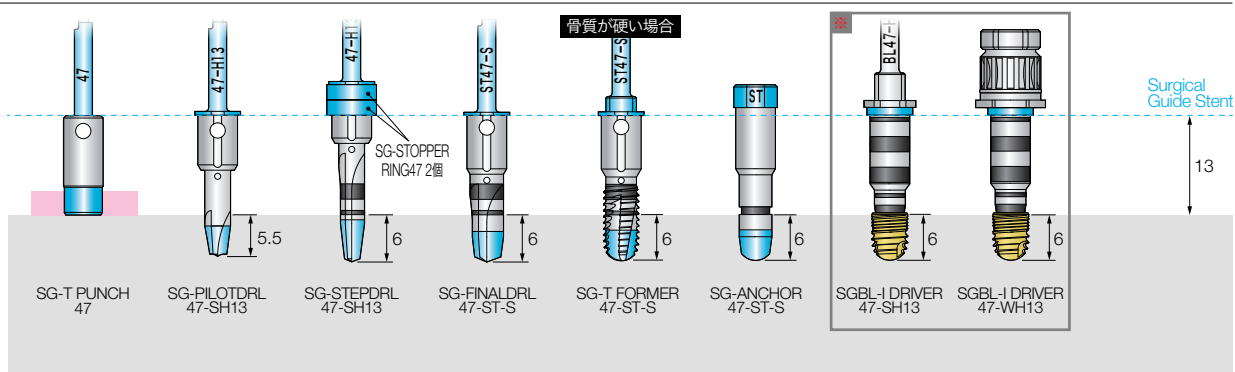


8mm
骨内長

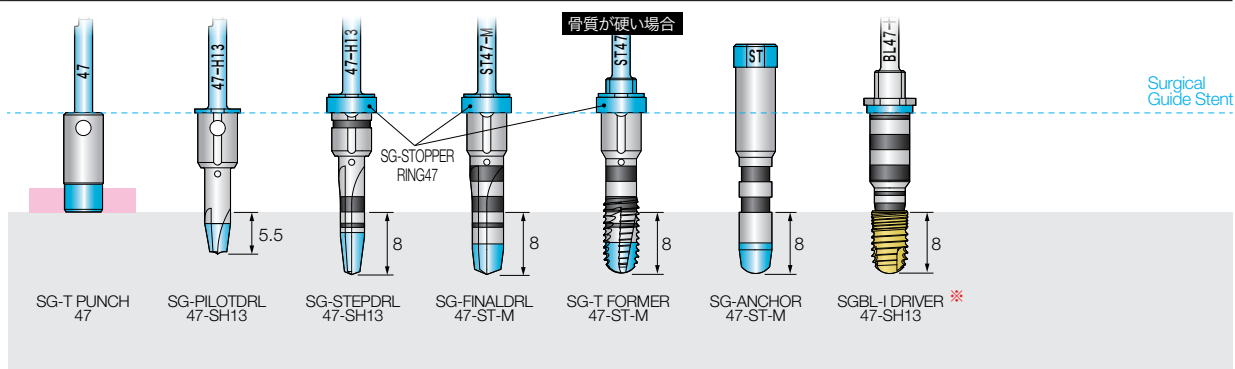


10mm
骨内長

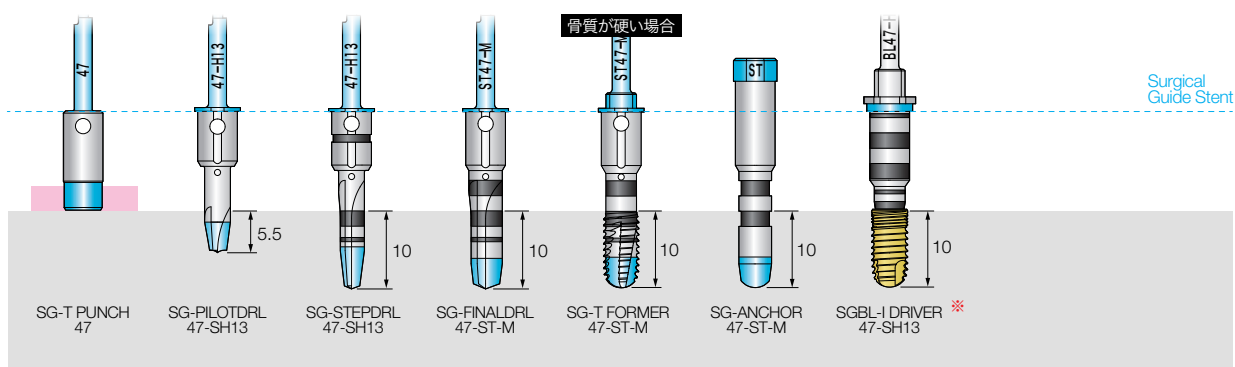

12mm
骨内長

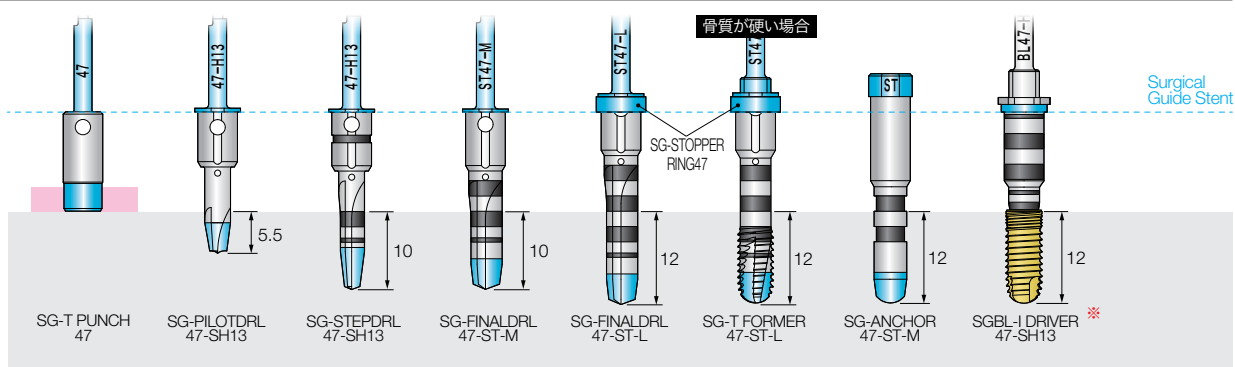

14mm
骨内長

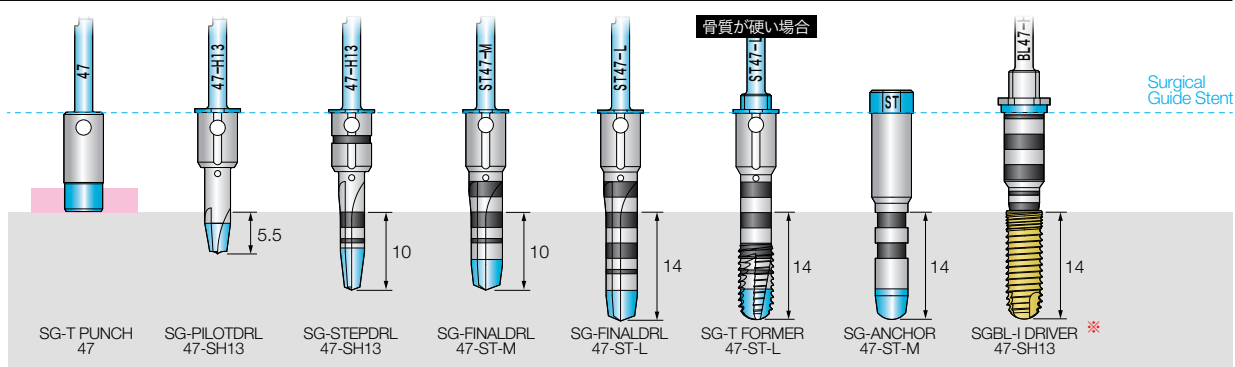

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※ 骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム高さ

FINESIA Surgical Guide System


術式チャート

Straight type 


インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


6mm
骨内長

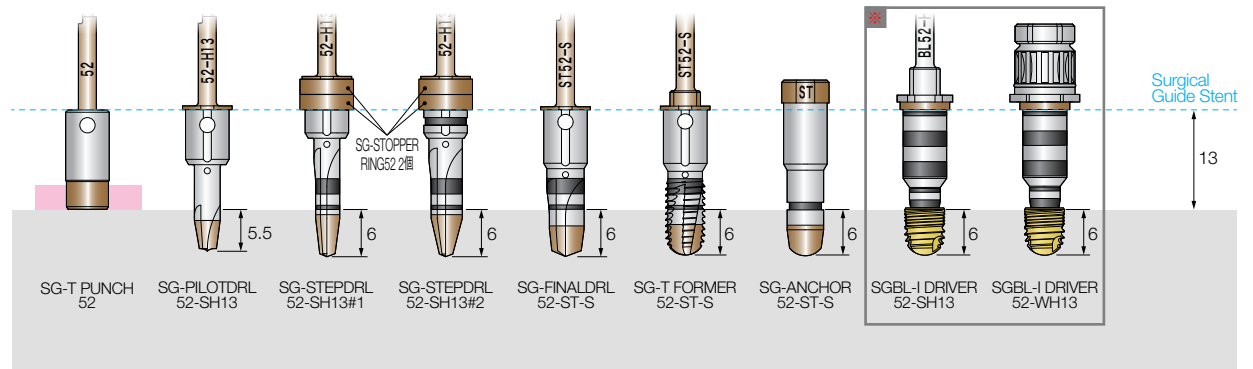


8mm
骨内長

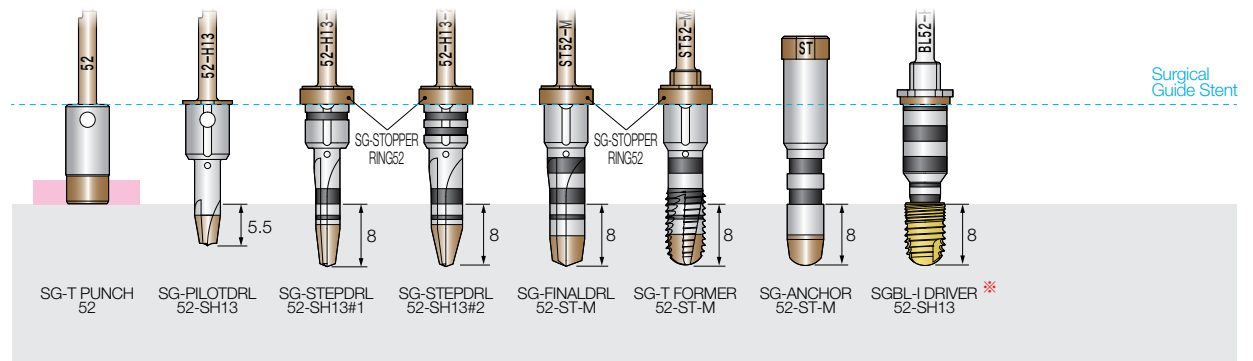


10mm
骨内長

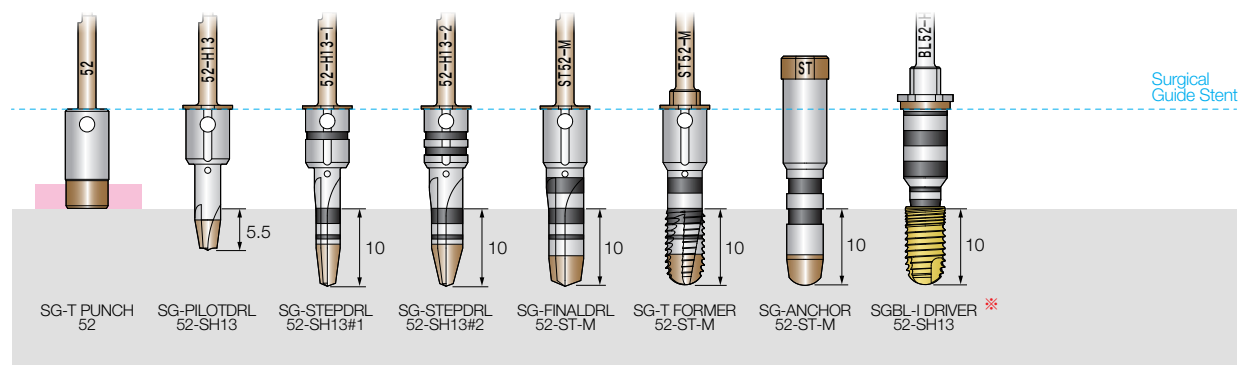

12mm
骨内長

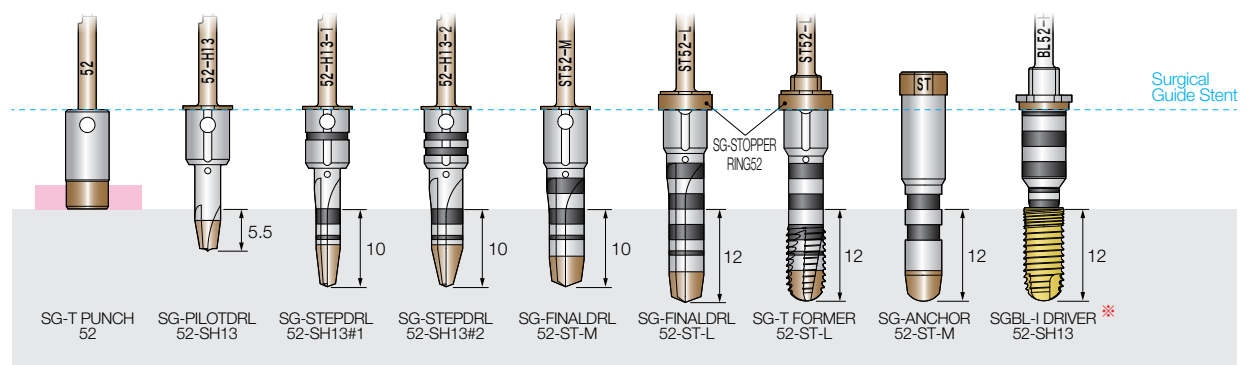

14mm
骨内長

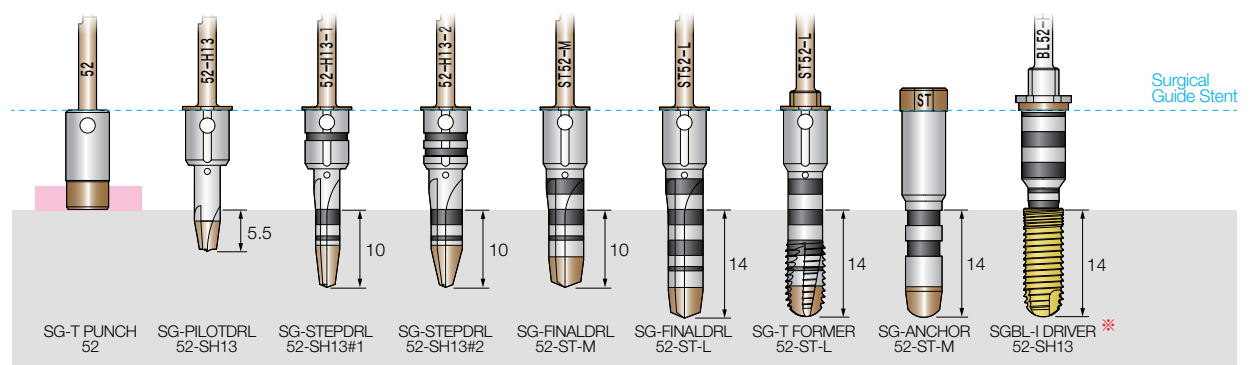

TL: Tissue Level

単位: mm


* 骨内長を問わず、インプラントメーカーによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH13タイプを選択することができます。

FINESIA®
Surgical Guide System

PRODUCT LIST


製品リスト

SGガイドチューブ


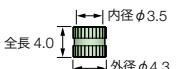
インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.0		SG-GUIDE TUBE30 ※	BCDI13100	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE30(50P)	BCDI13110	¥80,000
φ3.2		SG-GUIDE TUBE32 ※	BCDI13101	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE32(50P)	BCDI13111	¥80,000
φ3.4		SG-GUIDE TUBE34 ※	BCDI13102	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE34(50P)	BCDI13112	¥80,000
φ3.7		SG-GUIDE TUBE37 ※	BCDI13103	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE37(50P)	BCDI13113	¥80,000
φ4.2		SG-GUIDE TUBE42 ※	BCDI13104	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE42(50P)	BCDI13114	¥80,000
φ4.7		SG-GUIDE TUBE47 ※	BCDI13105	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE47(50P)	BCDI13115	¥80,000
φ5.2		SG-GUIDE TUBE52 ※	BCDI13106	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE52(50P)	BCDI13116	¥80,000

※2個入り

SGストッパーリング

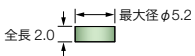インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.0		SG-STOPPER RING30	BCDI13120	¥2,500
φ3.2		SG-STOPPER RING32	BCDI13121	
φ3.4		SG-STOPPER RING34	BCDI13122	
φ3.7		SG-STOPPER RING37	BCDI13123	
φ4.2		SG-STOPPER RING42	BCDI13124	
φ4.7		SG-STOPPER RING47	BCDI13125	
φ5.2		SG-STOPPER RING52	BCDI13126	

SGティッシュパンチ

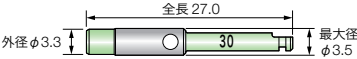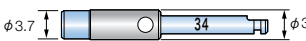インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.0		SG-T PUNCH30	BCDI13130	¥7,200
φ3.2		SG-T PUNCH32	BCDI13131	
φ3.4		SG-T PUNCH34	BCDI13132	
φ3.7		SG-T PUNCH37	BCDI13133	
φ4.2		SG-T PUNCH42	BCDI13134	
φ4.7		SG-T PUNCH47	BCDI13135	
φ5.2		SG-T PUNCH52	BCDI13136	

SGパイロットドリル

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.0		SG-PILOTDRILL30-SH9	BCDI13150	
		SG-PILOTDRILL30-SH11	BCDI13151 ※	
		SG-PILOTDRILL30-SH13	BCDI13152 ※	
φ3.2		SG-PILOTDRILL32-SH9	BCDI13153	
		SG-PILOTDRILL32-SH11	BCDI13154 ※	
		SG-PILOTDRILL32-SH13	BCDI13155 ※	
φ3.4		SG-PILOTDRILL34-SH9	BCDI13156	
		SG-PILOTDRILL34-SH11	BCDI13157 ※	
		SG-PILOTDRILL34-SH13	BCDI13158 ※	
φ3.7		SG-PILOTDRILL37-SH9	BCDI13159	
		SG-PILOTDRILL37-SH11	BCDI13160 ※	¥9,000
		SG-PILOTDRILL37-SH13	BCDI13161 ※	
φ4.2		SG-PILOTDRILL42-SH9	BCDI13162	
		SG-PILOTDRILL42-SH11	BCDI13163 ※	
		SG-PILOTDRILL42-SH13	BCDI13164 ※	
φ4.7		SG-PILOTDRILL47-SH9	BCDI13165	
		SG-PILOTDRILL47-SH11	BCDI13166 ※	
		SG-PILOTDRILL47-SH13	BCDI13167 ※	
φ5.2		SG-PILOTDRILL52-SH9	BCDI13168	
		SG-PILOTDRILL52-SH11	BCDI13169 ※	
		SG-PILOTDRILL52-SH13	BCDI13170 ※	















SGステップドリル

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ4.2		SG-STEPDRL42-SH9	BCDI13180	
		SG-STEPDRL42-SH11	BCDI13181 ※	
		SG-STEPDRL42-SH13	BCDI13182 ※	
φ4.7		SG-STEPDRL47-SH9	BCDI13183	
		SG-STEPDRL47-SH11	BCDI13184 ※	
		SG-STEPDRL47-SH13	BCDI13185 ※	
φ5.2 (#1)		SG-STEPDRL52-SH9#1	BCDI13186	¥10,000
		SG-STEPDRL52-SH11#1	BCDI13187 ※	
		SG-STEPDRL52-SH13#1	BCDI13188 ※	
φ5.2 (#2)		SG-STEPDRL52-SH9#2	BCDI13189	
		SG-STEPDRL52-SH11#2	BCDI13190 ※	
		SG-STEPDRL52-SH13#2	BCDI13191 ※	

※受注生産品












SGファイナルドリルST

Straight type 

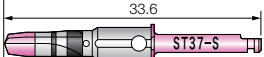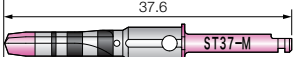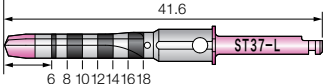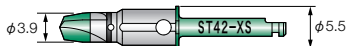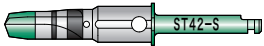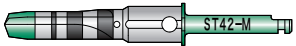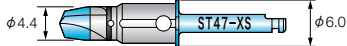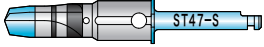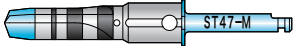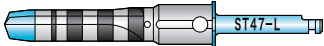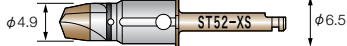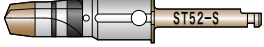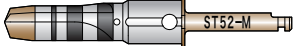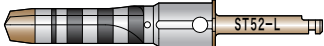インプラント径 (単位: mm)	寸法・形状 (単位: mm)	商品名	商品コード	希望小売価格 (税別)
φ3.7		SG-FINALDRL37-ST-XS	BCDI13230	
		SG-FINALDRL37-ST-S	BCDI13231	
		SG-FINALDRL37-ST-M	BCDI13232	
		SG-FINALDRL37-ST-L	BCDI13233	
φ4.2		SG-FINALDRL42-ST-XS	BCDI13234	
		SG-FINALDRL42-ST-S	BCDI13235	
		SG-FINALDRL42-ST-M	BCDI13236	
		SG-FINALDRL42-ST-L	BCDI13237	¥10,000
φ4.7		SG-FINALDRL47-ST-XS	BCDI13238	
		SG-FINALDRL47-ST-S	BCDI13239	
		SG-FINALDRL47-ST-M	BCDI13240	
		SG-FINALDRL47-ST-L	BCDI13241	
φ5.2		SG-FINALDRL52-ST-XS	BCDI13242	
		SG-FINALDRL52-ST-S	BCDI13243	
		SG-FINALDRL52-ST-M	BCDI13244	
		SG-FINALDRL52-ST-L	BCDI13245	






SGタップフォーマーST

Straight type 

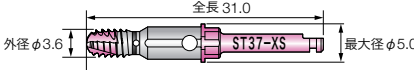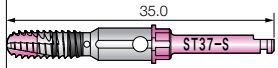
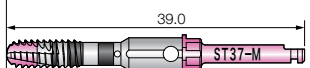
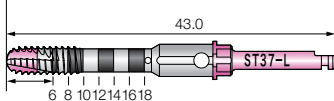
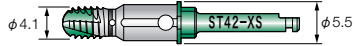
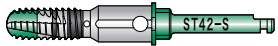
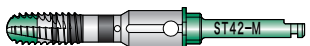
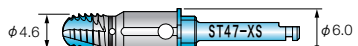
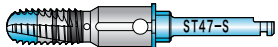
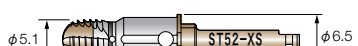
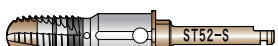
インプラント径 (単位: mm)	寸法・形状 (単位: mm)	商品名	商品コード	希望小売価格 (税別)
φ3.7		SG-T FORMER37-ST-XS	BCDI13280	¥10,000
		SG-T FORMER37-ST-S	BCDI13281	
		SG-T FORMER37-ST-M	BCDI13282	
		SG-T FORMER37-ST-L	BCDI13283	
φ4.2		SG-T FORMER42-ST-XS	BCDI13284	
		SG-T FORMER42-ST-S	BCDI13285	
		SG-T FORMER42-ST-M	BCDI13286	
		SG-T FORMER42-ST-L	BCDI13287	
φ4.7		SG-T FORMER47-ST-XS	BCDI13288	
		SG-T FORMER47-ST-S	BCDI13289	
		SG-T FORMER47-ST-M	BCDI13290	
		SG-T FORMER47-ST-L	BCDI13291	
φ5.2		SG-T FORMER52-ST-XS	BCDI13292	
		SG-T FORMER52-ST-S	BCDI13293	
		SG-T FORMER52-ST-M	BCDI13294	
		SG-T FORMER52-ST-L	BCDI13295	

SGガイドアンカーST

Straight type 

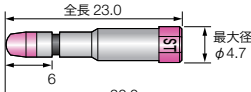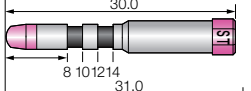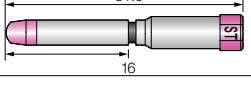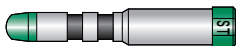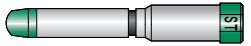インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.7		SG-ANCHOR37-ST-S	BCDI13320	¥9,000
		SG-ANCHOR37-ST-M	BCDI13321	
		SG-ANCHOR37-ST-L	BCDI13322	
φ4.2		SG-ANCHOR42-ST-S	BCDI13323	
		SG-ANCHOR42-ST-M	BCDI13324	
		SG-ANCHOR42-ST-L	BCDI13325	
φ4.7		SG-ANCHOR47-ST-S	BCDI13326	
		SG-ANCHOR47-ST-M	BCDI13327	
		SG-ANCHOR47-ST-L	BCDI13328	
φ5.2		SG-ANCHOR52-ST-S	BCDI13329	
		SG-ANCHOR52-ST-M	BCDI13330	
		SG-ANCHOR52-ST-L	BCDI13331	

SG BLインプラントドライバー

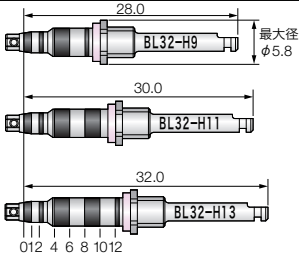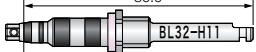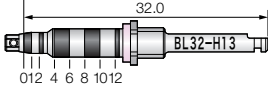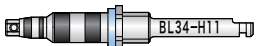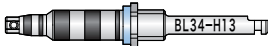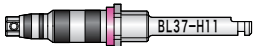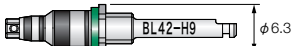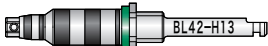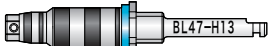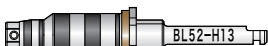インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.2		SGBL-I DRIVER32-SH9	BCDI13340	¥17,000
		SGBL-I DRIVER32-SH11	BCDI13341 ※	
		SGBL-I DRIVER32-SH13	BCDI13342 ※	
φ3.4		SGBL-I DRIVER34-SH9	BCDI13343	
		SGBL-I DRIVER34-SH11	BCDI13344 ※	
		SGBL-I DRIVER34-SH13	BCDI13345 ※	
φ3.7		SGBL-I DRIVER37-SH9	BCDI13346	
		SGBL-I DRIVER37-SH11	BCDI13347 ※	
		SGBL-I DRIVER37-SH13	BCDI13348 ※	
φ4.2		SGBL-I DRIVER42-SH9	BCDI13349	
		SGBL-I DRIVER42-SH11	BCDI13350 ※	
		SGBL-I DRIVER42-SH13	BCDI13351 ※	
φ4.7		SGBL-I DRIVER47-SH9	BCDI13352	
		SGBL-I DRIVER47-SH11	BCDI13353 ※	
		SGBL-I DRIVER47-SH13	BCDI13354 ※	
φ5.2		SGBL-I DRIVER52-SH9	BCDI13355	
		SGBL-I DRIVER52-SH11	BCDI13356 ※	
		SGBL-I DRIVER52-SH13	BCDI13357 ※	

※受注生産品

SG BLインプラントドライバー-WH

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.2		SGBL-I DRIVER32-WH9	BCDI13411	¥24,000
		SGBL-I DRIVER32-WH11	BCDI13412	
		SGBL-I DRIVER32-WH13	BCDI13413	
φ3.4		SGBL-I DRIVER34-WH9	BCDI13414	
		SGBL-I DRIVER34-WH11	BCDI13415	
		SGBL-I DRIVER34-WH13	BCDI13416	
φ3.7		SGBL-I DRIVER37-WH9	BCDI13417	
		SGBL-I DRIVER37-WH11	BCDI13418	
		SGBL-I DRIVER37-WH13	BCDI13419	
φ4.2		SGBL-I DRIVER42-WH9	BCDI13420	
		SGBL-I DRIVER42-WH11	BCDI13421	
		SGBL-I DRIVER42-WH13	BCDI13422	
φ4.7		SGBL-I DRIVER47-WH9	BCDI13423	
		SGBL-I DRIVER47-WH11	BCDI13424	
		SGBL-I DRIVER47-WH13	BCDI13425	
φ5.2		SGBL-I DRIVER52-WH9	BCDI13426	
		SGBL-I DRIVER52-WH11	BCDI13427	
		SGBL-I DRIVER52-WH13	BCDI13428	

ケース関連


	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
	TITANIUM TRAY	BCDI13400	¥5,000
	F-SG-SURGICAL CASE	BCDI13390	¥49,000



TITANIUM TRAY



F-SG-SURGICAL CASE

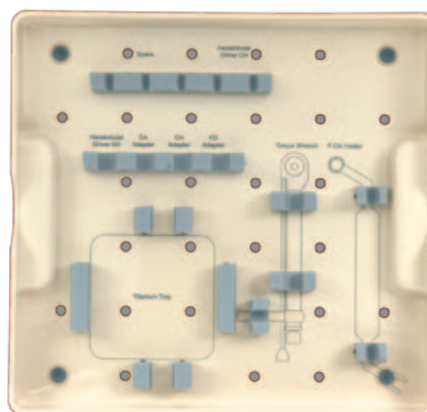

NOTES

NOTES

NOTES



京セラ株式会社

メディカル事業部 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

本 社 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地 〒612-8501
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 1・Sビル 〒140-8810
Tel:03-5782-7018 Fax:03-5782-8518

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

名古屋営業所 名古屋市東区葵3丁目15-31(住友生命千種ニュータービル6F) 〒461-0004
Tel:052-930-1480 Fax:052-938-1388

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト7F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.finesia.world

FINESIA サージカルガイドシステム器具【医療機器届出番号：27B1X00139101123】

「FINESIA」は、京セラ株式会社の登録商標です。

当術式マニュアルに記載の情報は2019年9月時点のものです。