



FINESIA®
Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type  術式チャート

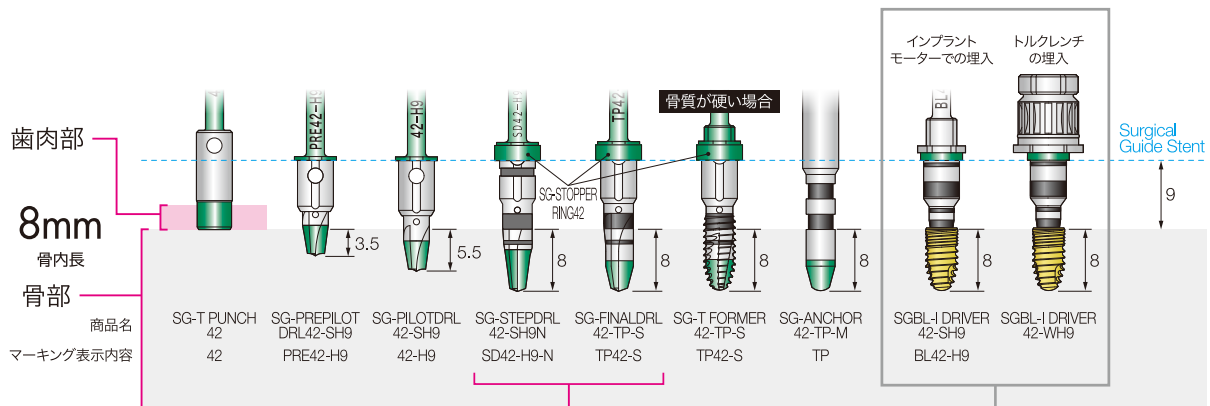
FINESIA® Surgical Guide System

Tapered type



術式チャートの見方

(例) サージカルガイドステント高さ 9mm、インプラント径 $\phi 4.2$ mm、骨内長 8 mm、Tapered typeの場合



SGステップドリル、SGファイナルドリルTPの記載寸法は、ドリルに対応するインプラント長です。

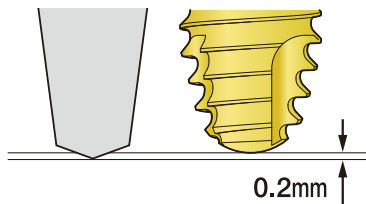
骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER *SH*タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER *-WH*タイプを選択することができます (ただし、インプラント径 $\phi 3.0$ mmには、どちらのドライバーも用意されていません)。

ドリル先端仕様

SGステップドリル、SGファイナルドリルTPのドリルの刃長は、インプラント体よりも下記のように長く設定されています。

SGステップドリル


$\phi 4.2$ mm $\phi 4.7$ mm $\phi 5.2$ mm → 0.2mm長い



SGファイナルドリルTP

$\phi 3.0$ mm $\phi 3.2$ mm $\phi 3.4$ mm $\phi 3.7$ mm → 0.1mm長い

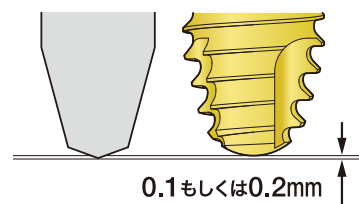$\phi 4.2$ mm $\phi 4.7$ mm $\phi 5.2$ mm → 0.2mm長い



サージカルガイドシステム高さ 9mm

FINESIA®
Surgical Guide System
Operative Procedure Chart

Tapered type  術式チャート

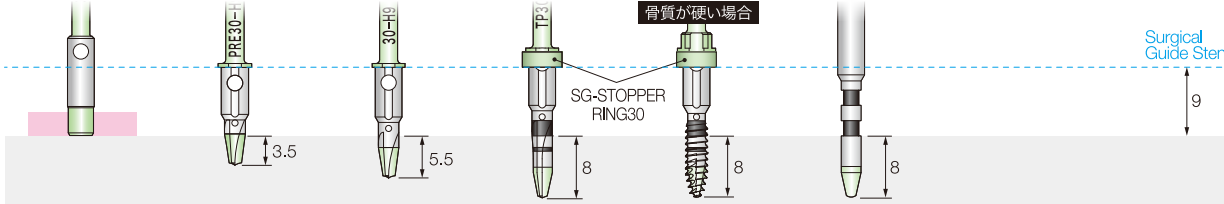
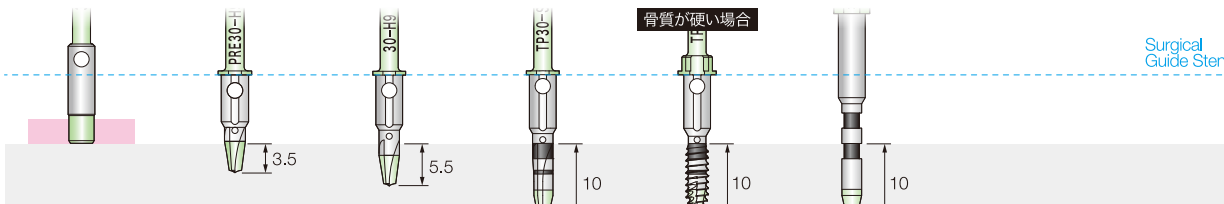
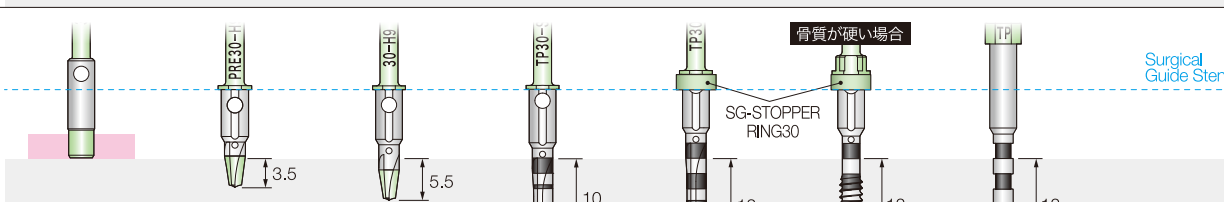
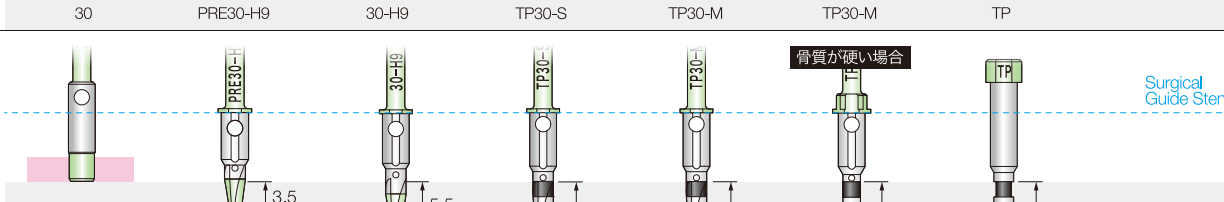
9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.0\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm 骨内長							Surgical Guide Stent 9
	SG-T PUNCH 30 30	SG-PREPILOT DRL30-SH9 PRE30-H9	SG-PILOTDRILL 30-SH9 30-H9	SG-FINALDRILL 30-TP-S TP30-S	SG-T FORMER 30-TP-S TP30-S	SG-ANCHOR 30-TP-M TP	
10mm 骨内長							Surgical Guide Stent 10
	SG-T PUNCH 30 30	SG-PREPILOT DRL30-SH9 PRE30-H9	SG-PILOTDRILL 30-SH9 30-H9	SG-FINALDRILL 30-TP-S TP30-S	SG-T FORMER 30-TP-S TP30-S	SG-ANCHOR 30-TP-M TP	
12mm 骨内長							Surgical Guide Stent 12
	SG-T PUNCH 30 30	SG-PREPILOT DRL30-SH9 PRE30-H9	SG-PILOTDRILL 30-SH9 30-H9	SG-FINALDRILL 30-TP-S TP30-S	SG-FINALDRILL 30-TP-M TP30-M	SG-T FORMER 30-TP-M TP30-M	
14mm 骨内長							Surgical Guide Stent 14
	SG-T PUNCH 30 30	SG-PREPILOT DRL30-SH9 PRE30-H9	SG-PILOTDRILL 30-SH9 30-H9	SG-FINALDRILL 30-TP-S TP30-S	SG-FINALDRILL 30-TP-M TP30-M	SG-T FORMER 30-TP-M TP30-M	

1P: 1Piece

単位 :mm

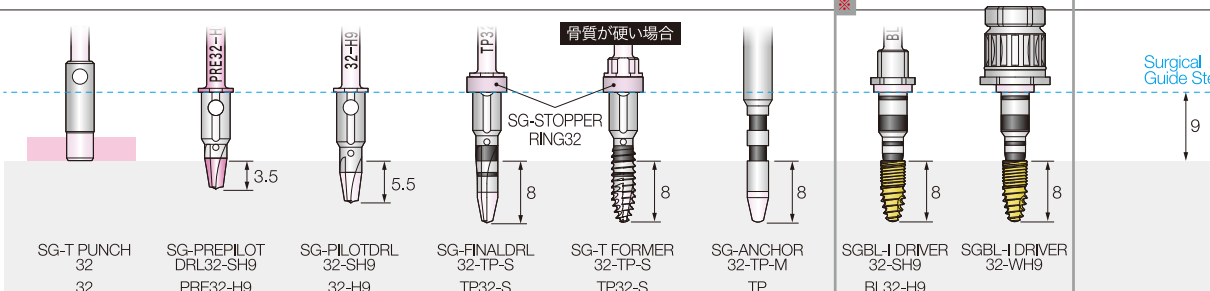
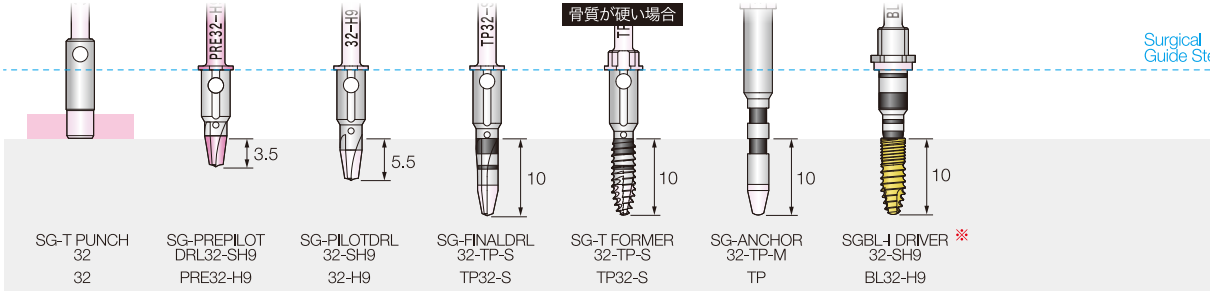
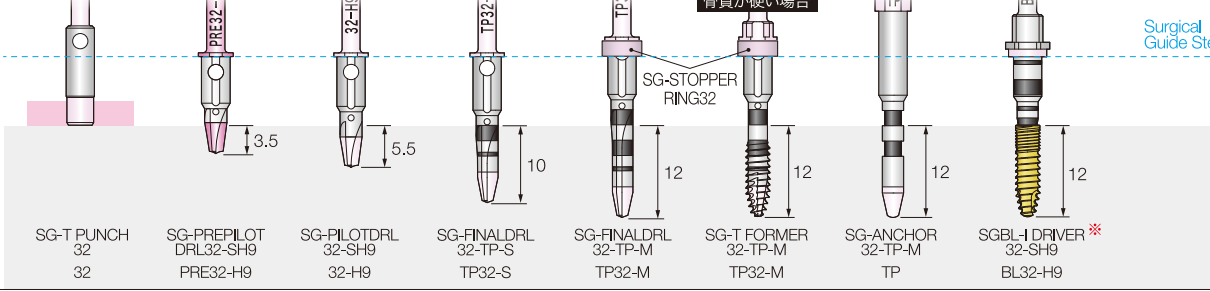
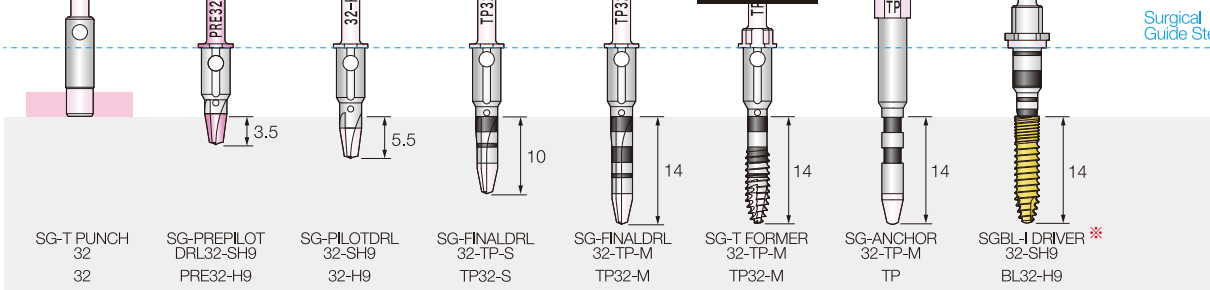
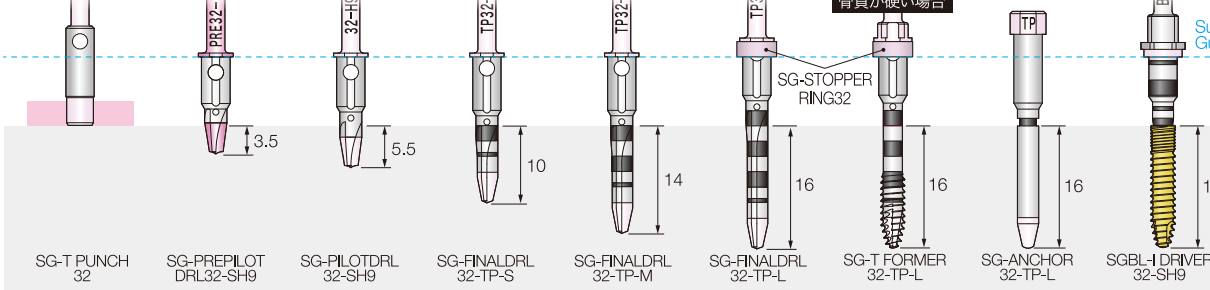
9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.2\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm 骨内長									
	商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PREPILOT DRL32-SH9 PRE32-H9	SG-PILOTDRILL 32-SH9 32-H9	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-T FORMER 32-TP-S TP32-S	SG-ANCHOR 32-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 32-SH9 BL32-H9	SGBL-I DRIVER 32-WH9
10mm 骨内長									
	商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PREPILOT DRL32-SH9 PRE32-H9	SG-PILOTDRILL 32-SH9 32-H9	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-T FORMER 32-TP-S TP32-S	SG-ANCHOR 32-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 32-SH9 BL32-H9	
12mm 骨内長									
	商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PREPILOT DRL32-SH9 PRE32-H9	SG-PILOTDRILL 32-SH9 32-H9	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-FINALDRILL 32-TP-M TP32-M	SG-T FORMER 32-TP-M TP32-M	SG-ANCHOR 32-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 32-SH9 BL32-H9
14mm 骨内長									
	商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PREPILOT DRL32-SH9 PRE32-H9	SG-PILOTDRILL 32-SH9 32-H9	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-FINALDRILL 32-TP-M TP32-M	SG-T FORMER 32-TP-M TP32-M	SG-ANCHOR 32-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 32-SH9 BL32-H9
16mm 骨内長									
	商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PREPILOT DRL32-SH9 PRE32-H9	SG-PILOTDRILL 32-SH9 32-H9	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-FINALDRILL 32-TP-M TP32-M	SG-FINALDRILL 32-TP-L TP32-L	SG-T FORMER 32-TP-L TP32-L	SG-ANCHOR 32-TP-L TP

1P: 1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH9タイプを選択することができます。

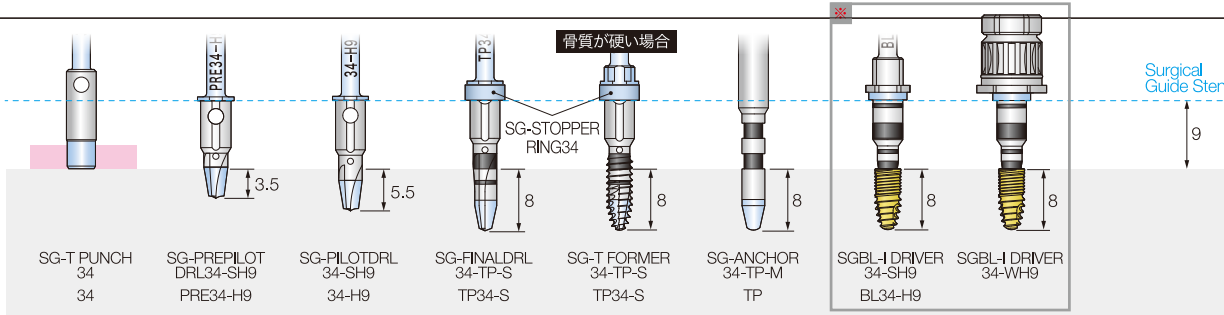
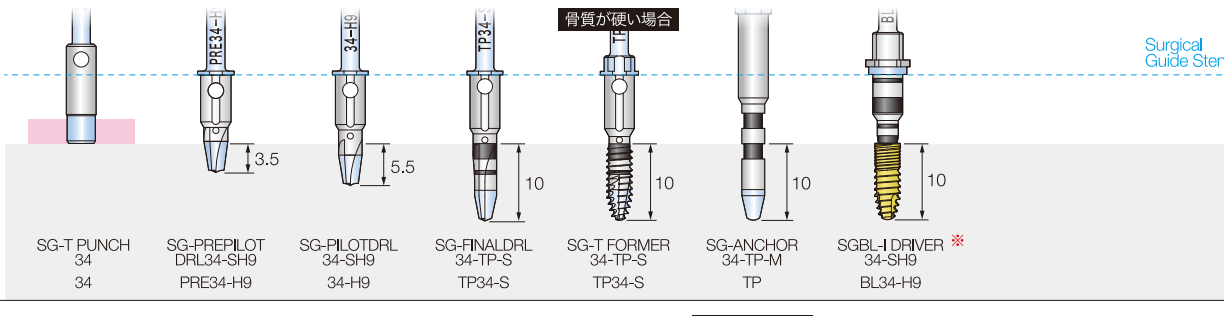
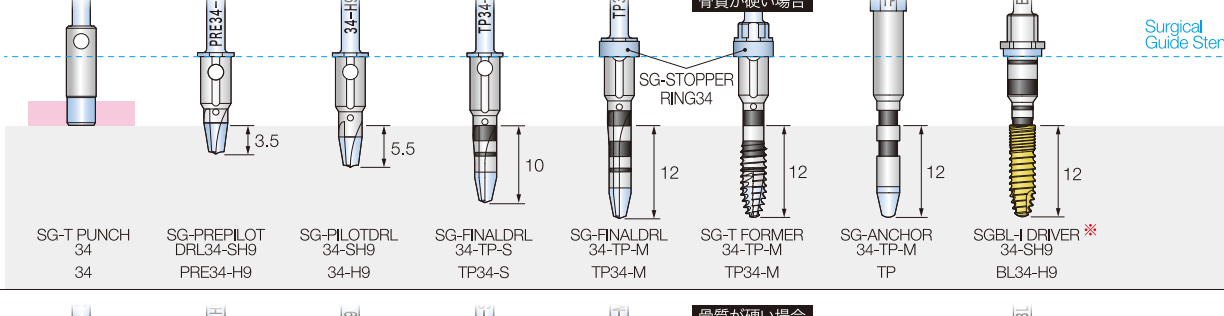
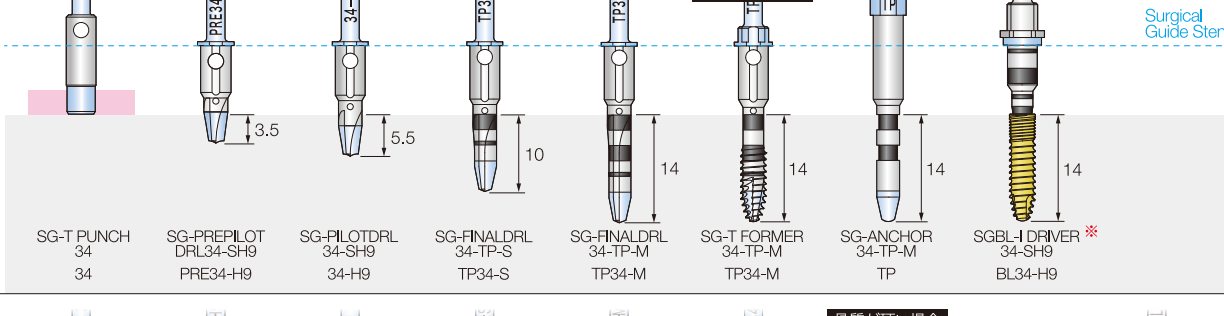
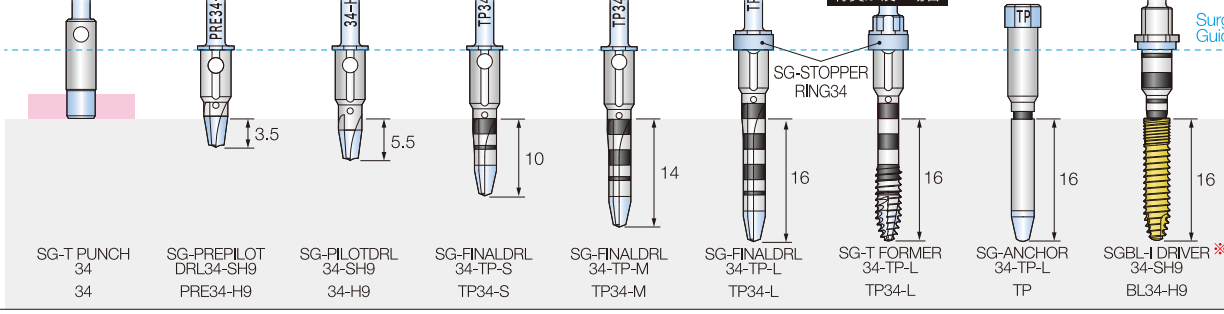
9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.4\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm 骨内長								
	SG-T PUNCH 34	SG-PREPILOT DRL34-SH9 PRE34-H9	SG-PILOTDRILL 34-SH9 34-H9	SG-FINALDRILL 34-TP-S TP34-S	SG-T FORMER 34-TP-S TP34-S	SG-ANCHOR 34-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 34-SH9 BL34-H9	SGBL-I DRIVER 34-WH9
10mm 骨内長								
	SG-T PUNCH 34	SG-PREPILOT DRL34-SH9 PRE34-H9	SG-PILOTDRILL 34-SH9 34-H9	SG-FINALDRILL 34-TP-S TP34-S	SG-T FORMER 34-TP-S TP34-S	SG-ANCHOR 34-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 34-SH9	SGBL-I DRIVER 34-WH9
12mm 骨内長								
	SG-T PUNCH 34	SG-PREPILOT DRL34-SH9 PRE34-H9	SG-PILOTDRILL 34-SH9 34-H9	SG-FINALDRILL 34-TP-S TP34-S	SG-FINALDRILL 34-TP-M TP34-M	SG-T FORMER 34-TP-M TP34-M	SG-ANCHOR 34-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 34-SH9 BL34-H9
14mm 骨内長								
	SG-T PUNCH 34	SG-PREPILOT DRL34-SH9 PRE34-H9	SG-PILOTDRILL 34-SH9 34-H9	SG-FINALDRILL 34-TP-S TP34-S	SG-FINALDRILL 34-TP-M TP34-M	SG-T FORMER 34-TP-M TP34-M	SG-ANCHOR 34-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 34-SH9 BL34-H9
16mm 骨内長								
	SG-T PUNCH 34	SG-PREPILOT DRL34-SH9 PRE34-H9	SG-PILOTDRILL 34-SH9 34-H9	SG-FINALDRILL 34-TP-S TP34-S	SG-FINALDRILL 34-TP-M TP34-M	SG-FINALDRILL 34-TP-L TP34-L	SG-T FORMER 34-TP-L TP34-L	SG-ANCHOR 34-TP-L TP

1P: 1Piece

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH9タイプを選択することができます。

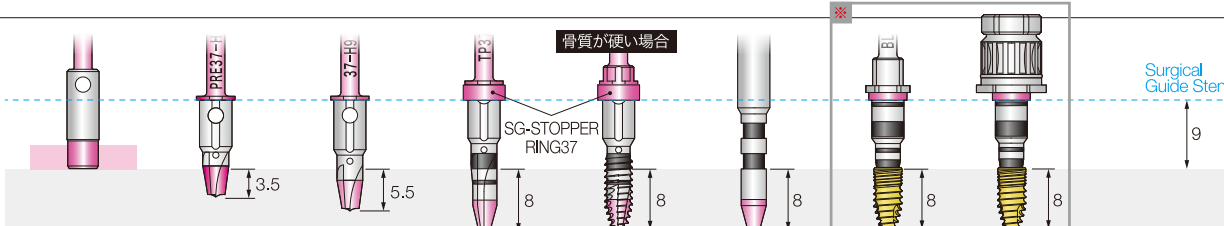
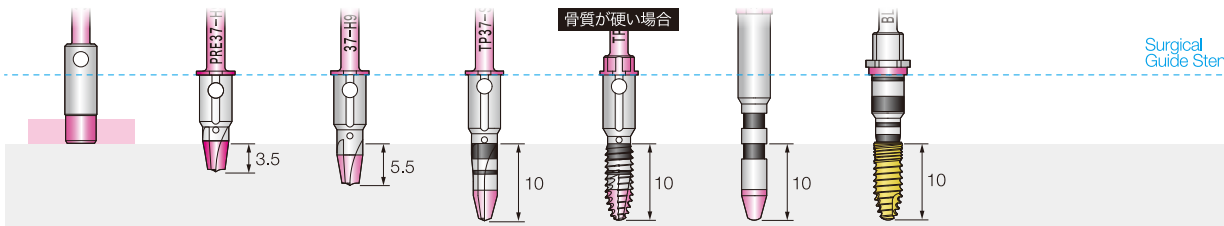
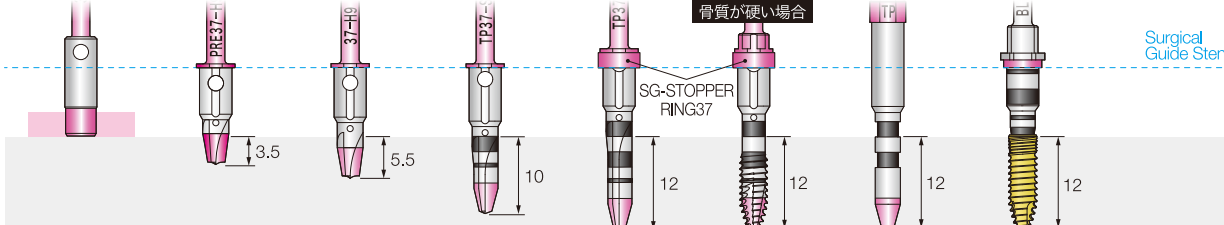
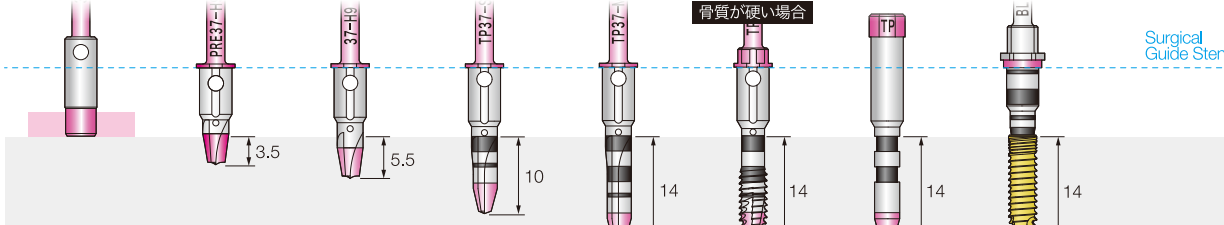
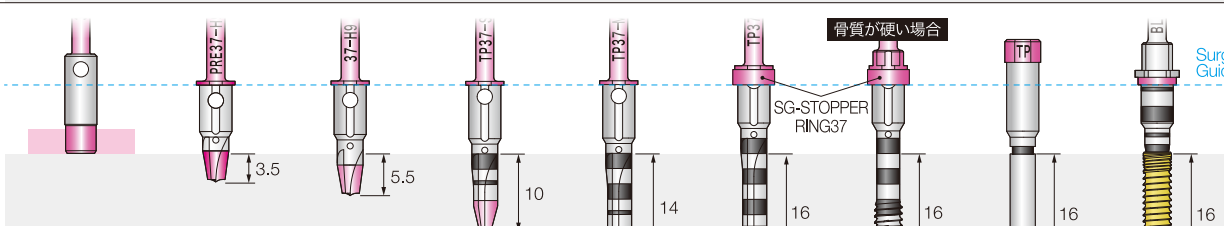
9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm 骨内長								
	SG-T PUNCH 37	SG-PREPILOT DRL37-SH9 PRE37-H9	SG-PILOTDRILL 37-SH9 37-H9	SG-FINALDRILL 37-TP-S TP37-S	SG-T FORMER 37-TP-S TP37-S	SG-ANCHOR 37-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 37-SH9 BL37-H9	SGBL-I DRIVER 37-WH9
10mm 骨内長								
	SG-T PUNCH 37	SG-PREPILOT DRL37-SH9 PRE37-H9	SG-PILOTDRILL 37-SH9 37-H9	SG-FINALDRILL 37-TP-S TP37-S	SG-T FORMER 37-TP-S TP37-S	SG-ANCHOR 37-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 37-SH9 BL37-H9	SGBL-I DRIVER 37-WH9
12mm 骨内長								
	SG-T PUNCH 37	SG-PREPILOT DRL37-SH9 PRE37-H9	SG-PILOTDRILL 37-SH9 37-H9	SG-FINALDRILL 37-TP-S TP37-S	SG-FINALDRILL 37-TP-M TP37-M	SG-T FORMER 37-TP-M TP37-M	SG-ANCHOR 37-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 37-SH9 BL37-H9
14mm 骨内長								
	SG-T PUNCH 37	SG-PREPILOT DRL37-SH9 PRE37-H9	SG-PILOTDRILL 37-SH9 37-H9	SG-FINALDRILL 37-TP-S TP37-S	SG-FINALDRILL 37-TP-M TP37-M	SG-T FORMER 37-TP-M TP37-M	SG-ANCHOR 37-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 37-SH9 BL37-H9
16mm 骨内長								
	SG-T PUNCH 37	SG-PREPILOT DRL37-SH9 PRE37-H9	SG-PILOTDRILL 37-SH9 37-H9	SG-FINALDRILL 37-TP-S TP37-S	SG-FINALDRILL 37-TP-M TP37-M	SG-FINALDRILL 37-TP-L TP37-L	SG-T FORMER 37-TP-L TP37-L	SG-ANCHOR 37-TP-L TP

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH9タイプを選択することができます。

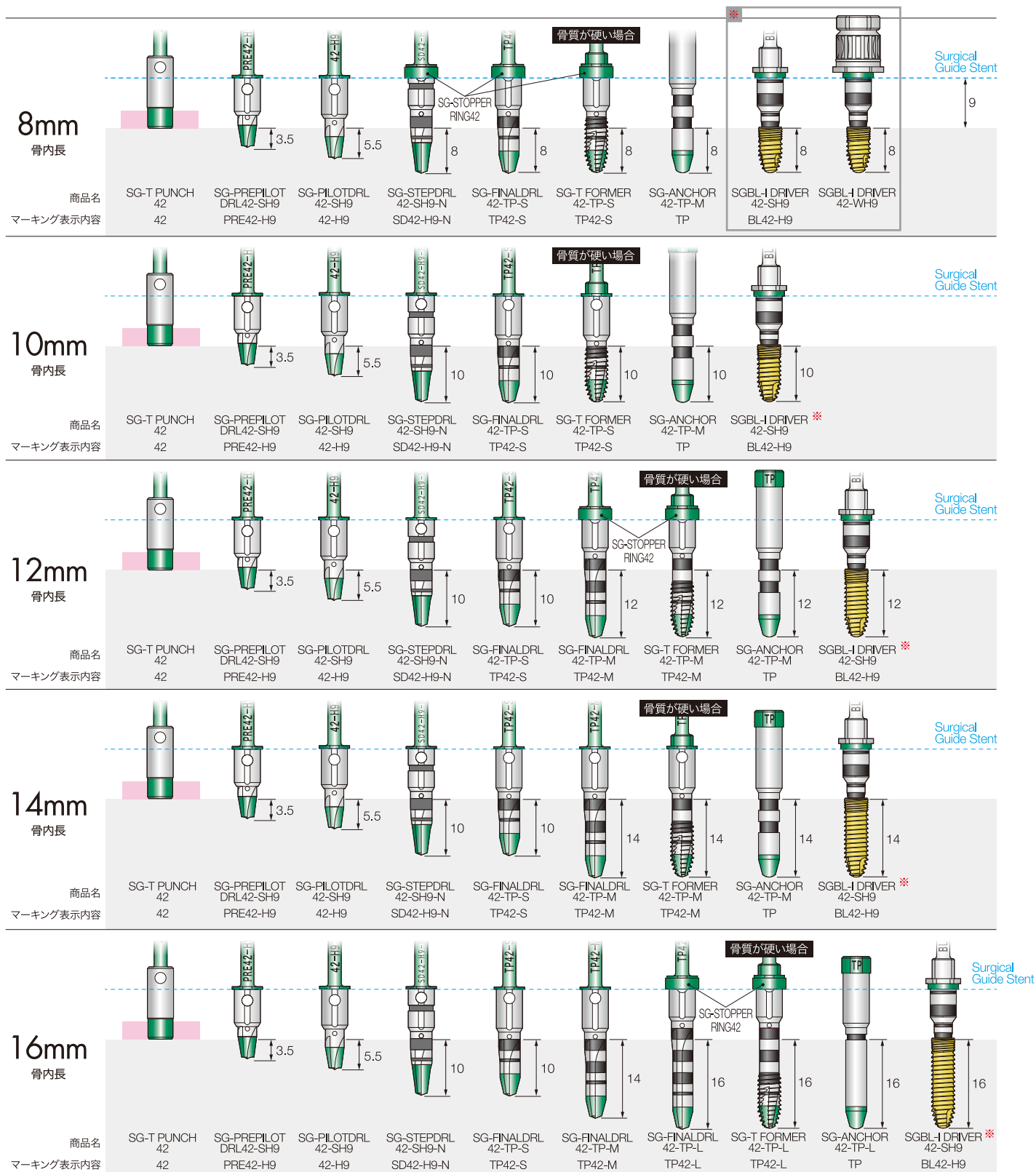
9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH9タイプを選択することができます。

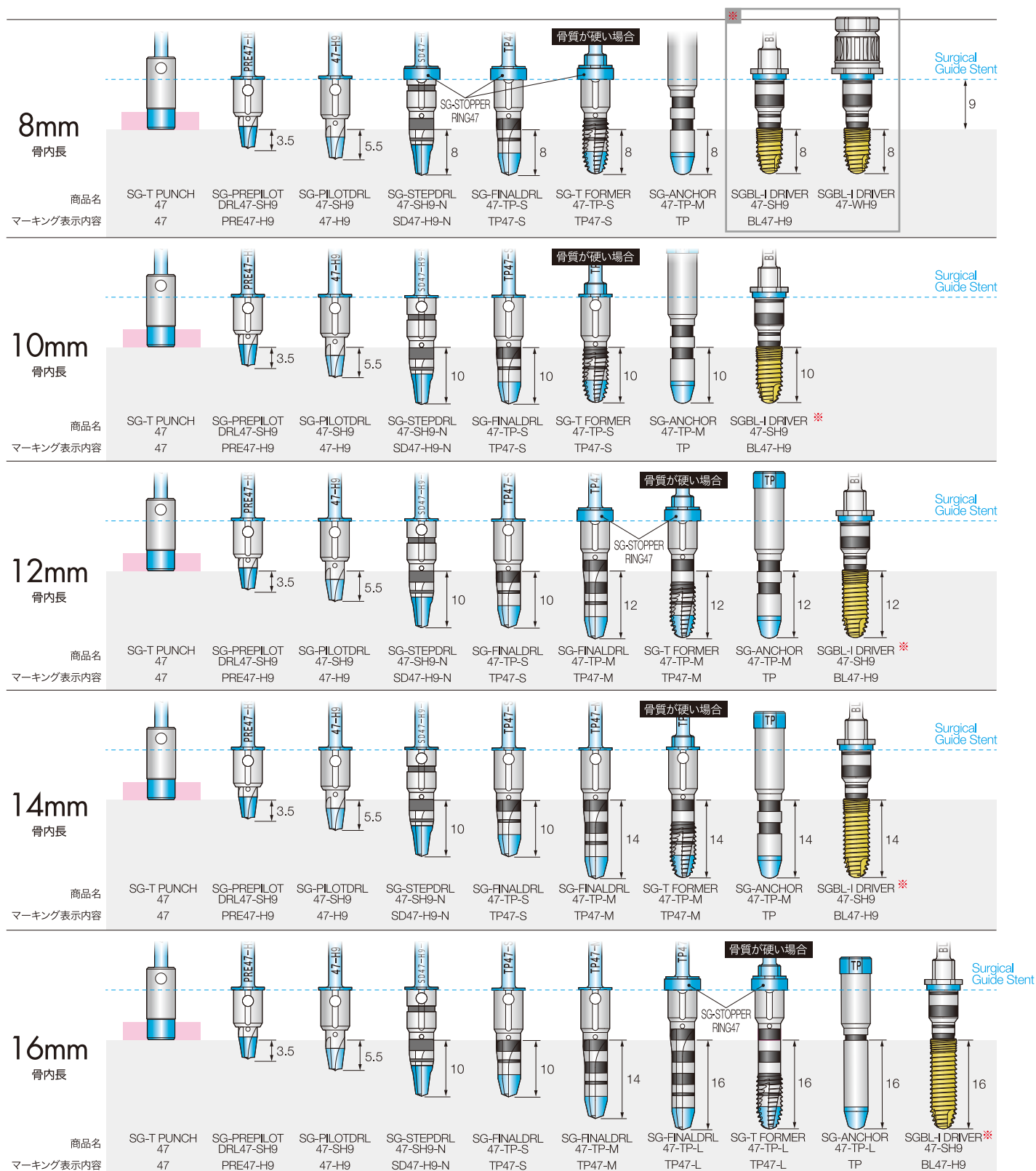
9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH9タイプを選択することができます。

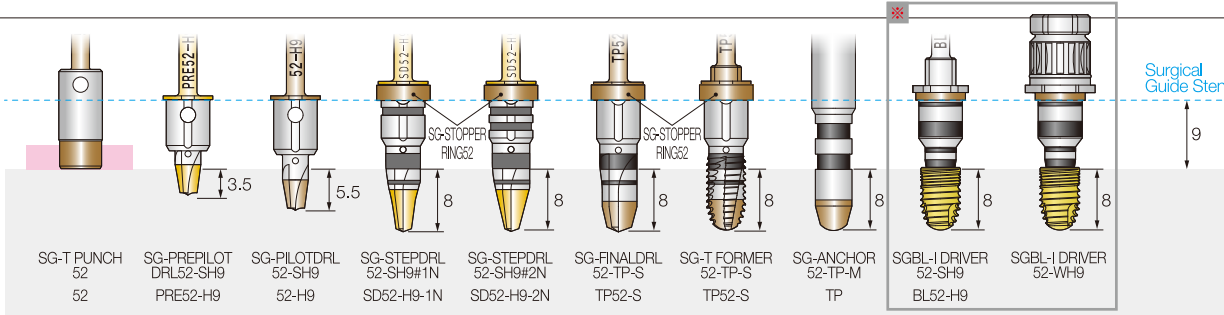
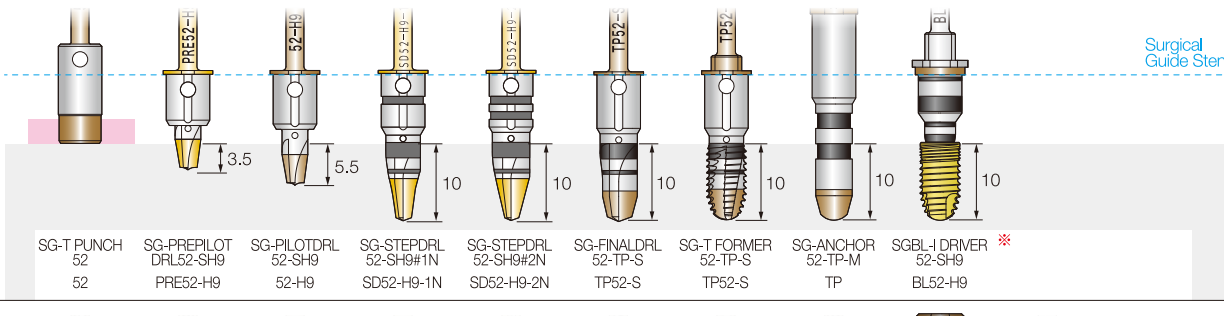
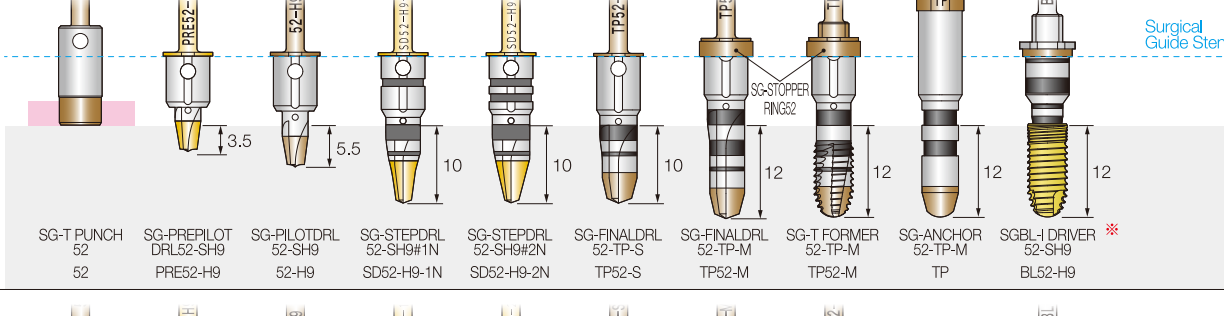
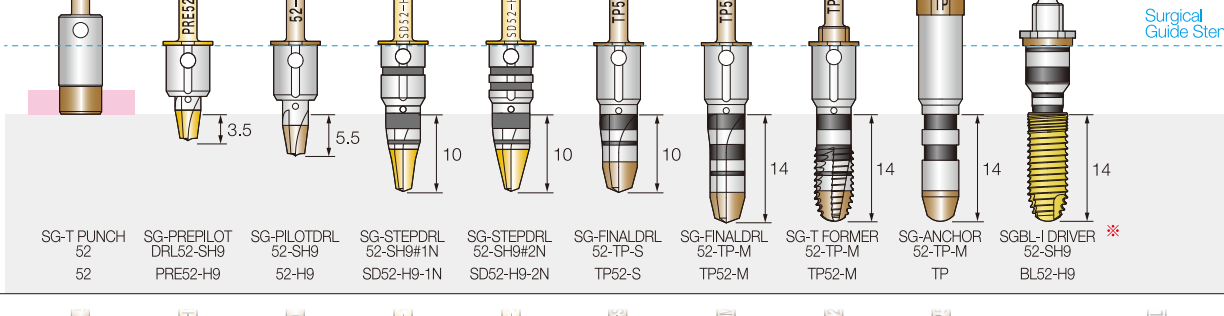
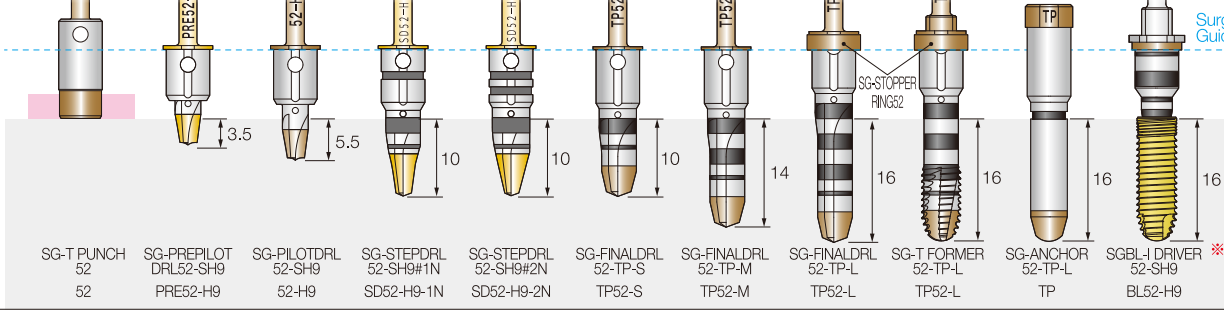
9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm 骨内長										
	商品名	SG-T PUNCH 52	SG-PREPILOT DRL52-SH9	SG-PILOTDRILL 52-SH9	SG-STEPDRILL 52-SH9#1N	SG-STEPDRILL 52-SH9#2N	SG-FINALDRILL 52-TP-S	SG-T FORMER 52-TP-S	SG-ANCHOR 52-TP-M	SGBL-I DRIVER 52-SH9
10mm 骨内長										
	商品名	SG-T PUNCH 52	SG-PREPILOT DRL52-SH9	SG-PILOTDRILL 52-SH9	SG-STEPDRILL 52-SH9#1N	SG-STEPDRILL 52-SH9#2N	SG-FINALDRILL 52-TP-S	SG-T FORMER 52-TP-S	SG-ANCHOR 52-TP-M	SGBL-I DRIVER 52-SH9
12mm 骨内長										
	商品名	SG-T PUNCH 52	SG-PREPILOT DRL52-SH9	SG-PILOTDRILL 52-SH9	SG-STEPDRILL 52-SH9#1N	SG-STEPDRILL 52-SH9#2N	SG-FINALDRILL 52-TP-S	SG-FINALDRILL 52-TP-M	SG-T FORMER 52-TP-M	SGBL-I DRIVER 52-SH9
14mm 骨内長										
	商品名	SG-T PUNCH 52	SG-PREPILOT DRL52-SH9	SG-PILOTDRILL 52-SH9	SG-STEPDRILL 52-SH9#1N	SG-STEPDRILL 52-SH9#2N	SG-FINALDRILL 52-TP-S	SG-FINALDRILL 52-TP-M	SG-T FORMER 52-TP-M	SGBL-I DRIVER 52-SH9
16mm 骨内長										
	商品名	SG-T PUNCH 52	SG-PREPILOT DRL52-SH9	SG-PILOTDRILL 52-SH9	SG-STEPDRILL 52-SH9#1N	SG-STEPDRILL 52-SH9#2N	SG-FINALDRILL 52-TP-S	SG-FINALDRILL 52-TP-M	SG-FINALDRILL 52-TP-L	SGBL-I DRIVER 52-SH9

TL : Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH9タイプを選択することができます。

サージカルガイドステント高さ **11 mm**

FINESIA®
Surgical Guide System
Operative Procedure Chart

Tapered type  術式チャート

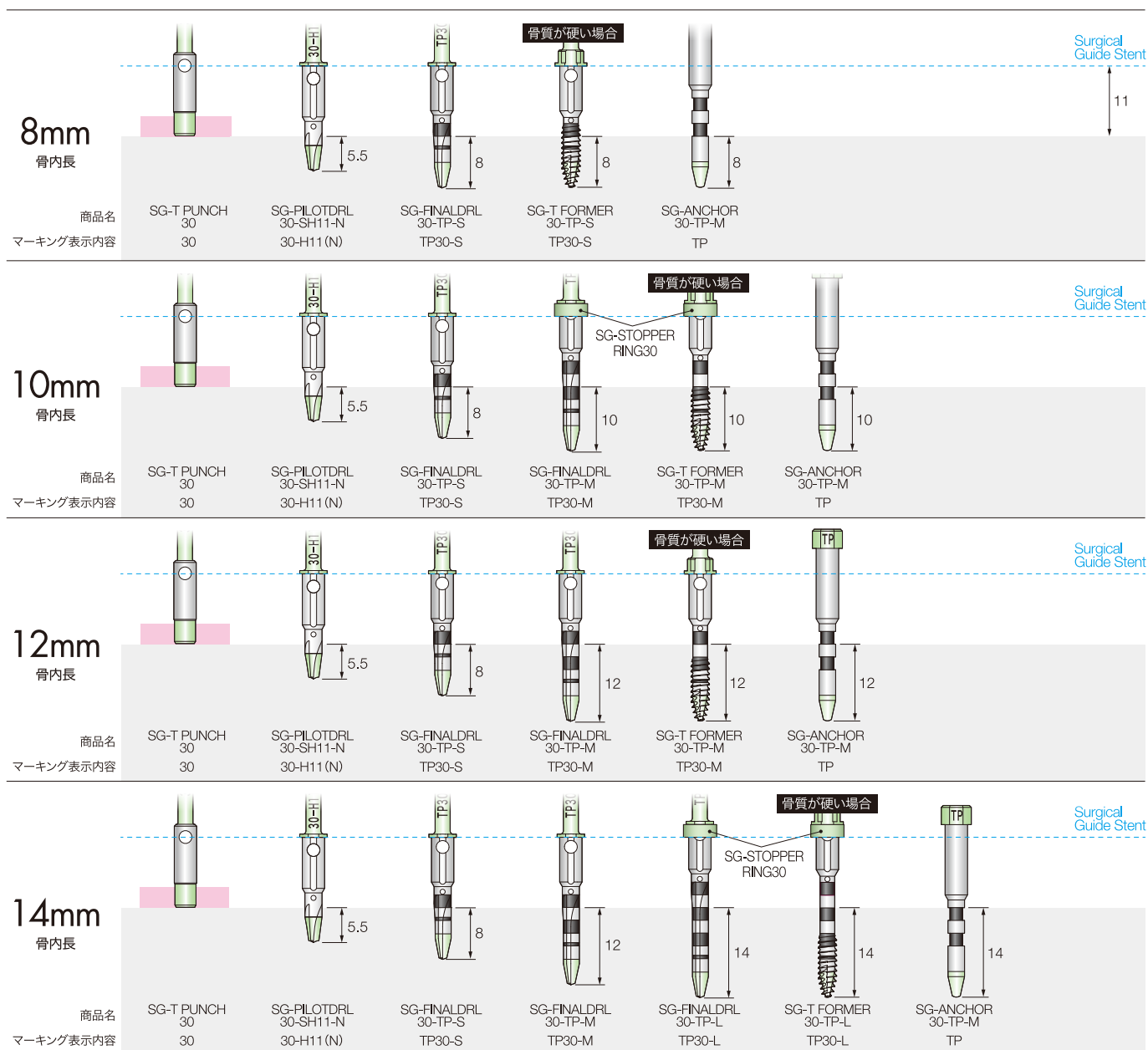
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.0\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1 Piece

単位 :mm

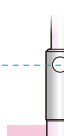
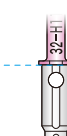
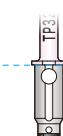
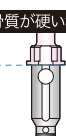
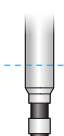
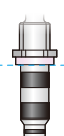
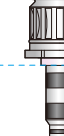
11mm
サージカルガイドシステム







FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート





Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.2\text{mm}$







1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm 骨内長								Surgical Guide Stent 11	
	商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PILOTDRILL 32-SH11-N 32-H11 (N)	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-T FORMER 32-TP-S TP32-S	SG-ANCHOR 32-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 32-SH11 BL32-H11		SGBL-I DRIVER 32-WH11 BL32-H11
	マーキング表示内容	32	32	TP32-S	TP32-S	TP	BL32-H11		

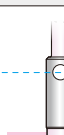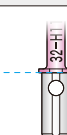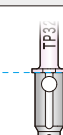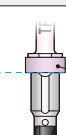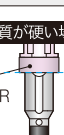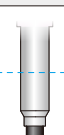10mm 骨内長								Surgical Guide Stent	
	商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PILOTDRILL 32-SH11-N 32-H11 (N)	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-FINALDRILL 32-TP-M TP32-M	SG-T FORMER 32-TP-M TP32-M	SG-ANCHOR 32-TP-M TP		SGBL-I DRIVER 32-SH11 BL32-H11
	マーキング表示内容	32	32	TP32-S	TP32-M	TP32-M	TP		BL32-H11

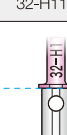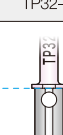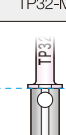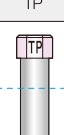12mm 骨内長								Surgical Guide Stent	
	商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PILOTDRILL 32-SH11-N 32-H11 (N)	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-FINALDRILL 32-TP-M TP32-M	SG-T FORMER 32-TP-M TP32-M	SG-ANCHOR 32-TP-M TP		SGBL-I DRIVER 32-SH11 BL32-H11
	マーキング表示内容	32	32	TP32-S	TP32-M	TP32-M	TP		BL32-H11

14mm 骨内長									Surgical Guide Stent	
	商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PILOTDRILL 32-SH11-N 32-H11 (N)	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-FINALDRILL 32-TP-M TP32-M	SG-FINALDRILL 32-TP-L TP32-L	SG-T FORMER 32-TP-L TP32-L	SG-ANCHOR 32-TP-M TP		SGBL-I DRIVER 32-SH11 BL32-H11
	マーキング表示内容	32	32	TP32-S	TP32-M	TP32-L	TP32-L	TP		BL32-H11

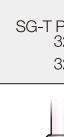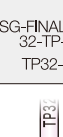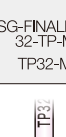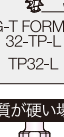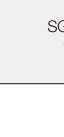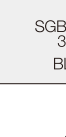16mm 骨内長									Surgical Guide Stent	
	商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PILOTDRILL 32-SH11-N 32-H11 (N)	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-FINALDRILL 32-TP-M TP32-M	SG-FINALDRILL 32-TP-L TP32-L	SG-T FORMER 32-TP-L TP32-L	SG-ANCHOR 32-TP-L TP		SGBL-I DRIVER 32-SH11 BL32-H11
	マーキング表示内容	32	32	TP32-S	TP32-M	TP32-L	TP32-L	TP		BL32-H11

1P: 1Piece

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH11タイプを選択することができます。

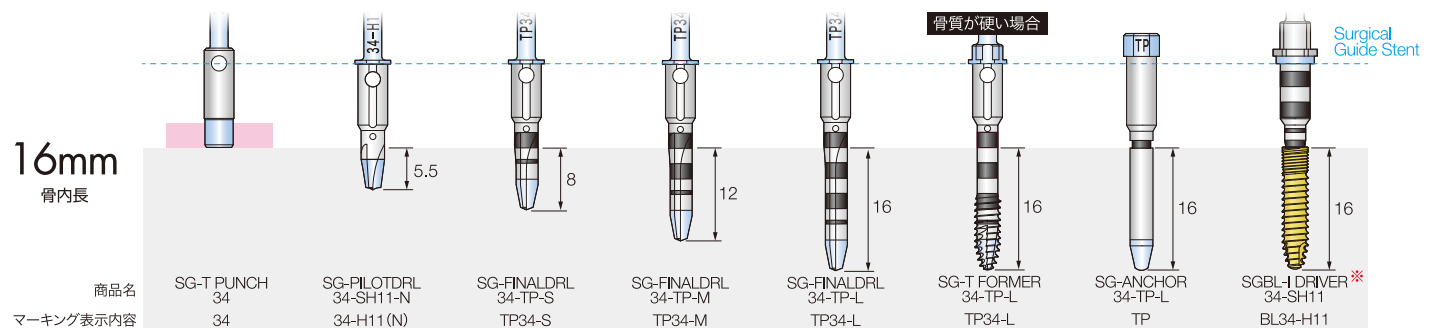
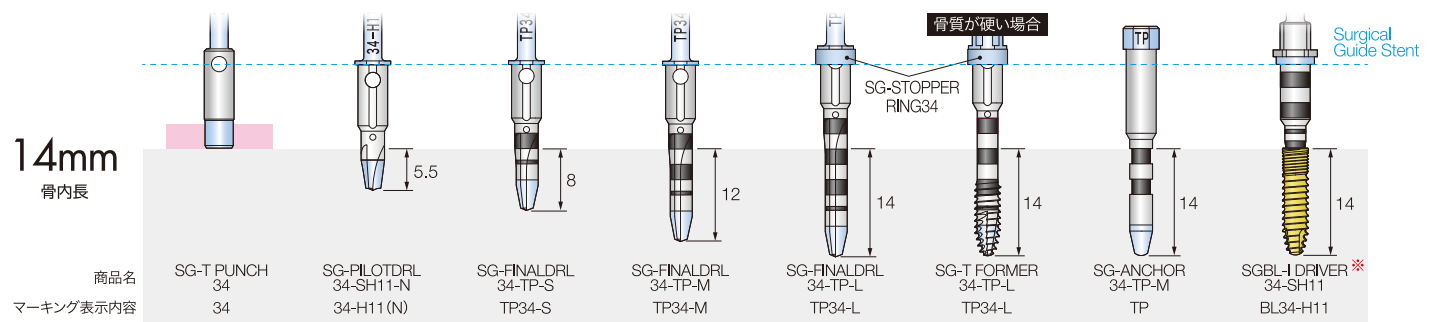
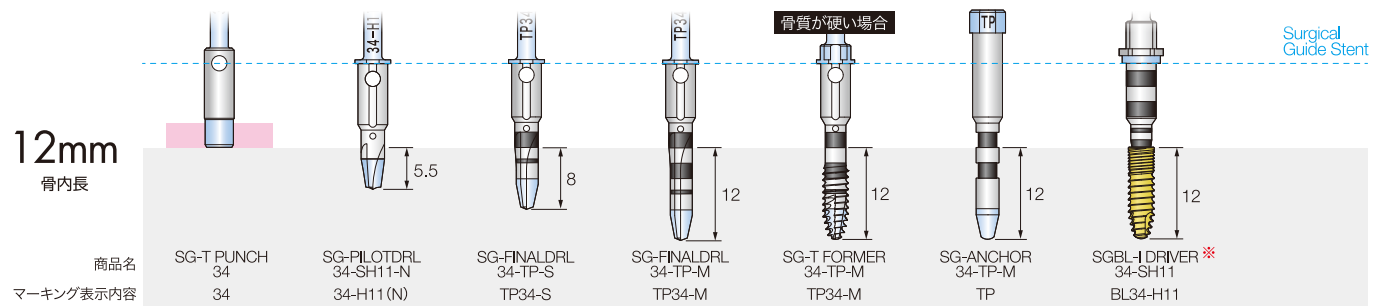
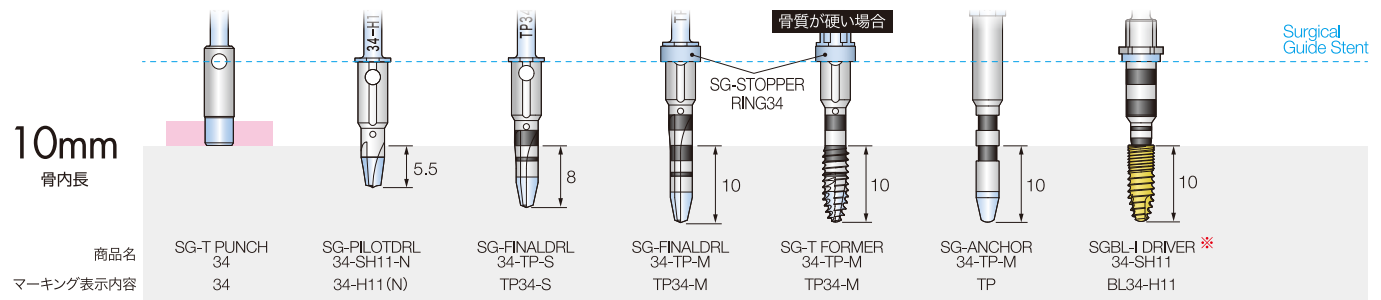
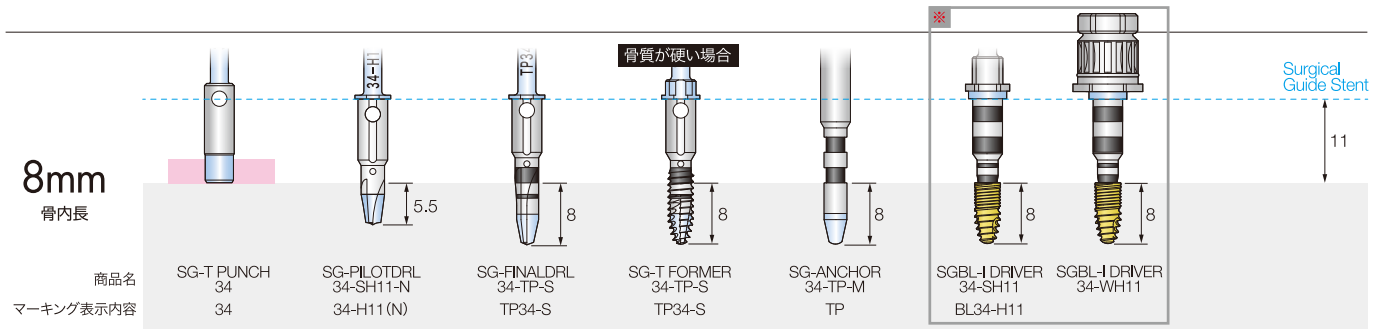
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.4\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH11タイプを選択することができます。

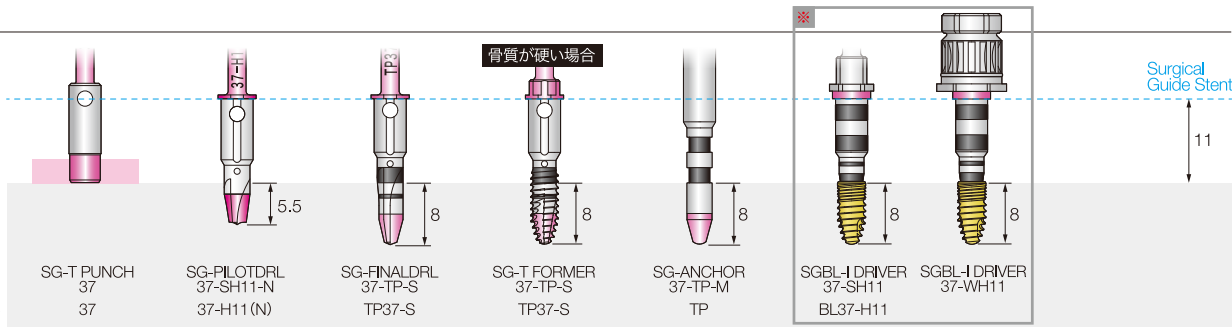
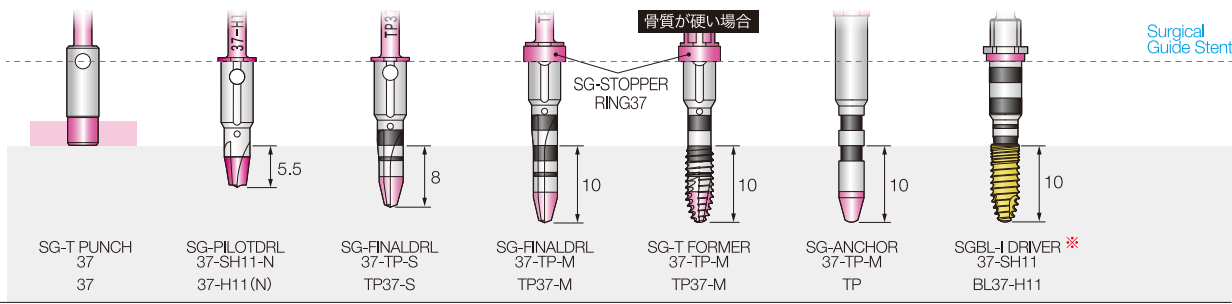
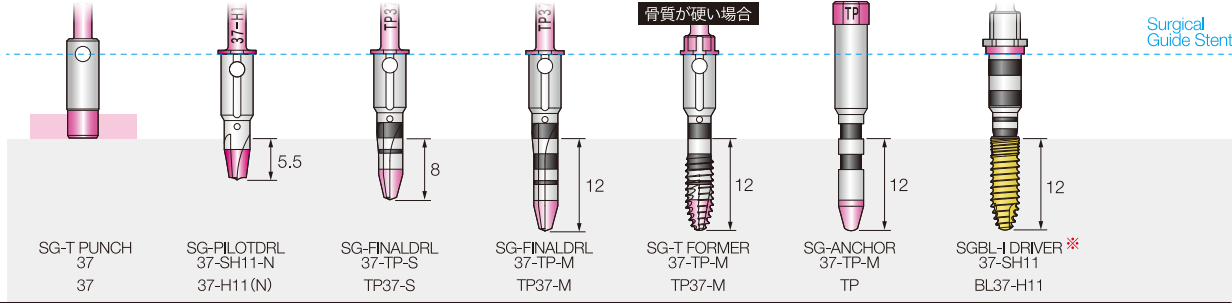
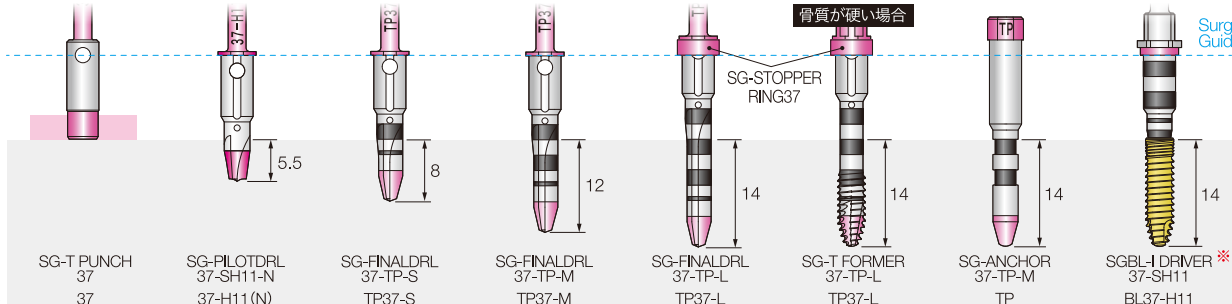
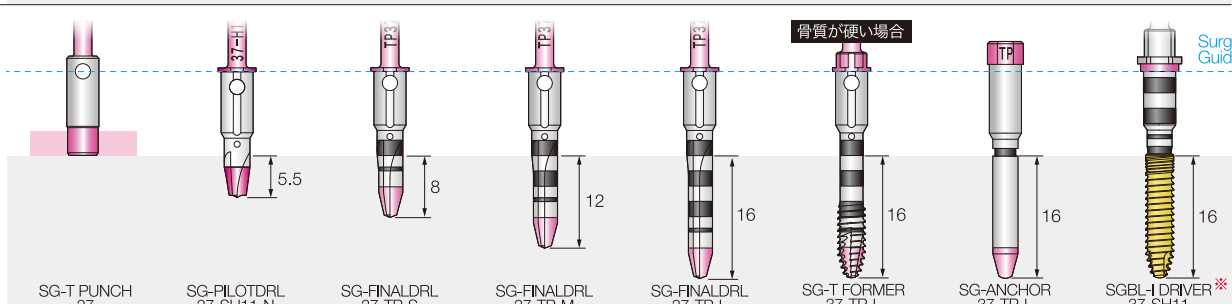
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm 骨内長							
	商品名 SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRILL 37-SH11-N 37-H11 (N)	SG-FINALDRILL 37-TP-S TP37-S	SG-T FORMER 37-TP-S TP37-S	SG-ANCHOR 37-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 37-SH11 BL37-H11	
10mm 骨内長							
	商品名 SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRILL 37-SH11-N 37-H11 (N)	SG-FINALDRILL 37-TP-S TP37-S	SG-FINALDRILL 37-TP-M TP37-M	SG-T FORMER 37-TP-M TP37-M	SG-ANCHOR 37-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 37-SH11 BL37-H11
12mm 骨内長							
	商品名 SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRILL 37-SH11-N 37-H11 (N)	SG-FINALDRILL 37-TP-S TP37-S	SG-FINALDRILL 37-TP-M TP37-M	SG-T FORMER 37-TP-M TP37-M	SG-ANCHOR 37-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 37-SH11 BL37-H11
14mm 骨内長							
	商品名 SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRILL 37-SH11-N 37-H11 (N)	SG-FINALDRILL 37-TP-S TP37-S	SG-FINALDRILL 37-TP-M TP37-M	SG-FINALDRILL 37-TP-L TP37-L	SG-T FORMER 37-TP-L TP37-L	SG-ANCHOR 37-TP-M TP
16mm 骨内長							
	商品名 SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRILL 37-SH11-N 37-H11 (N)	SG-FINALDRILL 37-TP-S TP37-S	SG-FINALDRILL 37-TP-M TP37-M	SG-FINALDRILL 37-TP-L TP37-L	SG-T FORMER 37-TP-L TP37-L	SG-ANCHOR 37-TP-L TP

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH11タイプを選択することができます。

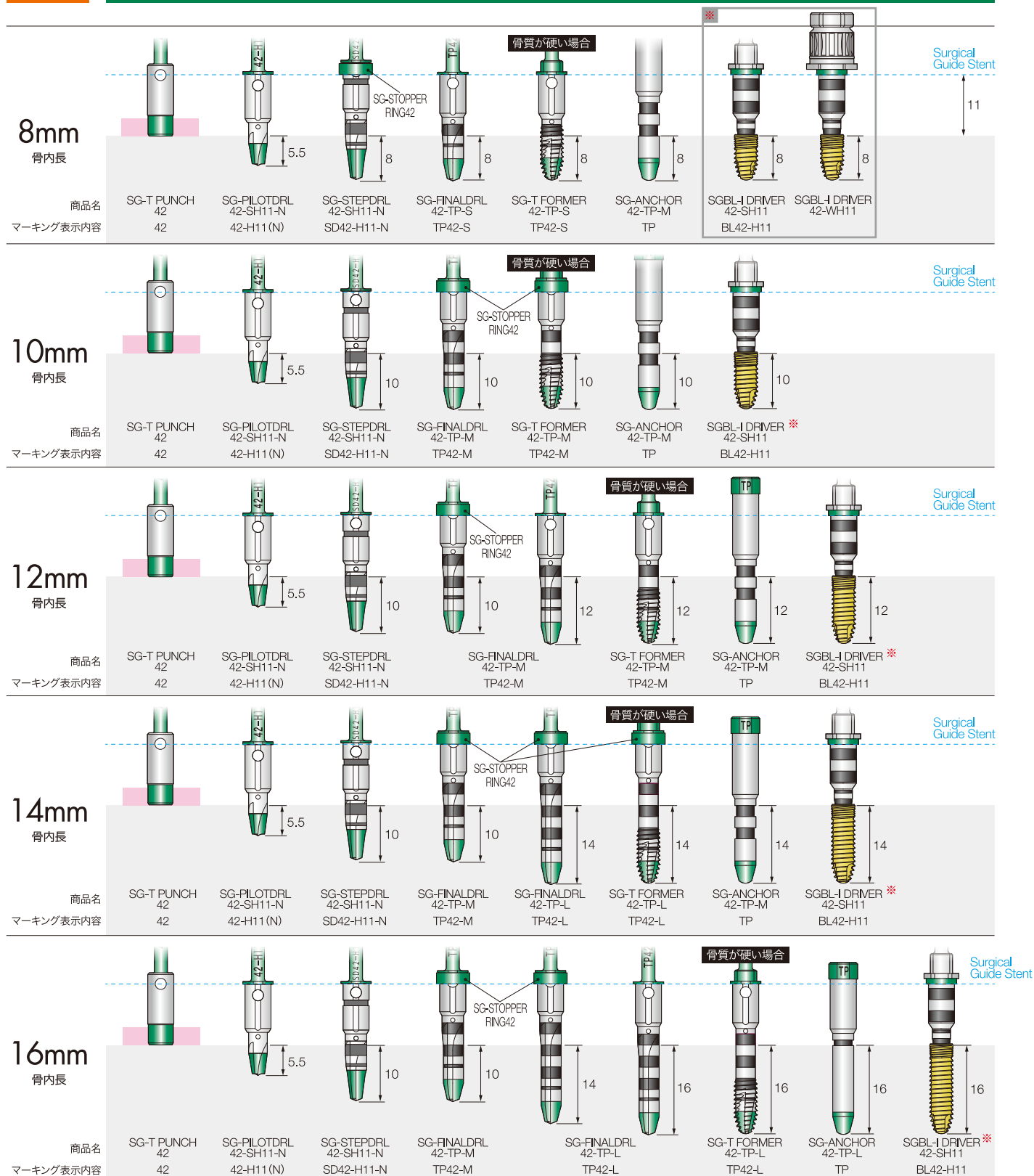
11mm
サージカルガイドシステム用

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm 骨内長									
商品名	SG-T PUNCH 47	SG-PILOTDRILL 47-SH11-N 47-H11 (N)	SG-STEPDRILL 47-SH11-N SD47-H11-N	SG-FINALDRILL 47-TP-S TP47-S	SG-T FORMER 47-TP-S TP47-S	SG-ANCHOR 47-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 47-SH11 BL47-H11	SGBL-I DRIVER 47-WH11	
マーキング表示内容	47	47-H11 (N)	SD47-H11-N	TP47-S	TP47-S	TP	BL47-H11		
10mm 骨内長									
商品名	SG-T PUNCH 47	SG-PILOTDRILL 47-SH11-N 47-H11 (N)	SG-STEPDRILL 47-SH11-N SD47-H11-N	SG-FINALDRILL 47-TP-M TP47-M	SG-T FORMER 47-TP-M TP47-M	SG-ANCHOR 47-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 47-SH11 BL47-H11		
マーキング表示内容	47	47-H11 (N)	SD47-H11-N	TP47-M	TP47-M	TP	BL47-H11		
12mm 骨内長									
商品名	SG-T PUNCH 47	SG-PILOTDRILL 47-SH11-N 47-H11 (N)	SG-STEPDRILL 47-SH11-N SD47-H11-N	SG-FINALDRILL 47-TP-M TP47-M	SG-T FORMER 47-TP-M TP47-M	SG-ANCHOR 47-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 47-SH11 BL47-H11		
マーキング表示内容	47	47-H11 (N)	SD47-H11-N	TP47-M	TP47-M	TP	BL47-H11		
14mm 骨内長									
商品名	SG-T PUNCH 47	SG-PILOTDRILL 47-SH11-N 47-H11 (N)	SG-STEPDRILL 47-SH11-N SD47-H11-N	SG-FINALDRILL 47-TP-M TP47-M	SG-FINALDRILL 47-TP-L TP47-L	SG-T FORMER 47-TP-L TP47-L	SG-ANCHOR 47-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 47-SH11 BL47-H11	
マーキング表示内容	47	47-H11 (N)	SD47-H11-N	TP47-M	TP47-L	TP47-L	TP	BL47-H11	
16mm 骨内長									
商品名	SG-T PUNCH 47	SG-PILOTDRILL 47-SH11-N 47-H11 (N)	SG-STEPDRILL 47-SH11-N SD47-H11-N	SG-FINALDRILL 47-TP-M TP47-M	SG-FINALDRILL 47-TP-L TP47-L	SG-T FORMER 47-TP-L TP47-L	SG-ANCHOR 47-TP-L TP	SGBL-I DRIVER 47-SH11 BL47-H11	
マーキング表示内容	47	47-H11 (N)	SD47-H11-N	TP47-M	TP47-L	TP47-L	TP	BL47-H11	

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH11タイプを選択することができます。

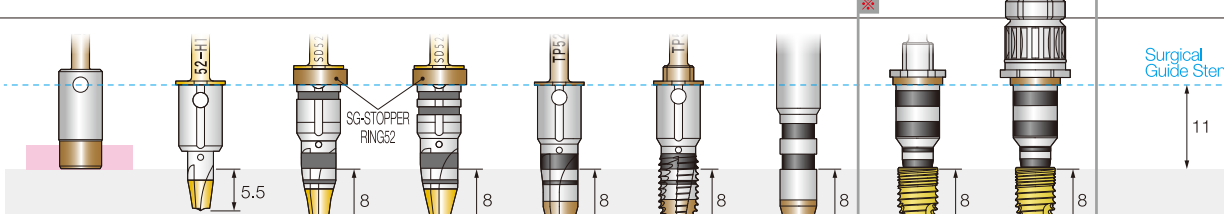
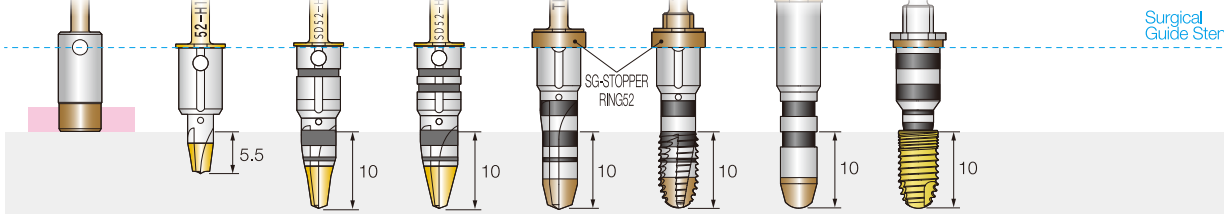
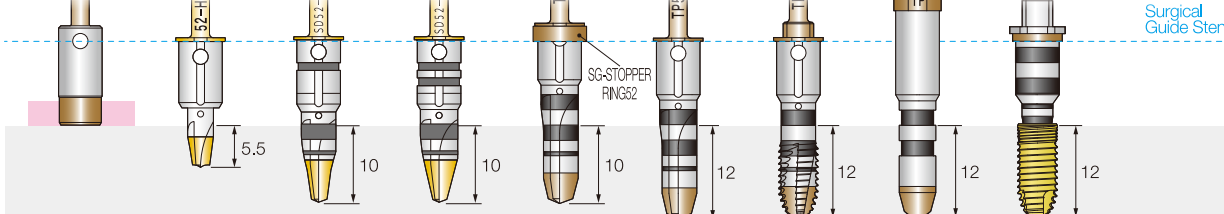
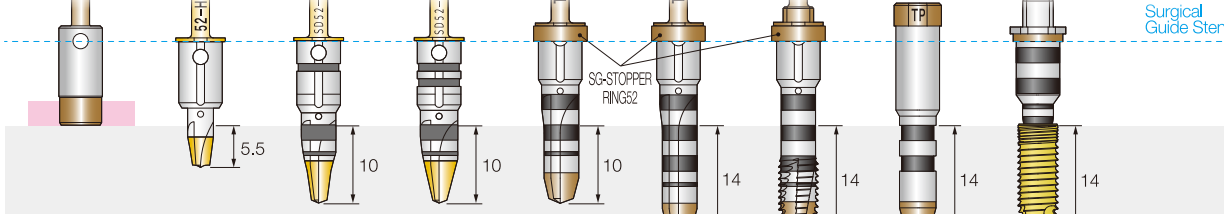
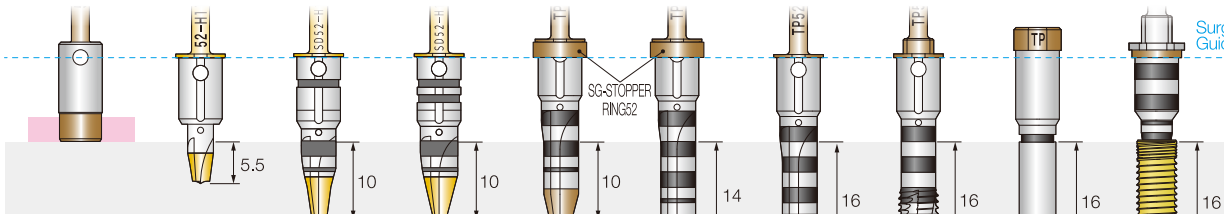
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm 骨内長										
	SG-T PUNCH 52	SG-PILOTDRILL 52-SH11-N 52-H11 (N)	SG-STEPDRILL 52-SH11#1N SD52-H11-1N	SG-STEPDRILL 52-SH11#2N SD52-H11-2N	SG-FINALDRILL 52-TP-S TP52-S	SG-T FORMER 52-TP-S TP52-S	SG-ANCHOR 52-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 52-SH11 BL52-H11	SGBL-I DRIVER 52-WH11	
10mm 骨内長										
	SG-T PUNCH 52	SG-PILOTDRILL 52-SH11-N 52-H11 (N)	SG-STEPDRILL 52-SH11#1N SD52-H11-1N	SG-STEPDRILL 52-SH11#2N SD52-H11-2N	SG-FINALDRILL 52-TP-M TP52-M	SG-T FORMER 52-TP-M TP52-M	SG-ANCHOR 52-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 52-SH11 BL52-H11		
12mm 骨内長										
	SG-T PUNCH 52	SG-PILOTDRILL 52-SH11-N 52-H11 (N)	SG-STEPDRILL 52-SH11#1N SD52-H11-1N	SG-STEPDRILL 52-SH11#2N SD52-H11-2N	SG-FINALDRILL 52-TP-M TP52-M	SG-T FORMER 52-TP-M TP52-M	SG-ANCHOR 52-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 52-SH11 BL52-H11		
14mm 骨内長										
	SG-T PUNCH 52	SG-PILOTDRILL 52-SH11-N 52-H11 (N)	SG-STEPDRILL 52-SH11#1N SD52-H11-1N	SG-STEPDRILL 52-SH11#2N SD52-H11-2N	SG-FINALDRILL 52-TP-M TP52-M	SG-FINALDRILL 52-TP-L TP52-L	SG-T FORMER 52-TP-L TP52-L	SG-ANCHOR 52-TP-M TP	SGBL-I DRIVER 52-SH11 BL52-H11	
16mm 骨内長										
	SG-T PUNCH 52	SG-PILOTDRILL 52-SH11-N 52-H11 (N)	SG-STEPDRILL 52-SH11#1N SD52-H11-1N	SG-STEPDRILL 52-SH11#2N SD52-H11-2N	SG-FINALDRILL 52-TP-M TP52-M	SG-FINALDRILL 52-TP-L TP52-L	SG-T FORMER 52-TP-L TP52-L	SG-ANCHOR 52-TP-L TP	SGBL-I DRIVER 52-SH11 BL52-H11	

TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH11タイプを選択することができます。

サージカルガイドステント高さ **13mm**

FINESIA®
Surgical Guide System
Operative Procedure Chart

Tapered type  術式チャート

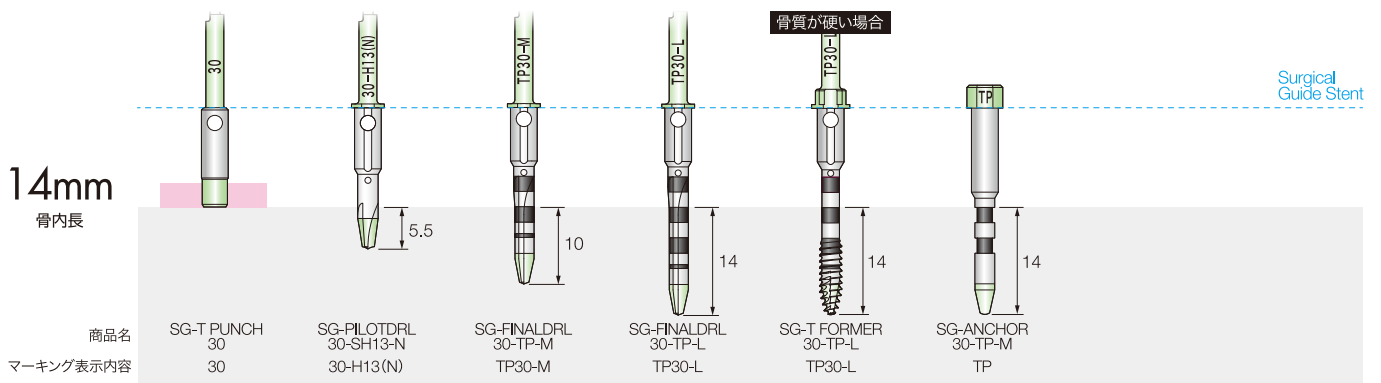
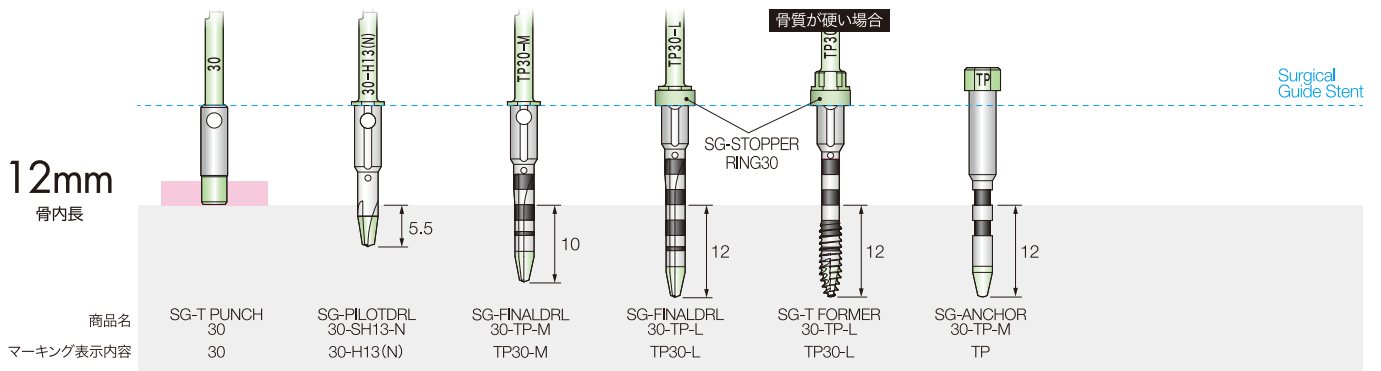
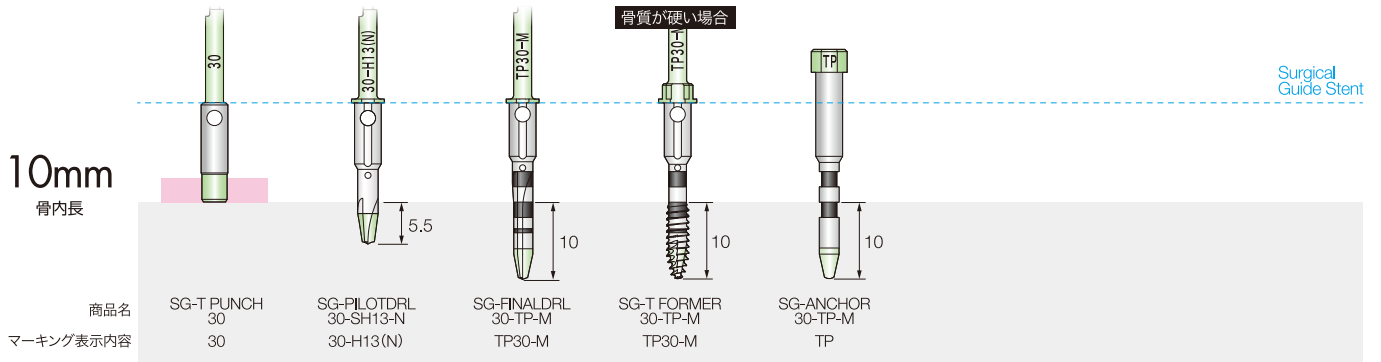
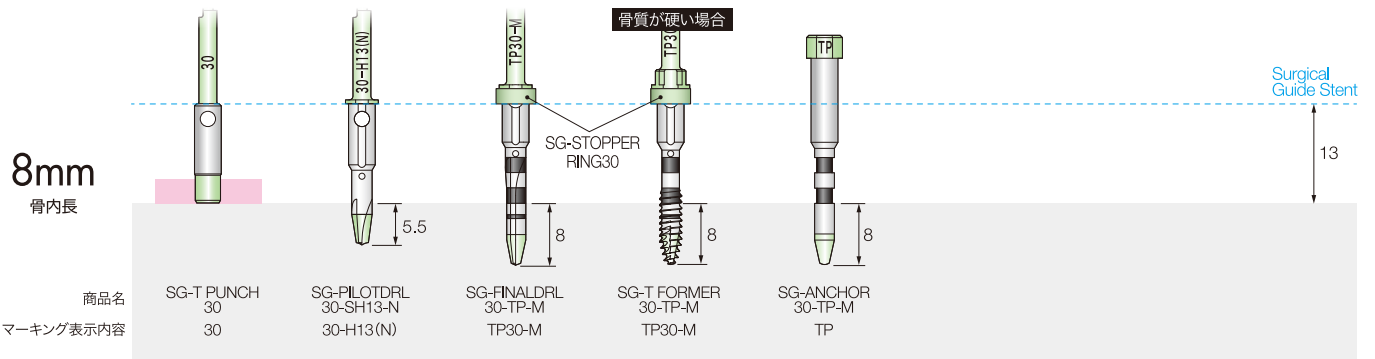
13mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.0\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece

単位 :mm

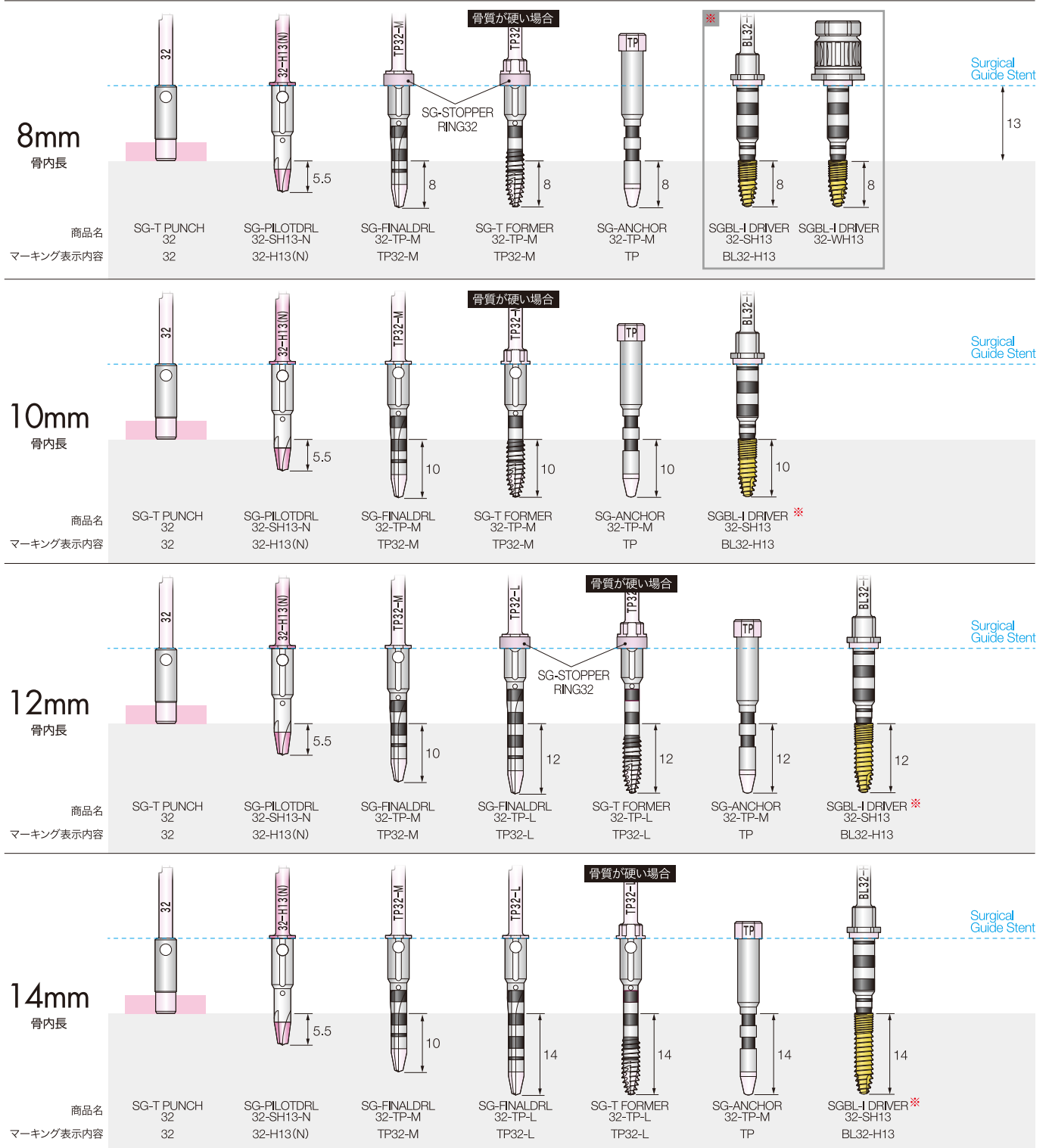
13mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.2\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

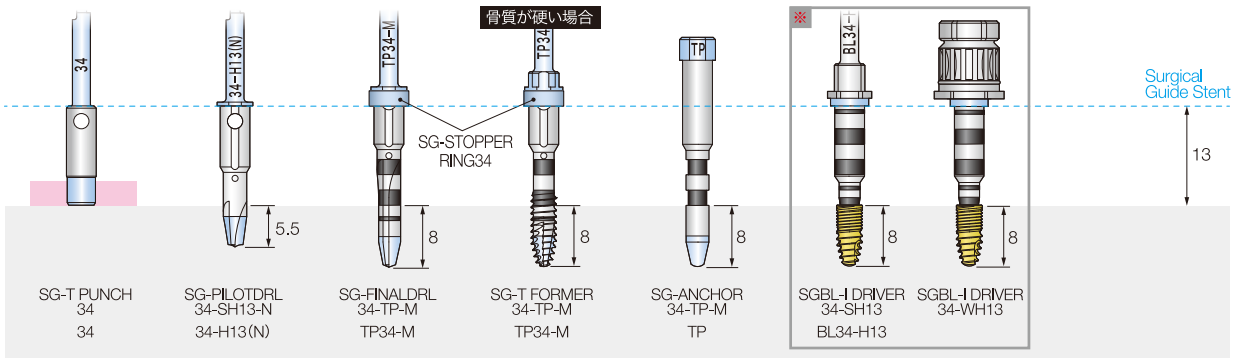
Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.4\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


8mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容




10mm
骨内長

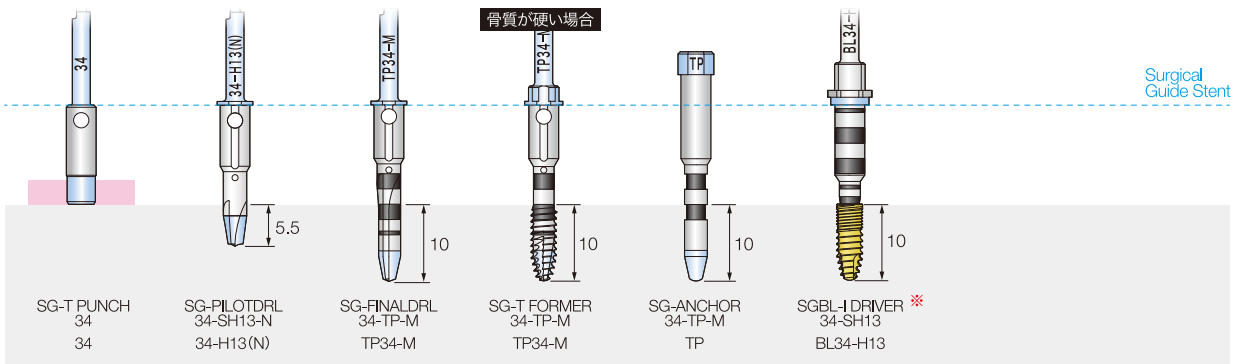商品名
マーキング表示内容




12mm
骨内長

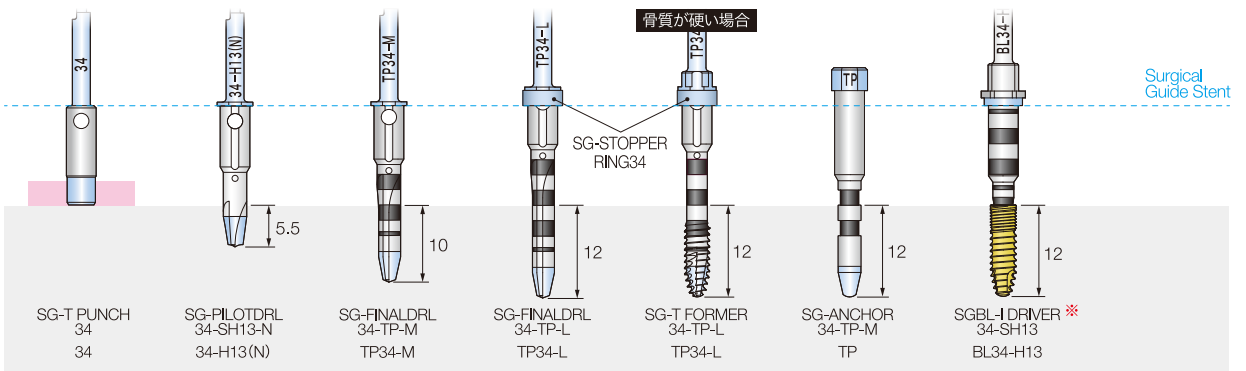商品名
マーキング表示内容



14mm
骨内長

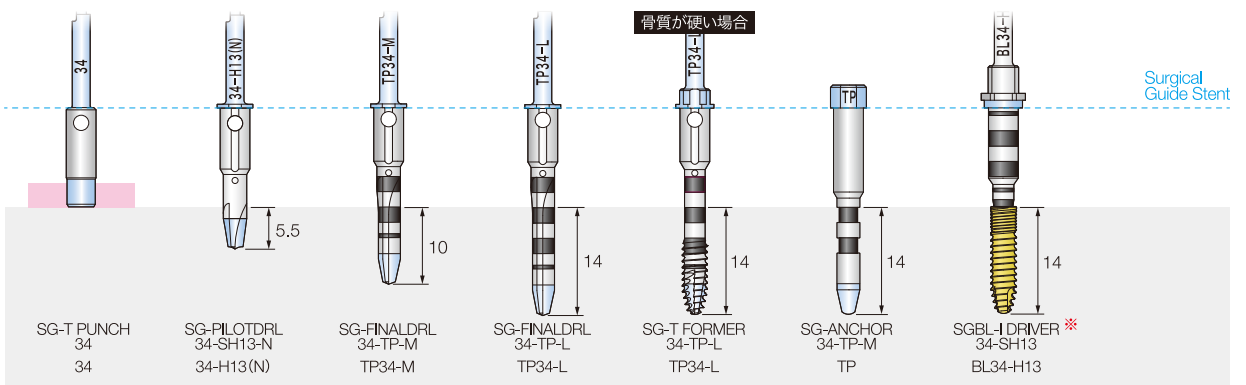商品名
マーキング表示内容



1P: 1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH13タイプを選択することができます。

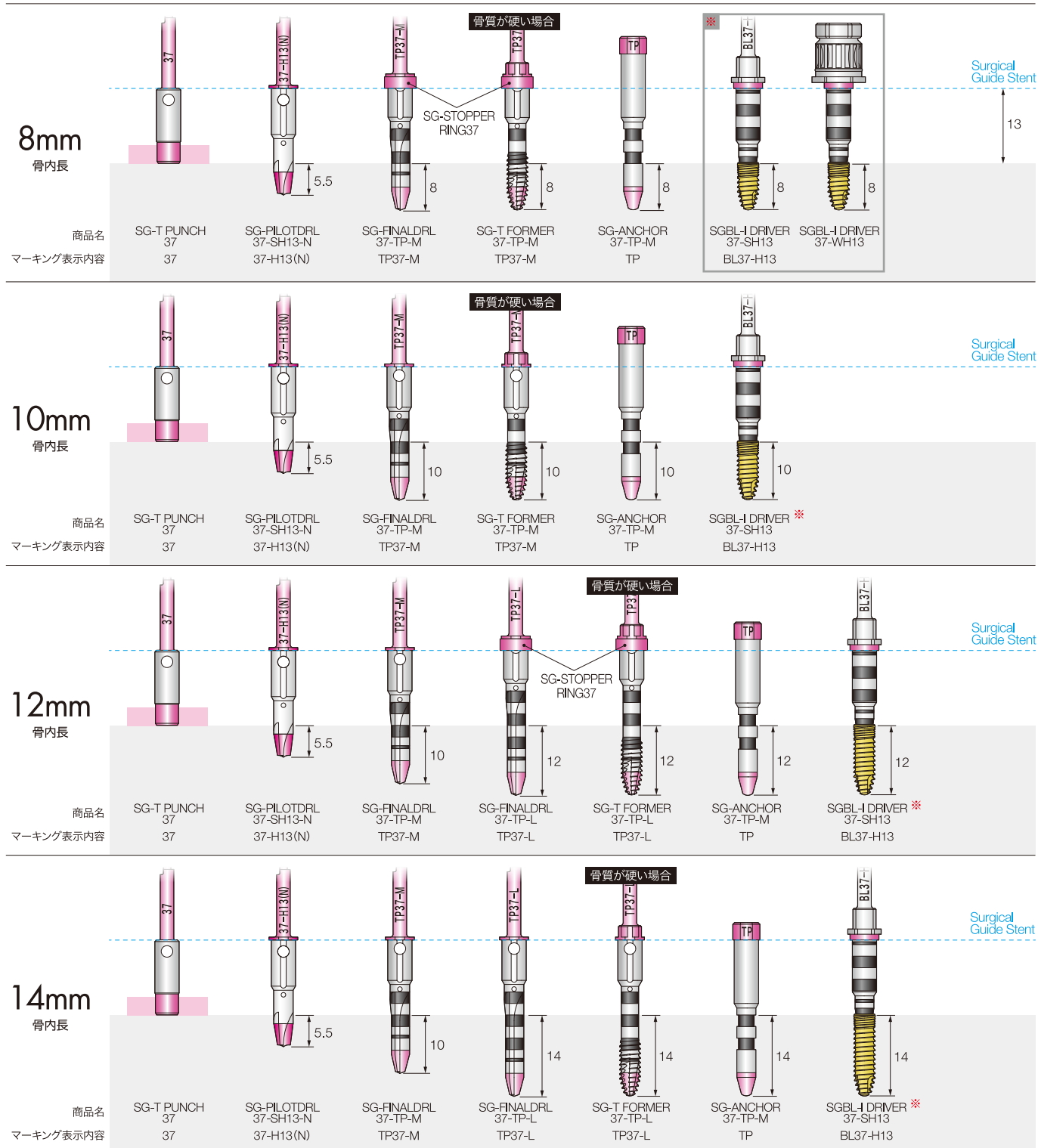
13mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH13タイプを選択することができます。

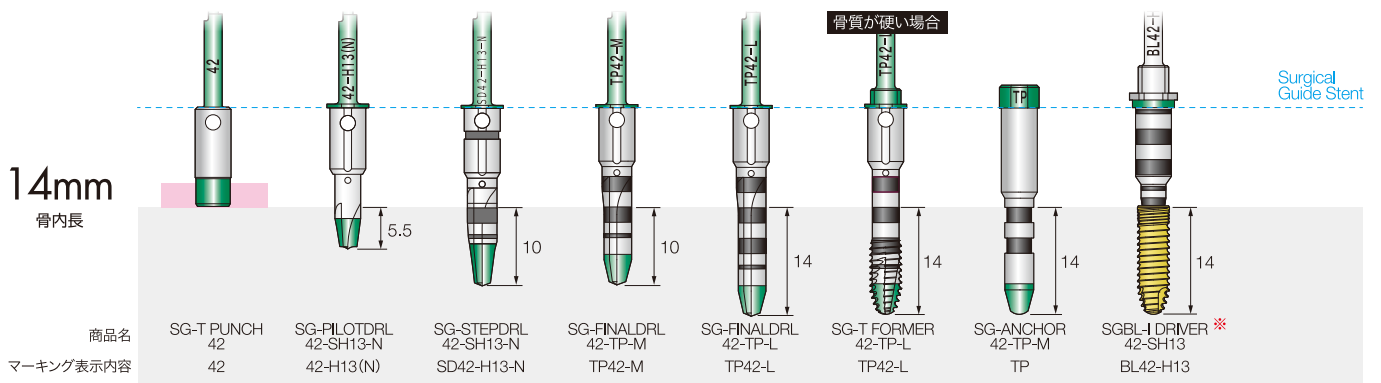
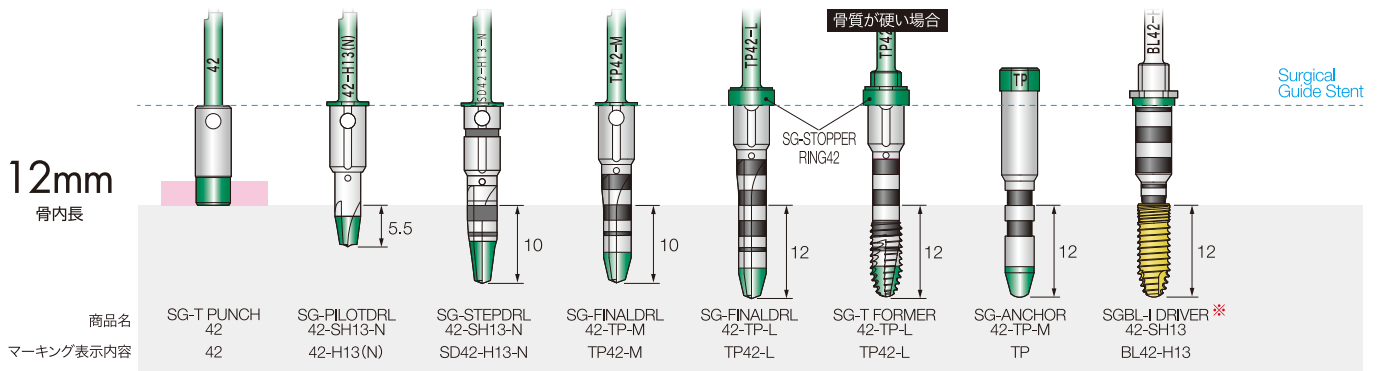
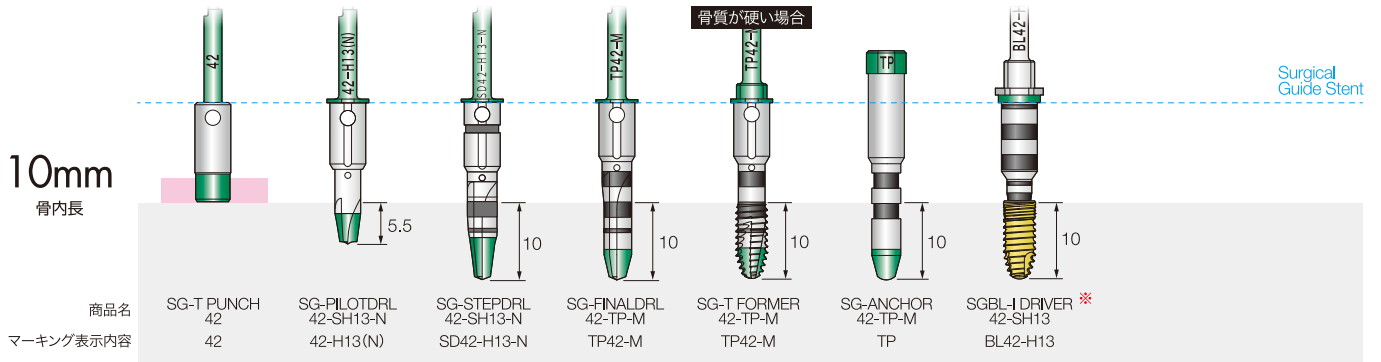
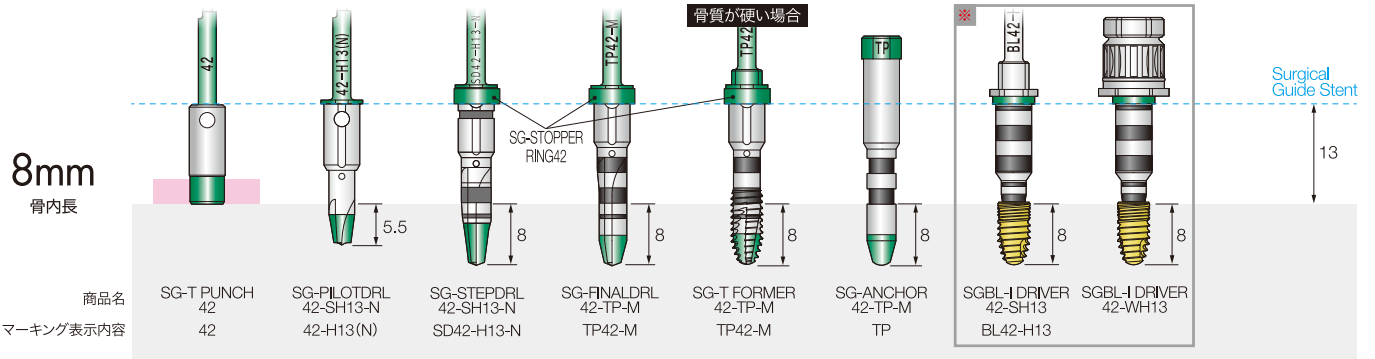
13mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム

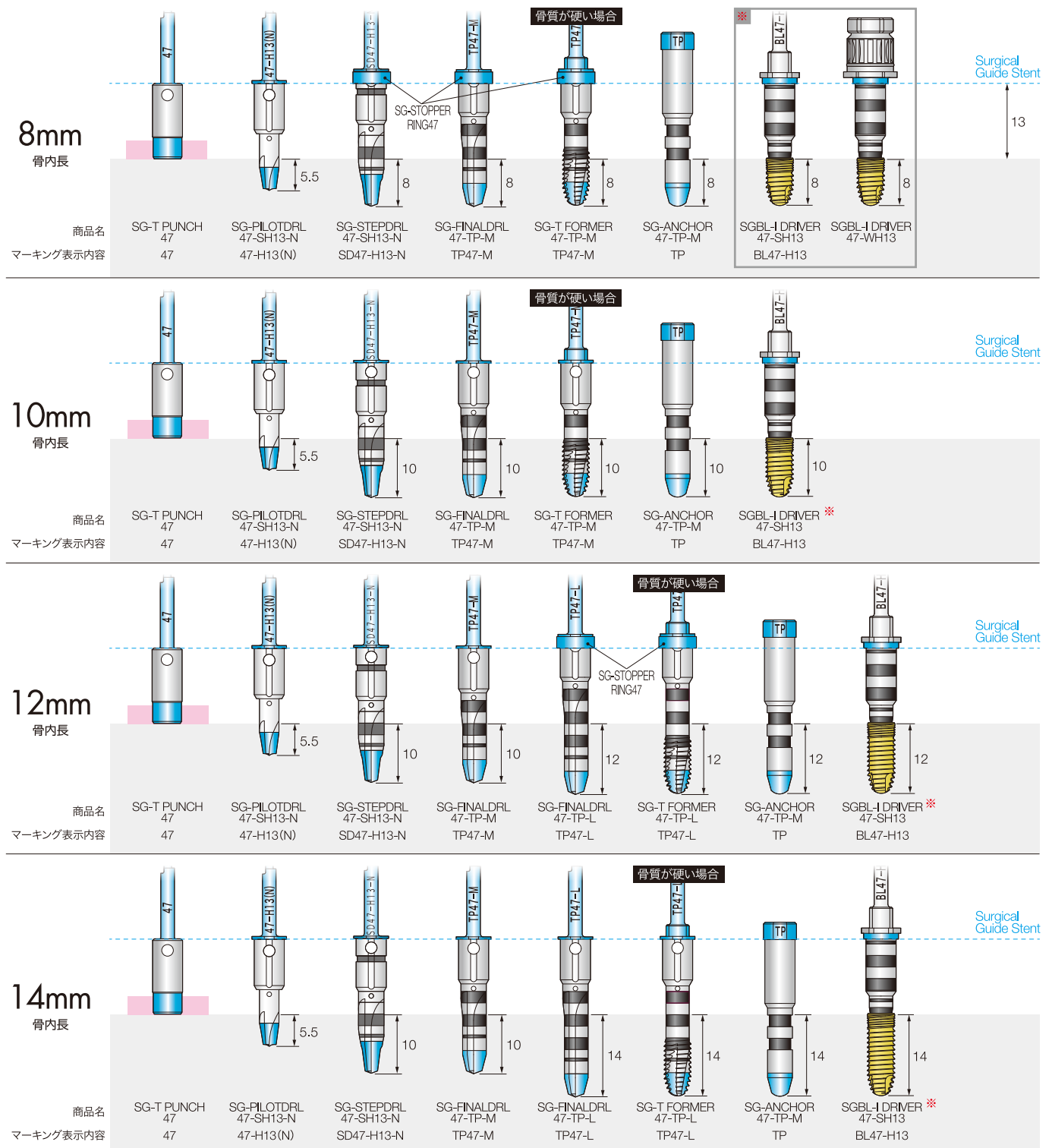
FINESIA Surgical Guide System

術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

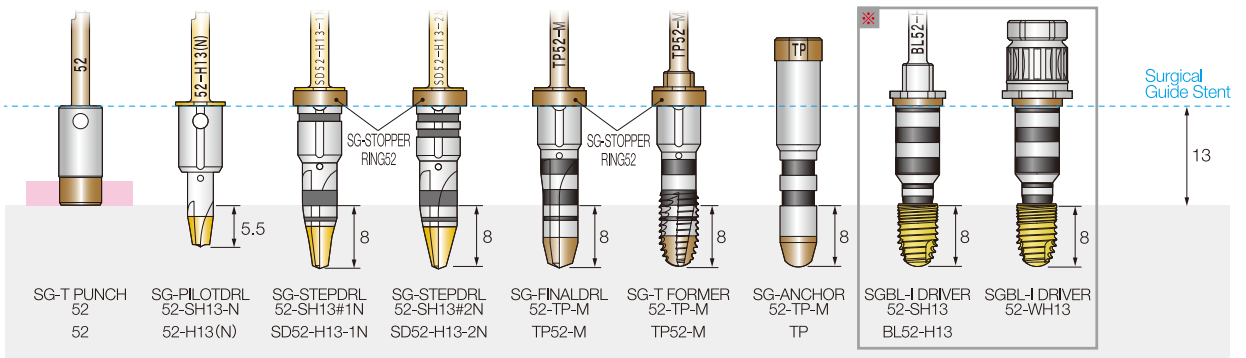
Tapered type 

インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


8mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容




10mm
骨内長

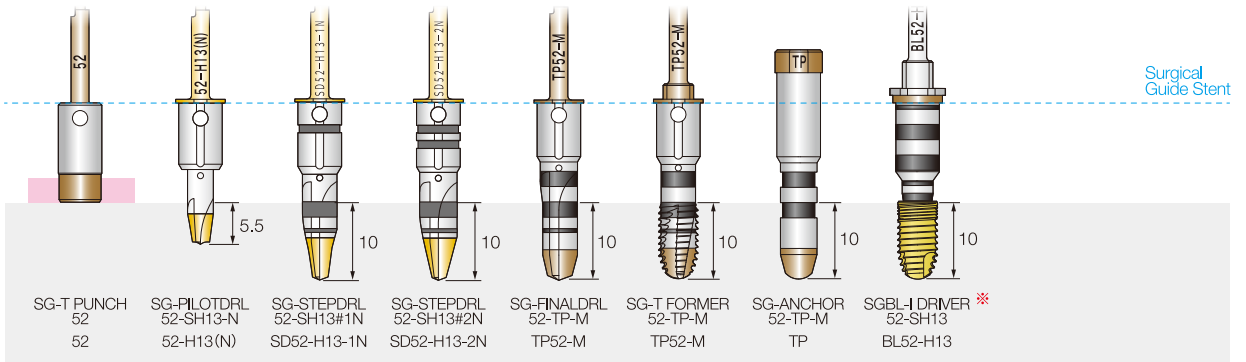商品名
マーキング表示内容




12mm
骨内長

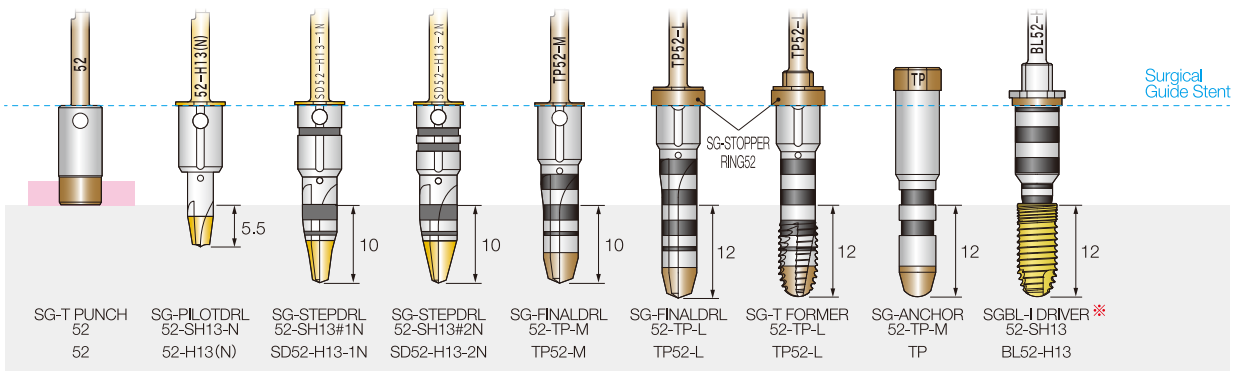商品名
マーキング表示内容



14mm
骨内長

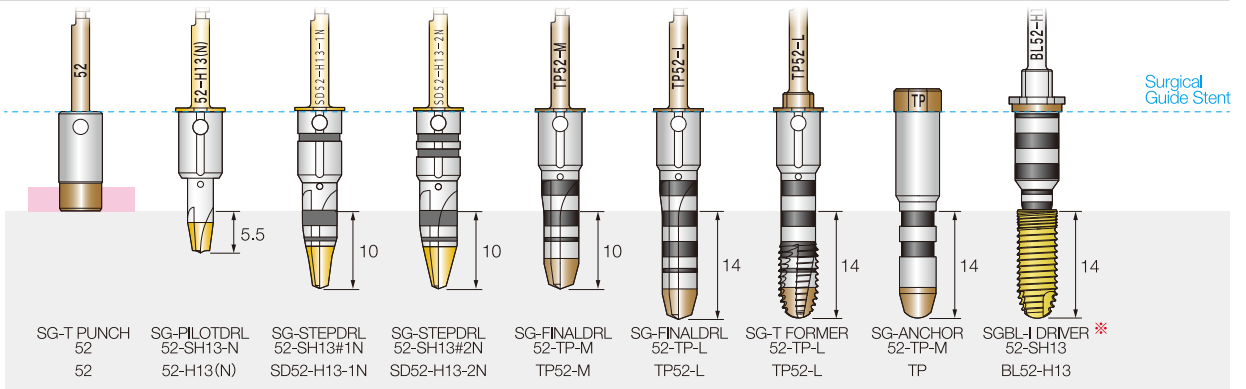商品名
マーキング表示内容



TL: Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH13タイプを選択することができます。



京セラ株式会社

メディカル事業部 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

本 社 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地 〒612-8501
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 I・Sビル 〒140-8810
Tel:03-5782-7018 Fax:03-5782-8518

大阪事業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

名古屋営業所 名古屋市東区葵3丁目15-31 (住友生命千種ニュータワービル6F) 〒461-0004
Tel:052-930-1480 Fax:052-938-1388

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト7F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.finesia.world

FINESIA サージカルガイドシステム器具【医療機器届出番号：26B1X10012101123】

「FINESIA」は、京セラ株式会社の登録商標です。

当術式マニュアルに記載の情報は2021年9月時点のものです。