

## FINESIA アバットメントリムーバー

アバットメントがインプラント体と強固に密着し、取り外しが困難な場合にアバットメントリムーバーを使用します。  
※アバットメント自体に損傷がないことをご確認ください。

### ■ 製品構成




アバットメントリムーバーと対応アバットメント一覧

対応システム	マーキング		対応アバットメント
	天面部	シャフト部	
FINESIA BL	BL	NP (S)	BL インプラント NP 用アバットメント ※ 1 S 又は L サイズは補綴高さによって使い分けれます。
	BL	NP (L)	
	BL	RP (S)	BL インプラント RP 用アバットメント ※ 1 S 又は L サイズは補綴高さによって使い分けれます。
	BL	RP (L)	※ 2 BL スプリントアバットメントは除きます。
	BL	WP (S)	BL インプラント WP 用アバットメント ※ BL スプリントアバットメントは除きます。
	BL	SP-RP/WP	BL インプラント スプリントアバットメント ストレート
	BL	SPA-RP/WP	BL インプラント スプリントアバットメント アンクル
FINESIA TL	TL	RP/WP	TL インプラント アバットメント 全て

製品のマーキングと対応アバットメントを確認してご使用ください。

### ■ 操作方法


#### STEP 1

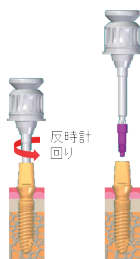

ヘキサロビュラードライバーを使用してアバットメントスクリューを取り外します。


備考：緩んだアバットメントスクリューが外れない場合、粘着ワックスをヘキサロビュラードライバーの先端に少量塗布すると、スクリューを保持しやすくなります。

#### STEP 2

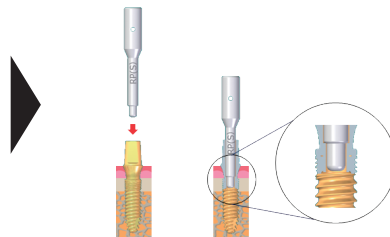

上表に従い適切なアバットメントリムーバーを選択します。  
アバットメントリムーバーをアバットメントのスクリューホール部に挿入し、底部で止まるまで深く差し込みます。

#### STEP 3

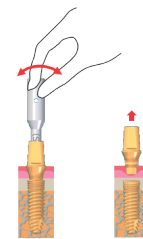

アバットメントリムーバーを徒手的に少しずつ揺らして、アバットメントをインプラント体から外します。

### 注意

- ▶ アバットメントリムーバーに過大な力をかけると器具破損の恐れがあります。使用前に器具の状態をよく確認し、摩耗や損傷が認められた場合には使用を控え、新しい器具と交換してください。
- ▶ アバットメントリムーバー使用時に過大な力をかけるとインプラント体やアバットメントを傷つける恐れがあります。使用の際は徒手的に操作してください。
- ▶ アバットメントリムーバーの強度が低下し、使用中に破損する恐れがあるため、器具を変形させたり切削したりするなどの改造は行わないでください。
- ▶ アバットメントリムーバーの誤飲防止の為、持ち手の貫通孔に市販の誤飲防止用チューブや縫合糸を通して使用してください。

(製造販売届出番号) リムーバーキット：26B1X10012106107

