


マウント付きインプラント体からマウントを取り外す方法

マウント付き FINESIA TL インプラント体を、把持機構付きインプラントドライバーで埋入する場合、予め、口腔外でインプラント体からマウントを取り外す必要があります。ここでは、その方法を説明します。



パッケージからケースを取り出します。
ケースの蓋を外し、
ケース側面をスライドさせます。

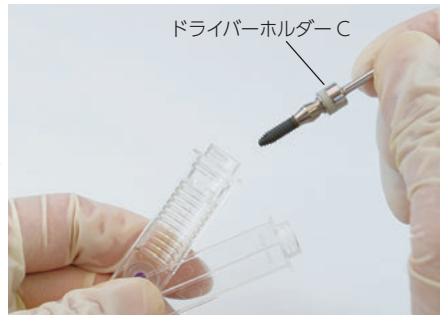

ドライバーホルダーCをマウントに装着し、
インプラント体をケースから取り出します。



インプラント体のついた
ドライバーホルダーCを、
インプラントホルダーに運搬します。



インプラントホルダーを把持して
ドライバーホルダーCを
マウントから外します。



F-DAホルダー、ヘキサロビューラドライバーを使用してマウントスクリューを外し、
鉗子等を用いて、インプラント体からマウントを外します。



インプラントドライバーを用いて、
インプラントホルダーから
インプラント体を取り出します。