

## FINESIA BL インプレッションポスト


BLインプラントはプラットフォームスイッチングデザインのため、印象コーピングの挿入口は細くなっています。

また、印象コーピングの上部の形態は、平面部と曲面部で構成された形状になっています。挿入する際は、平面部が隣接側になるように注意してください。



チェアーサイドからラボサイドに印象を送る際は、頬側に設定された印象コーピングの方向に関する情報を共有してください。

ポスト部の頬側にワックスやレジン等を付与すると方向が分かりやすくなります。

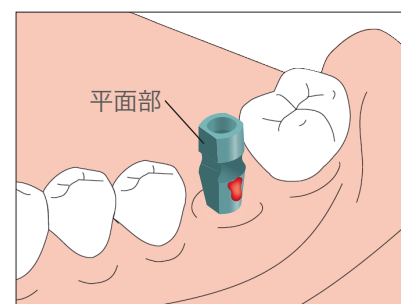

印象コーピングに設定されている平面部が隣接側になるようにしてください。



ワックスやレジン等を付与する

【薬事承認番号】

FINESIA BLフィクスチャー ファイナフィックス【22800BZX00034000】  
 FINESIA BLフィクスチャー ファイナタイト【22800BZX00035000】  
 FINESIA印象採得器具【27B1X00139102115】

