

破折したアバットメントスクリューの除去方法

スクリューの破折片を除去するには下記の方法をお試しください。

① 探針など先端の鋭利な
インスツルメントを使用する。




② 超音波スケーラーを使用する。



③ 破折片にグルーブを形成して、
マイナスドライバーを使用する。



注意点：・インプラント体内部を決して傷付けないように注意し、傷が付いていないか確認してください。
・新しいアバットメントスクリューを試適し、スムーズにねじ込めることを確認してください。
・内部の状態により適正なトルクで締め込めない場合があります。

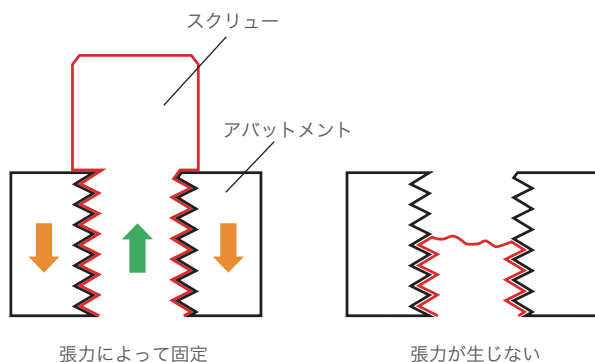

アバットメントとスクリューは張力により固定されていますが、破折により頭部を失ったものには加わっていないため、基本的には残存部を反時計方向に回転することで除去可能であることが多いといわれています。

「SAFE Troubleshooting Guide Volume 1 (P.39)」
(クインテッセンス出版株式会社) より

【薬事承認番号】

FINESIA BLフィクスチャー ファイナフィックス 【22800BZX00034000】
FINESIA BLフィクスチャー ファイナタイト 【22800BZX00035000】
FINESIA BLアバットメント 【22800BZX00036000】
FINESIA BLチタンベースアバットメント 【22900BZX00097000】



京セラ株式会社 メディカル事業部 本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501

<https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 I-Sビル 〒140-8810 Tel:03-5782-7018 Fax:03-5782-8518

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001 Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

岡山営業所 岡山市北区扇屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826 Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

名古屋営業所 名古屋市東区築3丁目15-31(住友生命千種ニュータービル6F) 〒461-0004 Tel:052-930-1480 Fax:052-938-1388

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト7F) 〒812-0013 Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177

大阪営業所 大阪府淀川区宮原3丁目3-31号(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003 Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157



www.finesia.world

「FINESIA」は京セラ株式会社の登録商標です。
本資料に記載の情報は2019年11月時点のものです。
本資料については、無断で複製、転載することを禁じます。

© 2020 KYOCERA Corporation
200131T [D-141-1] 012684